



Инструкция по установке и регистрации в приложении Lumiflex LinX

Для пользователей
с телефонами на Android
(через APK)

Установка приложения Lumiflex LinX




Установка на Android

1. Отсканируйте QR-код или загрузите соответствующий APK-файл со [страницы](#).
2. Загрузка APK-файла начнется автоматически. Файл не представляет опасности для вашего телефона.
3. Дождитесь завершения загрузки и установите приложение.

[Прямая ссылка Android](#)




Регистрация в приложении Lumiflex LinX

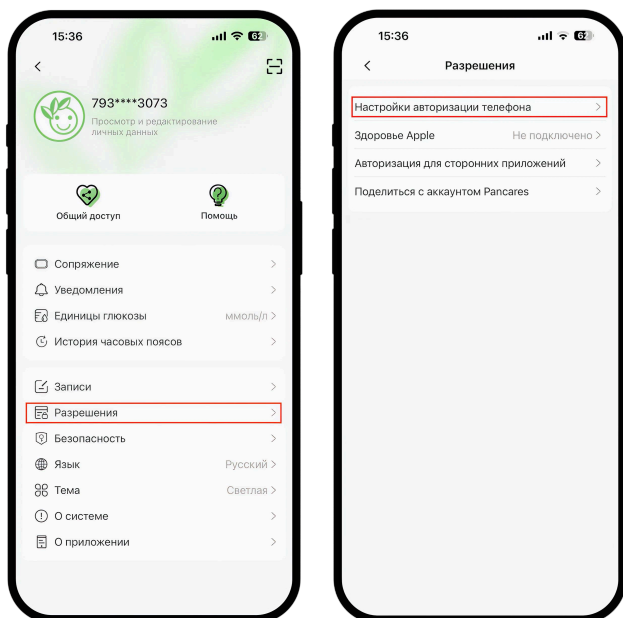

3. Вернитесь на страницу «Профиль», кликнув на иконку стрелки в левом верхнем углу. Выберите «Разрешения» → «Настройки авторизации телефона».


4. Убедитесь, что все галочки включены (они должны быть зелеными). Если потребуется, настройте пункты вручную.
5. Приложение готово к работе. Можете начать подключение сенсора.

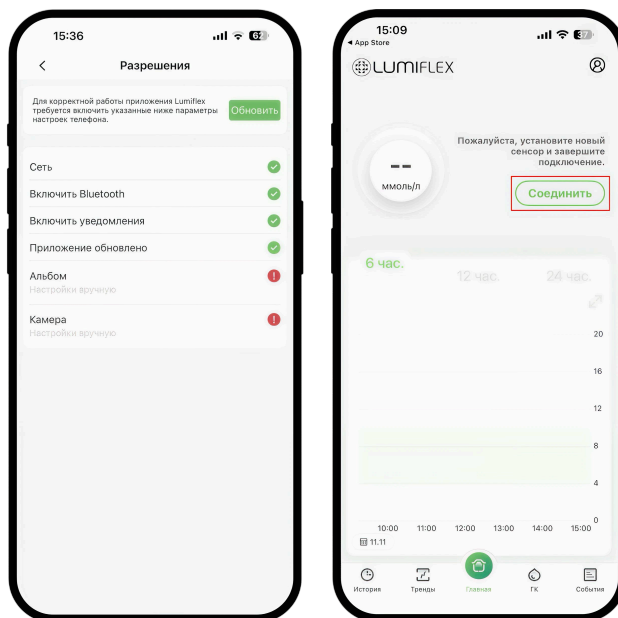

Регистрация в приложении Lumiflex LinX



Обратите внимание! Для регистрации в приложении используйте только **российский номер** мобильного телефона.

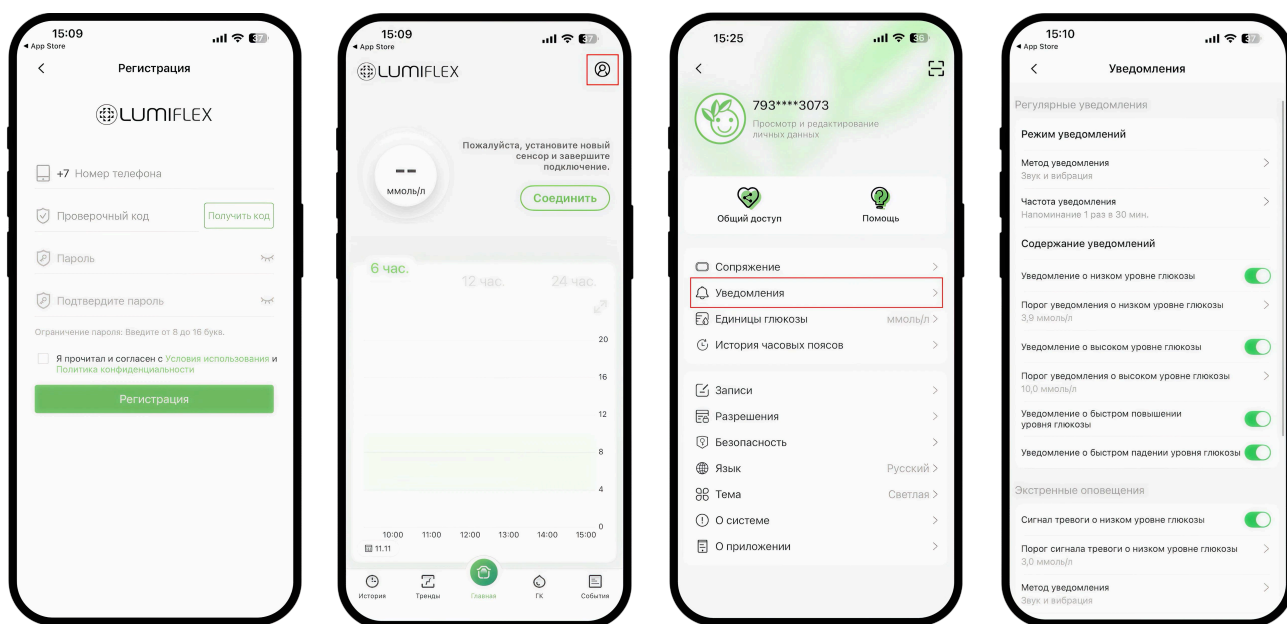

1. Введите свой номер телефона, запросите код, задайте пароль и подтвердите его, прожмите галочку для согласия с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. Нажмите кнопку **«Регистрация»**.
2. Убедитесь, что все уведомления включены. Зайдите в свой профиль, кликнув на иконку в правом верхнем углу. Выберите **«Уведомления»**. Настройте.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



help@lumiflex.ru