


Настройка безопасного режима

Пошаговая инструкция

Безопасный режим

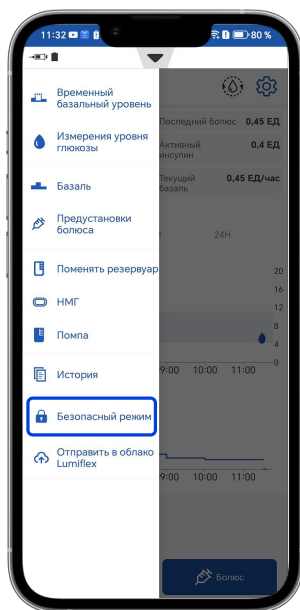

Что вы можете делать в безопасном режиме




- Приостанавливать или возобновлять инфузию инсулина.
- Вводить болюс через предустановленный болюс.
- Фиксировать измерения уровня глюкозы в крови.
- Просматривать историю.

Вы можете настроить и включить безопасный режим на странице **«Безопасный режим»** в **главном меню**.




Для настройки соответствующих параметров безопасного режима следуйте подсказкам в приложении.

Настройка безопасного режима




1. Настройте подачу инсулина и нажмите **«Далее»**.

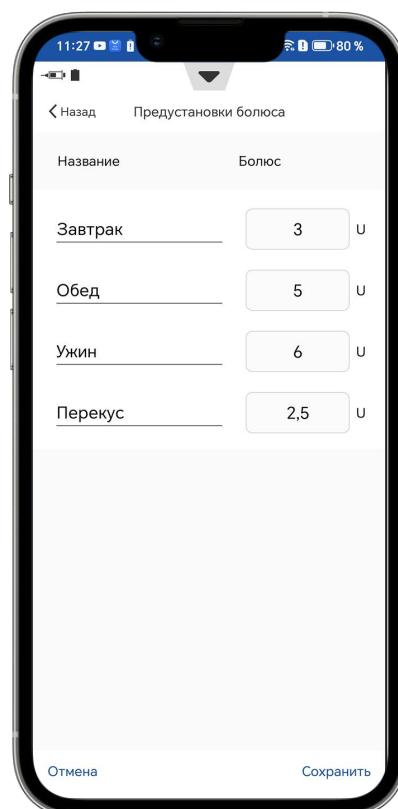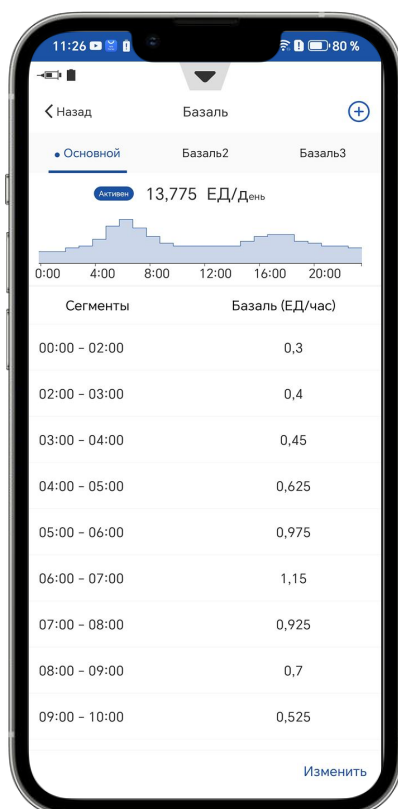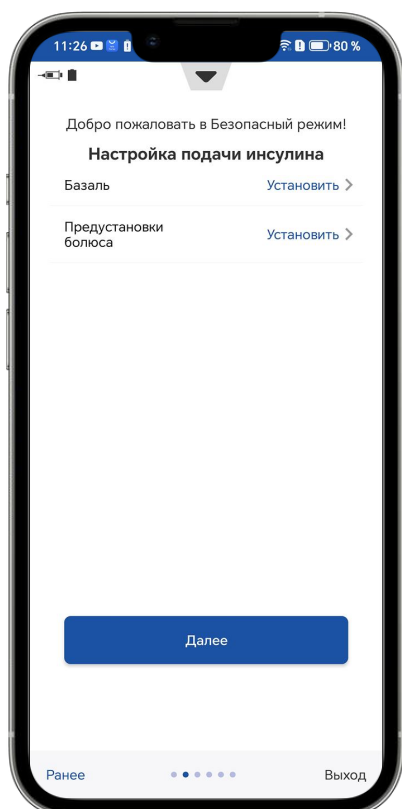

- Включите все уведомления, необходимые для корректной работы безопасного режима. Нажмите «**Далее**» и дождитесь установки соединения.

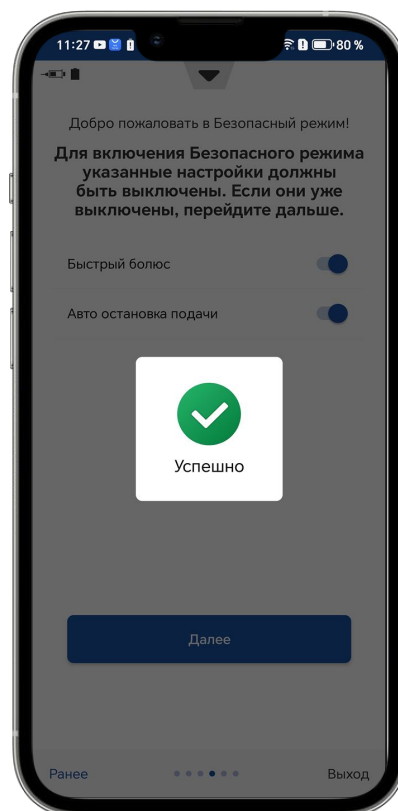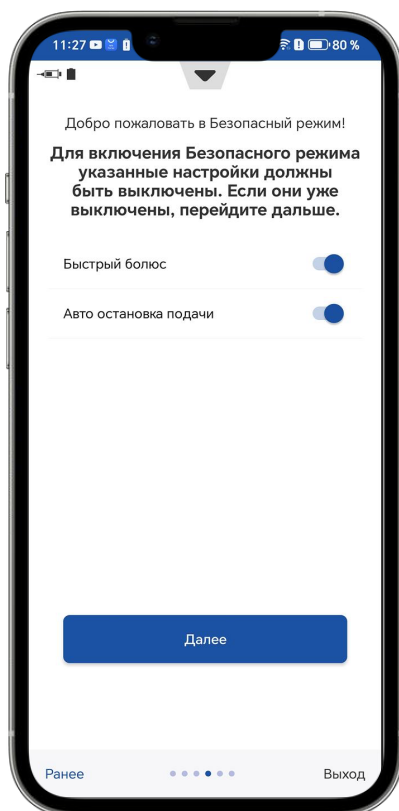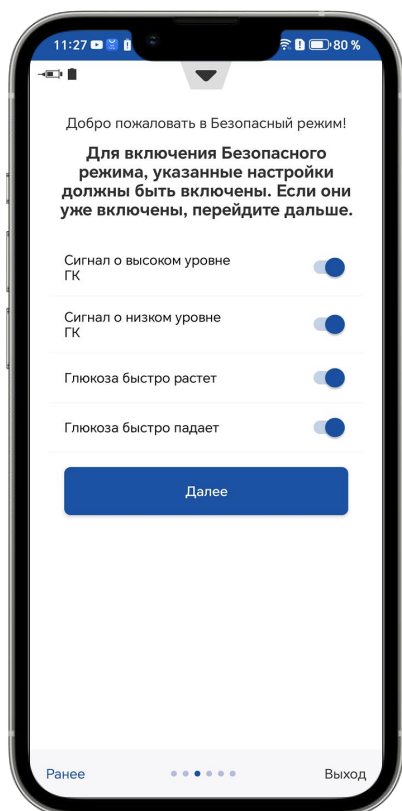


- Включите все уведомления, необходимые для корректной работы безопасного режима. Нажмите **«Далее»** и дождитесь установки соединения.

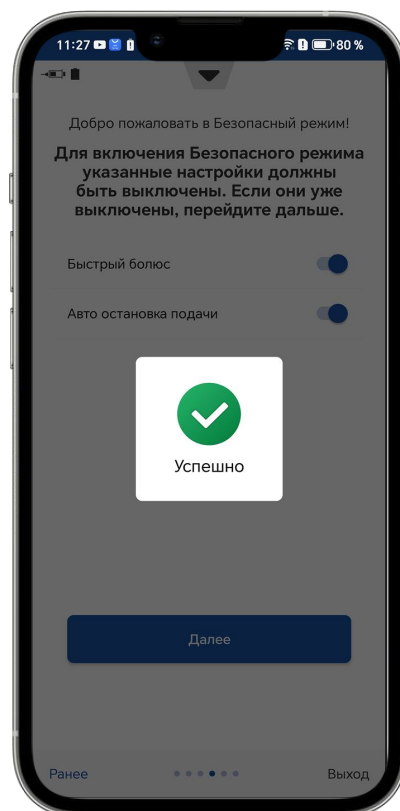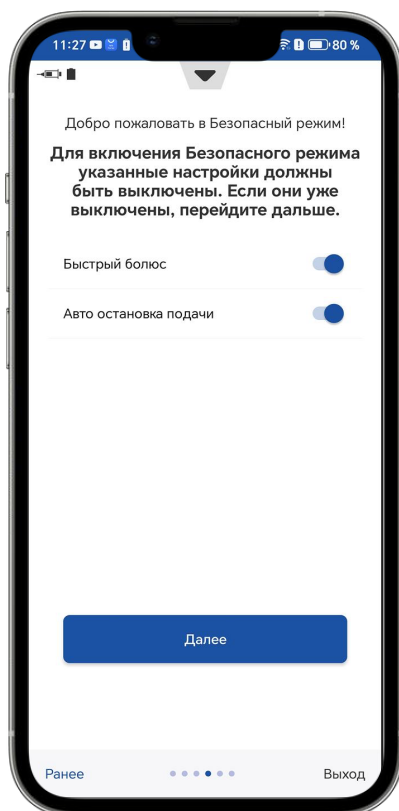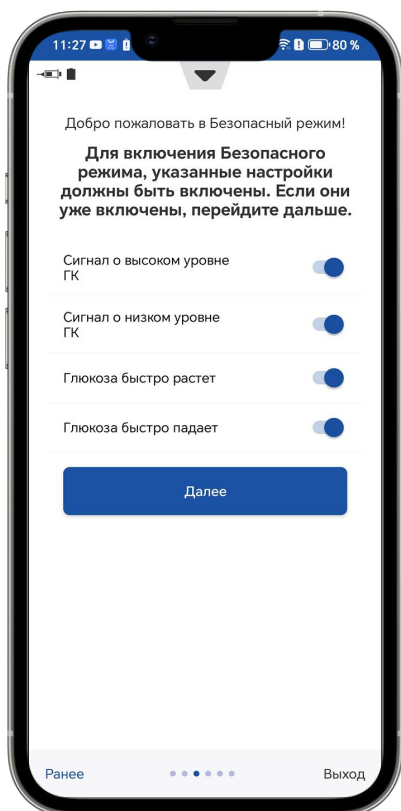


Возможности безопасного режима


Вы можете вручную вводить данные измерений уровня глюкозы на странице «Измерения уровня глюкозы» в главном меню.

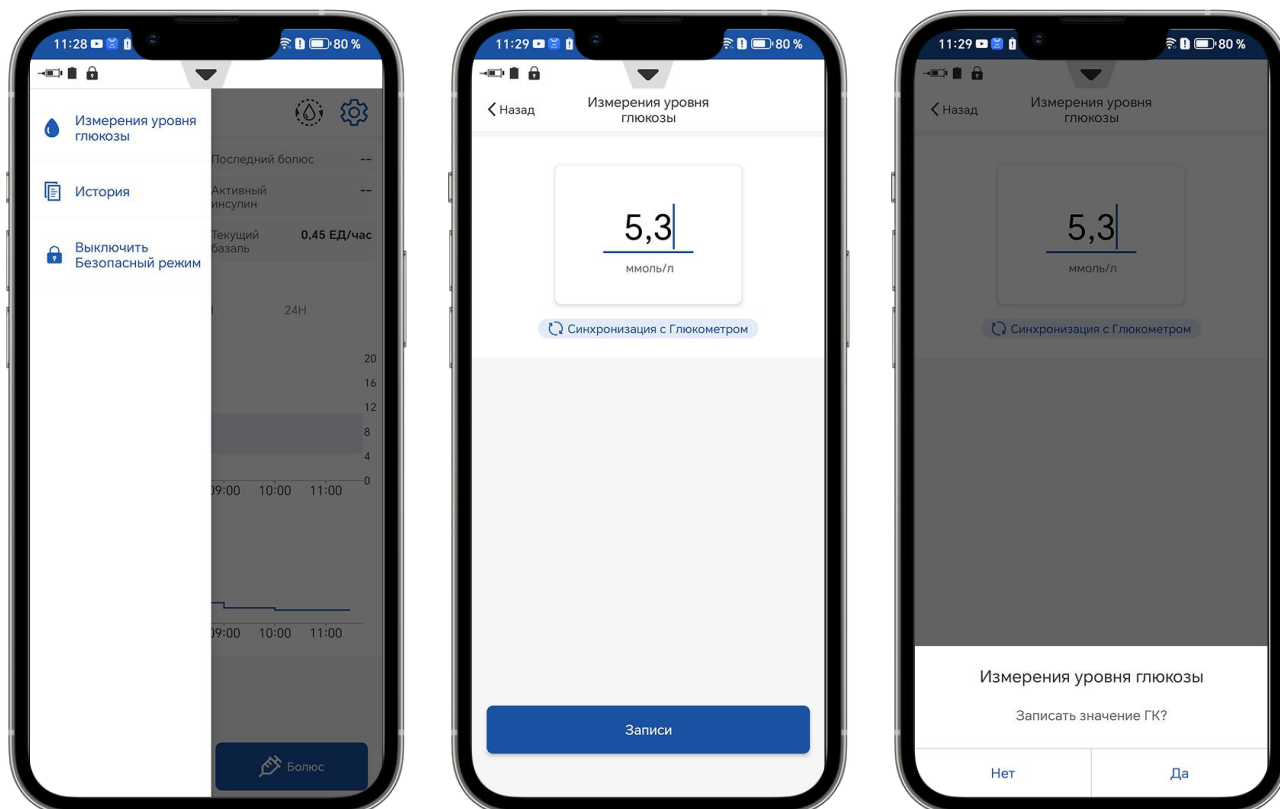


Вы можете вводить болюс через кнопку **«Болюс»** на главной странице приложения.

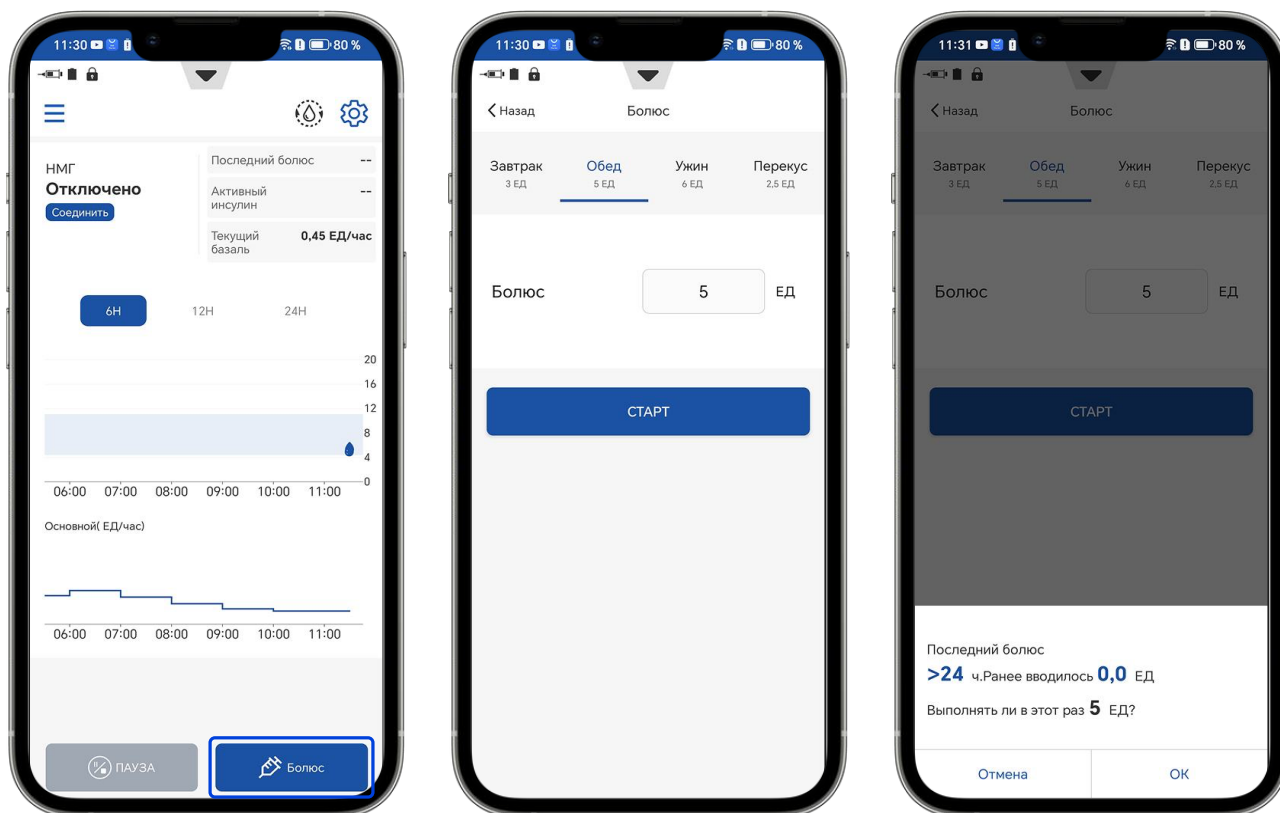

Вы можете просматривать суточные записи, события и графики, связанные с введением инсулина, на странице **«История»** в главном меню.

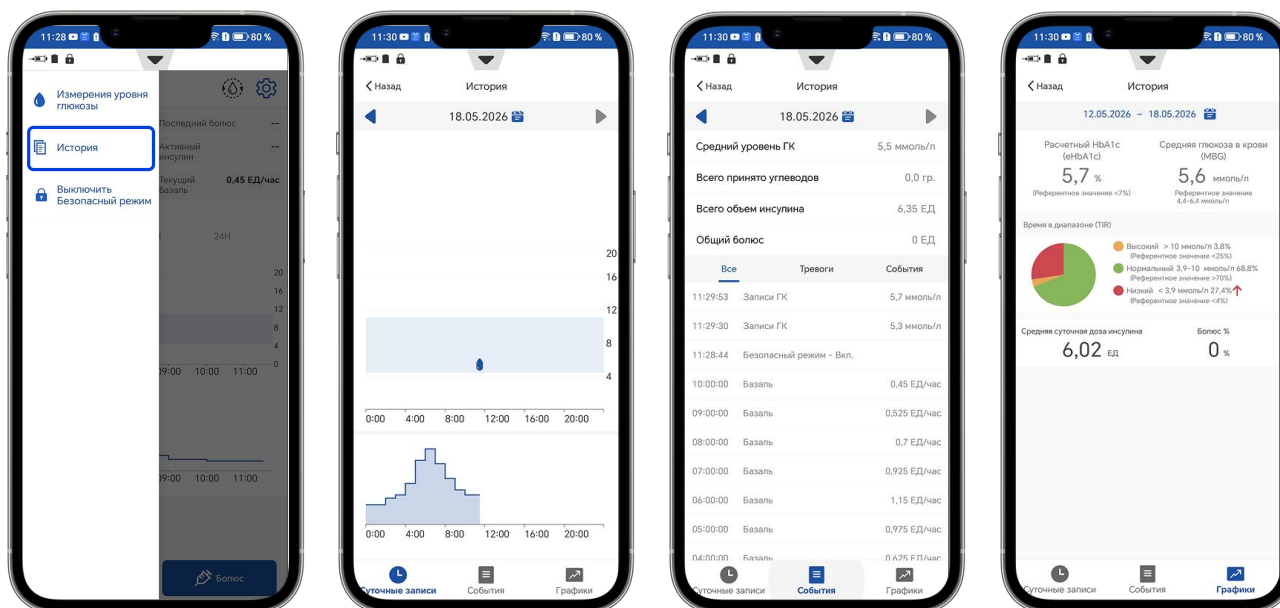


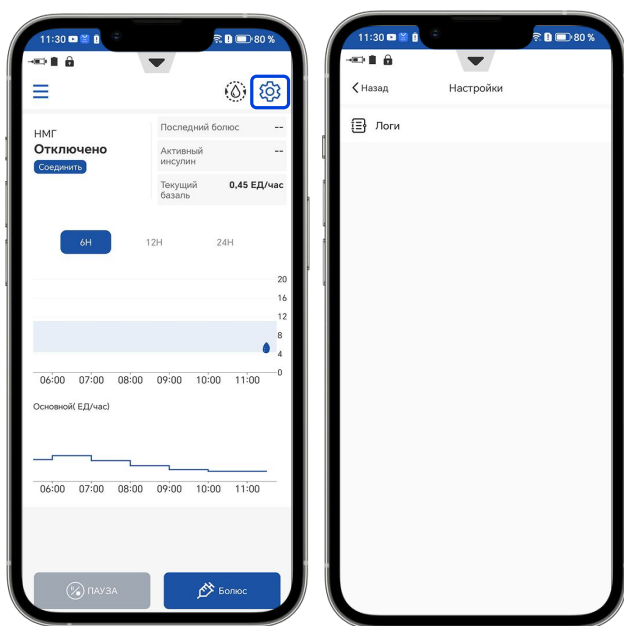


Вы можете просматривать логи в меню «Настройки».

Отключение безопасного режима

Для отключения безопасного режима в **главном меню** нажмите «**Выключить Безопасный режим**». Введите пароль и подтвердите действие.

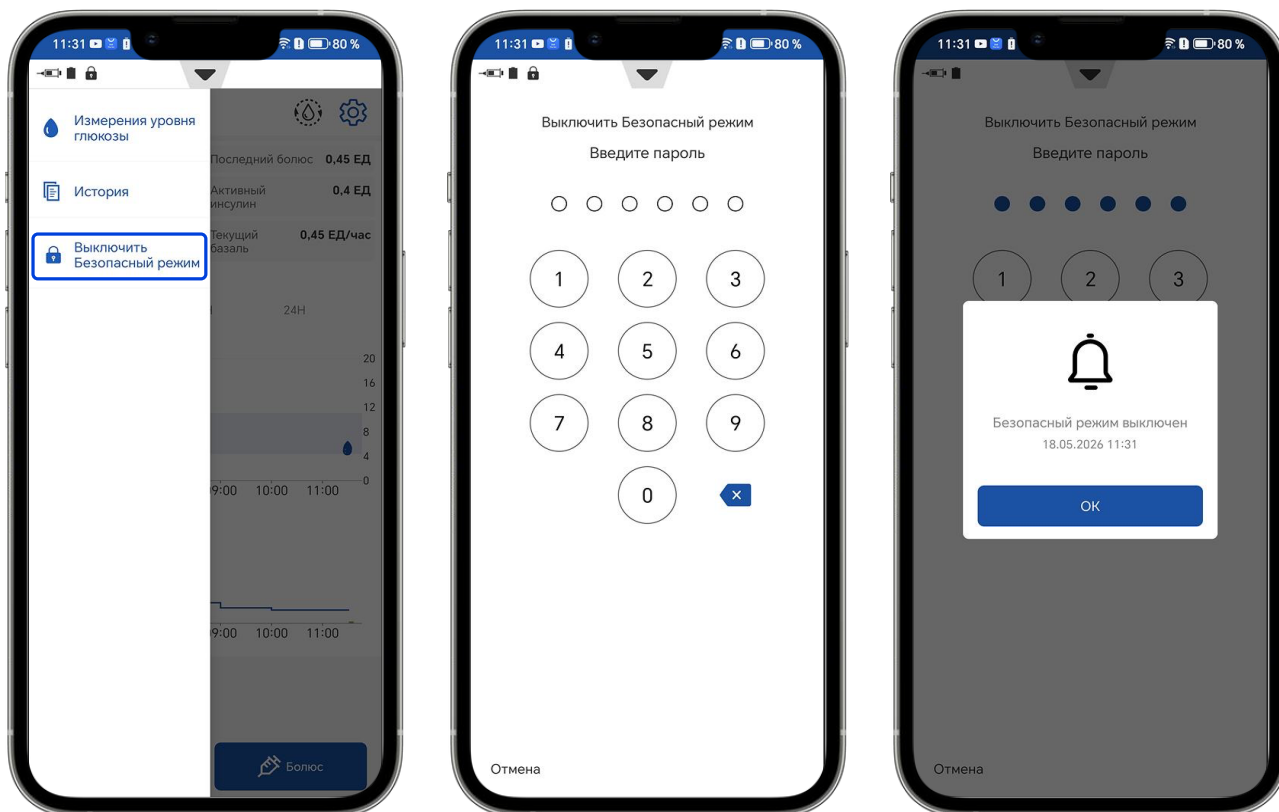

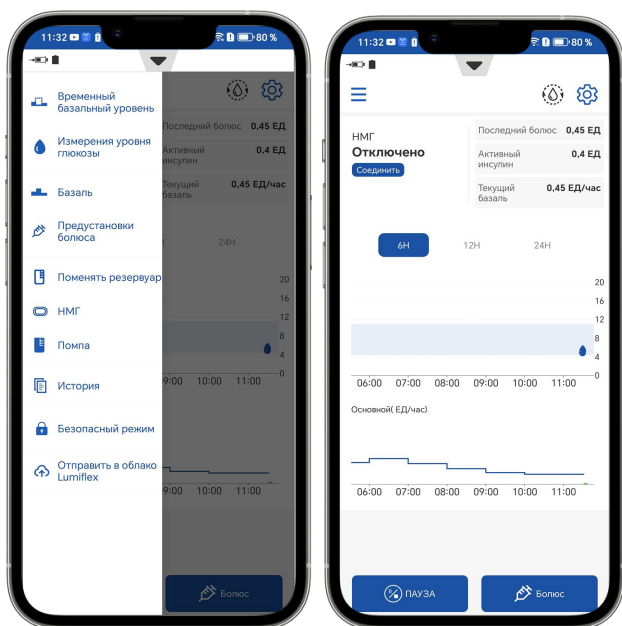

После отключения безопасного режима вам вновь станет доступен весь функционал приложения Lumiflex Lumipod.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



lumipod@lumiflex.ru