


# Замена расходных материалов

Пошаговая инструкция

# Замена расходных материалов

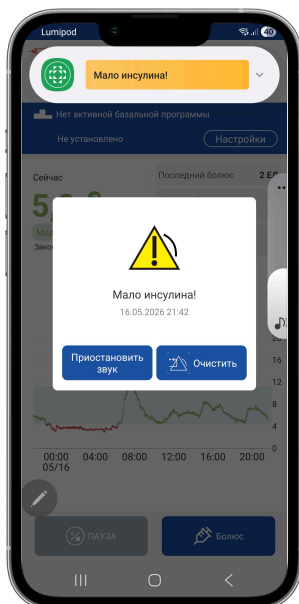

Стандартный срок эксплуатации Lumiflex Lumipod до смены инфузионного набора и резервуара – 3 дня. По истечении этого срока требуется замена инфузионного набора и резервуара

## Запустите приложение

### Шаг 01


Запустите приложение Lumipod на вашем телефоне

### Шаг 02

Нажмите на значок «Меню» в верхнем углу приложения

### Шаг 03


Выберите «Поменять резервуар»

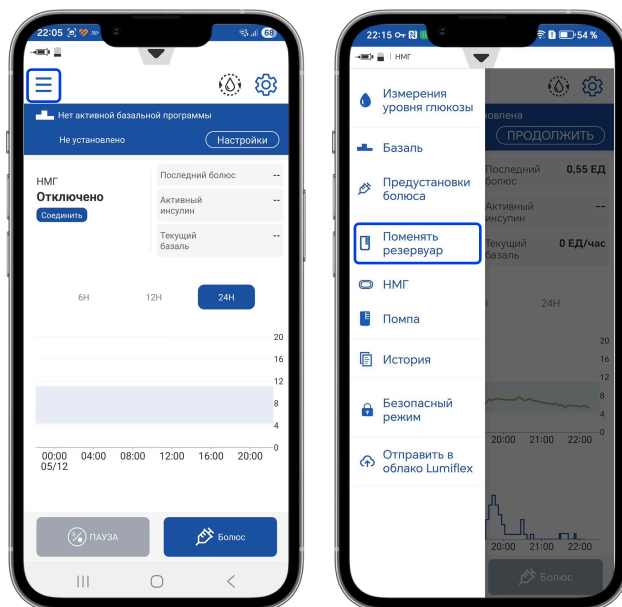

# Снимите помпу

## Шаг 01

Снимите помпу с фиксатора, следуя инструкции в приложении: сдвиньте ползунок в верхней части помпы, чтобы извлечь ее, и нажмите «Далее»


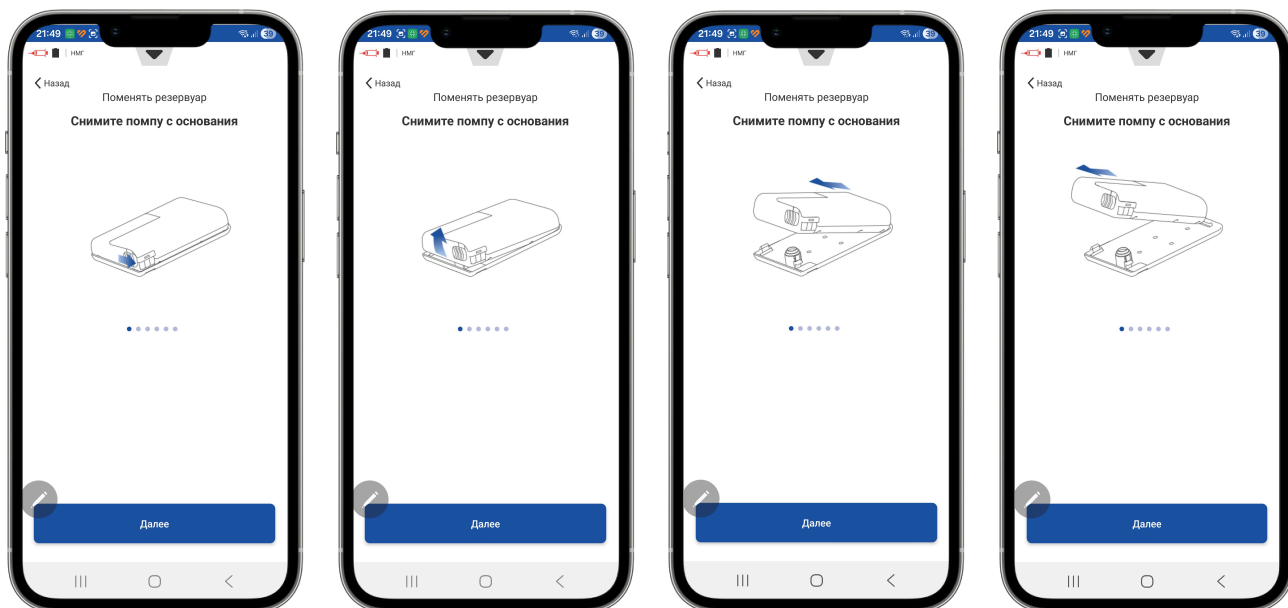


## Шаг 02

Отсоедините один край пластыря инфузионного набора, который установлен на тело. Продолжайте отделять пластырь от кожи, пока не будет удален инфузионный набор

# Перезапустите помпу

В приложении подтвердите обратный ход поршня, нажав «Перезапустить»

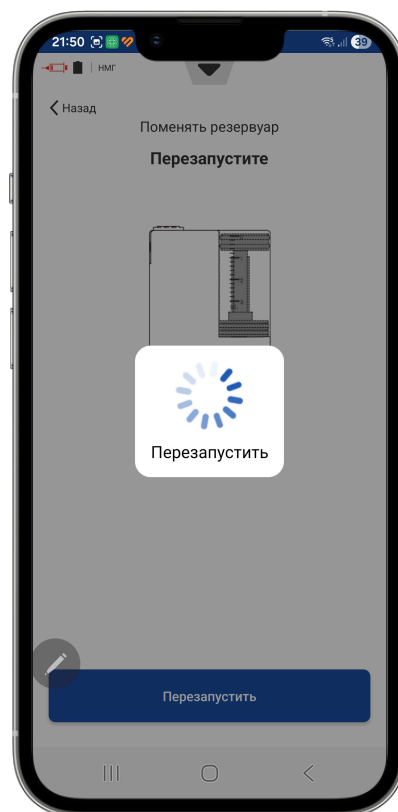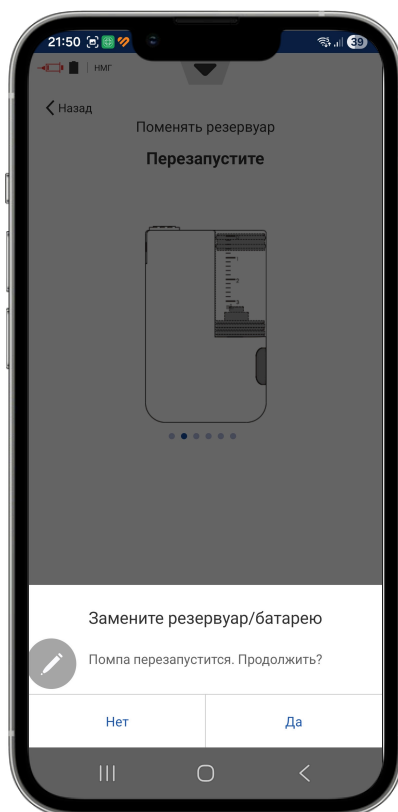

# Зарядите помпу и заполните новый резервуар

## Обратите внимание:

- До установки инсулиновая помпа должна быть полностью заряжена, а инсулин должен быть комнатной температуры
- Помпу необходимо заряжать с вставленным в нее использованным резервуаром
- Не заряжайте помпу до полного использования инсулина, чтобы инсулин не потерял свою эффективность
- Перезаряжайте помпу при каждой замене резервуара
- Перед применением полностью заряженной помпы резервуар необходимо заменить на новый

# Установите новый инфузионный набор


При выборе места установки следуйте рекомендациям:

- Предпочтительные места установки помпы в порядке убывания приоритета: Живот → Задняя поверхность плеча → Внешняя часть бедра → Поясница → Ягодицы
- Важно избегать установки инфузионного набора на участки с уплотнениями и рубцами, а также на места, которые могут подвергаться механическому трению о другие предметы, такие как ремни, пояс или тесная одежда

## Важно:





- При наличии волос на выбранном месте установки – их необходимо удалить
- При установке инфузионного набора важно отступить не менее 7,5 см от сенсора системы непрерывного мониторинга глюкозы
- Не устанавливайте новый инфузионный набор в то же место, где был установлен предыдущий — чередуйте места установки!

# Установите заполненный резервуар

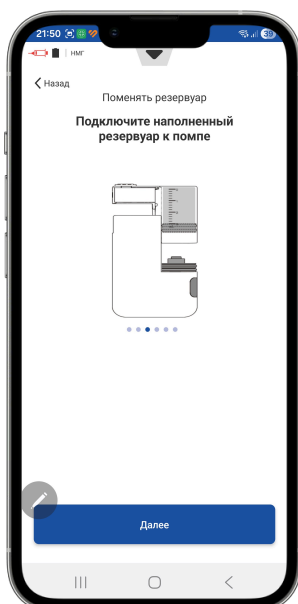


Перейдите в приложение и следуйте инструкциям на экране по установке заполненного резервуара. Затем нажмите «Далее»

# Заполните резервуар

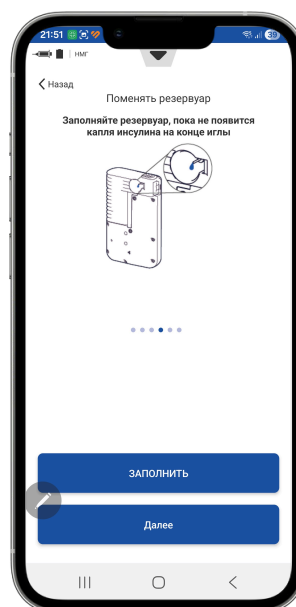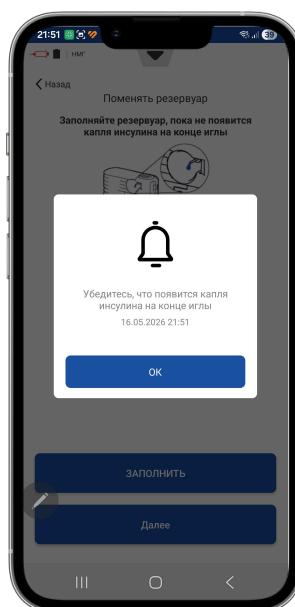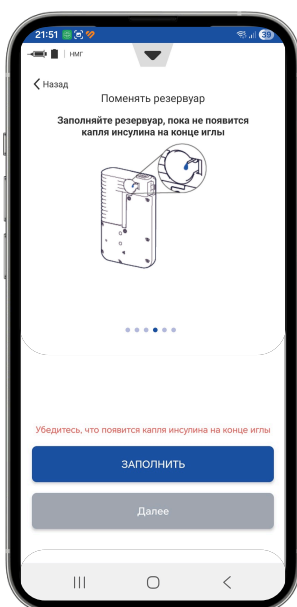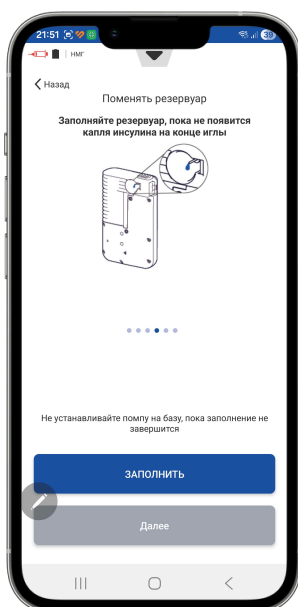

Нажмите и удерживайте кнопку «Заполнить», пока из кончика иглы резервуара не появится капля инсулина

# Установите помпу

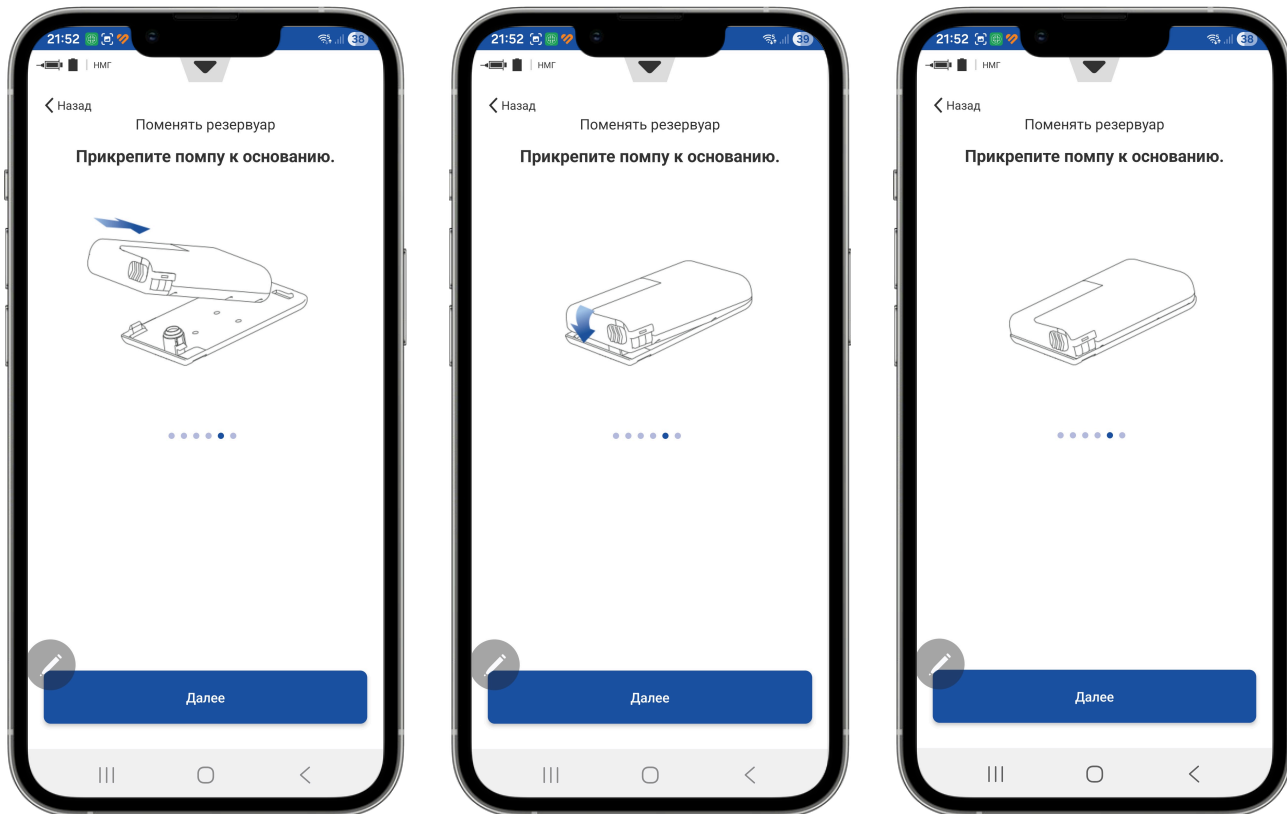


Установите помпу на фиксатор помпы, следуя инструкции в приложении



Вернитесь к приложению, нажмите «Далее» и выберите «Удалить воздух из канюли»

# Расходные материалы успешно заменены!

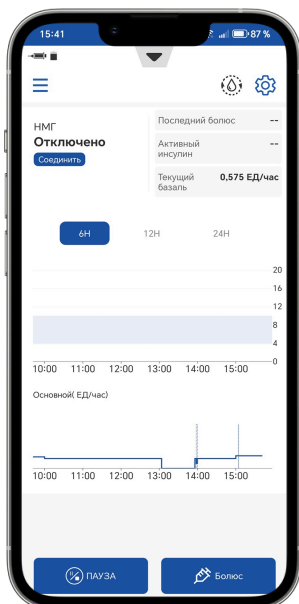

Теперь вы можете продолжить использование и перейти к настройкам работы помпы Lumiflex Lumipod



Для оперативной  
поддержки свяжитесь  
с нами

 [Поддержка в Telegram](#)

 [Поддержка в MAX](#)

 [lumipod@lumiflex.ru](mailto:lumipod@lumiflex.ru)