





Установка приложения Lumiflex LinX на Apple Watch

Пошаговая инструкция

Установка приложения Lumiflex LinX на Apple Watch

Для установки приложения Lumiflex LinX на Apple Watch следуйте инструкции ниже.

1. Убедитесь, что ваши Apple Watch подключены к iPhone, на котором установлено приложение Lumiflex LinX для мониторинга глюкозы.
2. Проверьте, что приложение Lumiflex LinX отображается в разделе «Мои часы» приложения Watch на iPhone.

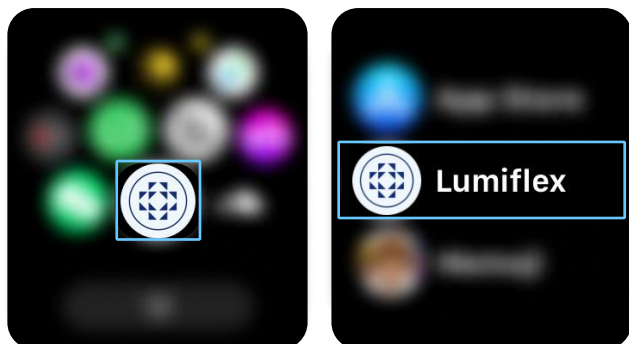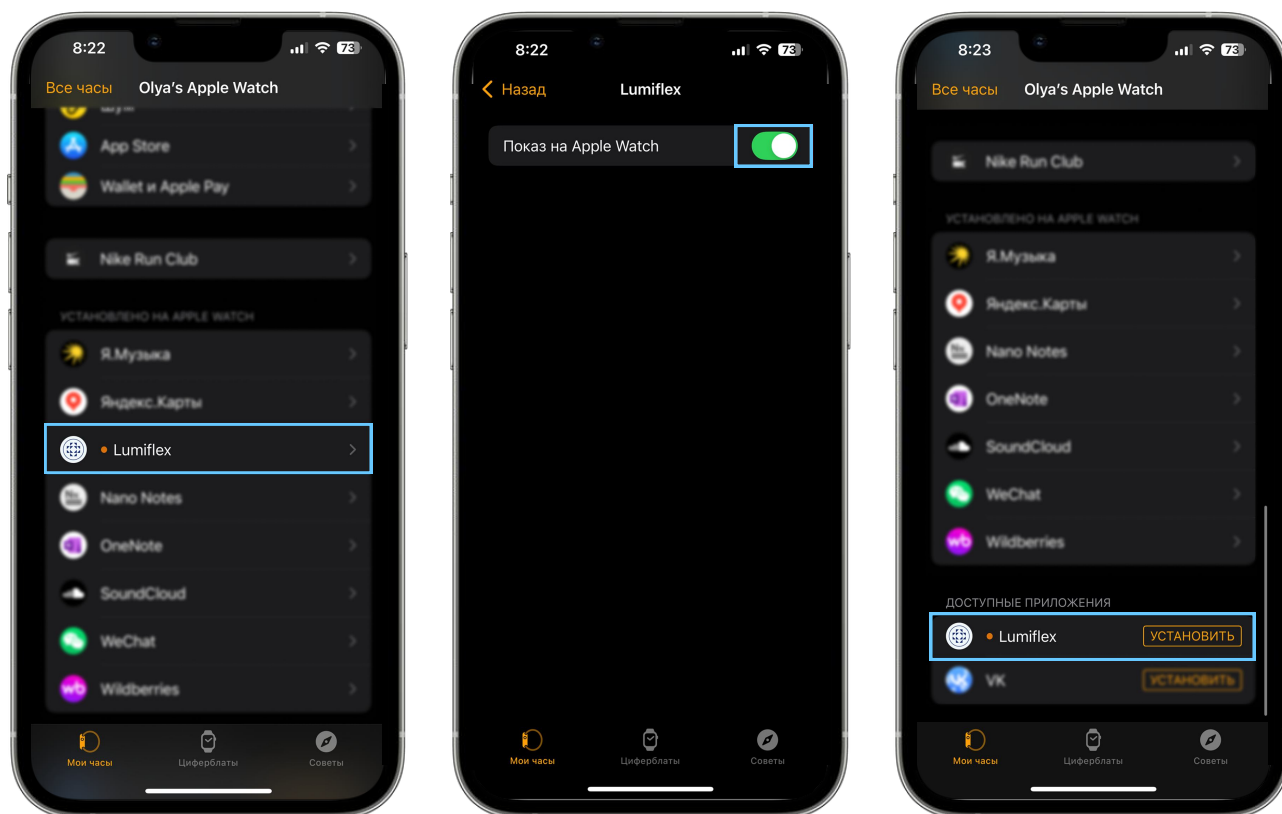

На Apple Watch приложение Lumiflex LinX находится в общем списке установленных приложений.

Настройка приложения Lumiflex LinX на Apple Watch

Удаление приложения

Чтобы удалить приложение, откройте раздел «Мои часы», выберите Lumiflex LinX и перейдите на страницу приложения — там доступна опция удаления.

При необходимости вы всегда можете повторно установить приложение.

Подключение Apple Watch к системе непрерывного мониторинга глюкозы Lumiflex LinX


Если смартфон находится вне зоны действия системы мониторинга Lumiflex LinX, устройство автоматически подключается к Apple Watch с наиболее стабильным сигналом.

В этом случае часы выполняют синхронизацию данных с облачным хранилищем и приложением Lumiflex LinX на вашем смартфоне.

Мониторинг глюкозы

Коснитесь иконки приложения, чтобы открыть его. Если сенсор не подключен, на экране появится изображение, аналогичное рисунку А.

При активном подключении сенсора в приложении отображаются графики уровня глюкозы за последние 1, 3 и 6 часов (см. рисунки В, С и D).

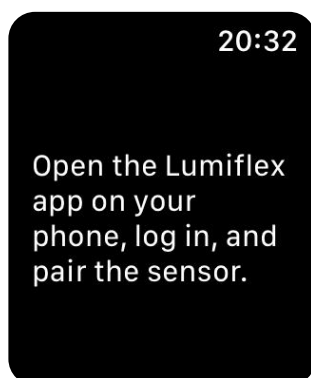


A



B



C

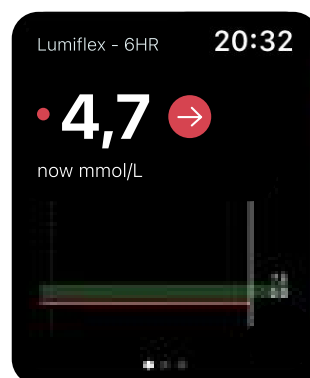


D


Добавление виджета Lumiflex LinX на циферблат

Вы можете разместить виджет Lumiflex LinX на циферблате часов.
В примере используется циферблат «Модульный».


На текущий момент поддерживается только круглый формат виджета.

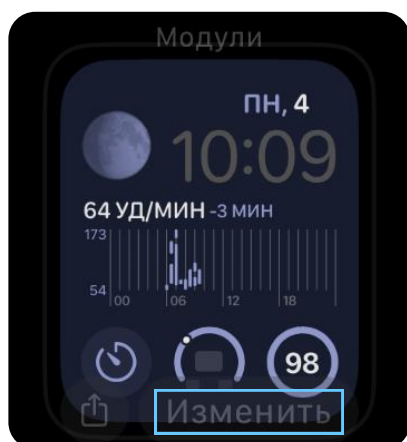


Нажмите «Изменить» для перехода в раздел редактирования виджетов.

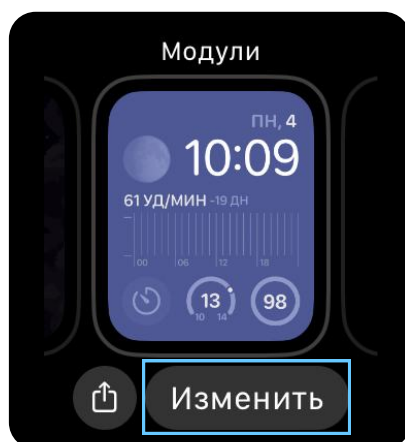


Используйте долгое нажатие для входа в режим редактирования.

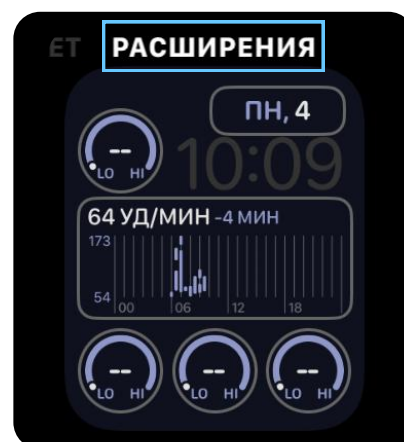


Выберите любой из круглых виджетов и перейдите в список редактирования.

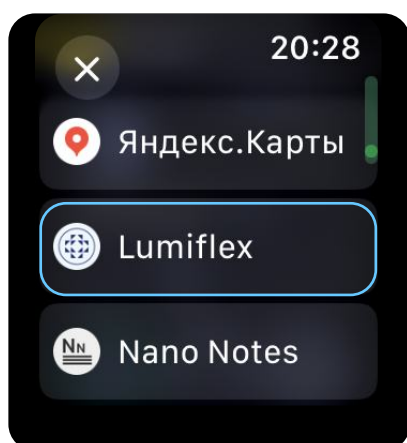

Любой из виджетов можно настроить для Lumiflex LinX.

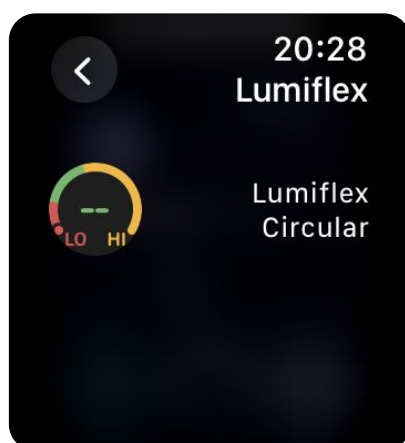

На текущий момент поддерживается только круглый формат виджета.

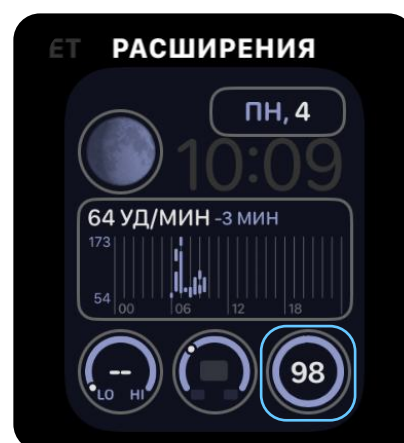

Нажмите на виджет на циферблате, чтобы мгновенно открыть приложение Lumiflex LinX.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



help@lumiflex.ru