

**Руководство пользователя
Lumiflex Cloud
для аккаунта врача**

Содержание

1	Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud	1
2	Системные требования и меры предосторожности	2
3	Как зарегистрироваться в облачном сервисе?	3
4	Как войти в свой аккаунт после регистрации?	5
5	Как добавить нового пациента?	6
6	Как настроить обмен данных об уровне глюкозы с пациентом?	7
7	Авторизация пациента в приложении	9
8	Как сформировать отчет AGP?	10
9	Настройки вашего личного профиля	11
10	Профиль здоровья	12
11	Записка о визите	13
12	Сравнение данных визитов	14

Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud

Lumiflex Cloud предназначен для использования медицинскими работниками с целью помощи людям с диабетом и их лечащим врачам в просмотре, анализе и оценке данных с устройств контроля уровня глюкозы за прошедший период времени для более эффективного управления диабетом.

Дополнительно:



Lumiflex Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации.



Lumiflex Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом.



Медицинские работники должны использовать информацию из облачного сервиса Lumiflex Cloud в сочетании с другой доступной им клинической информацией.

Системные требования и меры предосторожности

Обеспечьте оптимальную производительность и безопасность с помощью правильной настройки

Системные Требования

Поддерживаемые браузеры

Веб-приложение Lumiflex Cloud разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для обеспечения полной функциональности необходимо включить JavaScript и разрешить всплывающие окна.

Поддерживаемые операционные системы

Приложение протестировано для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).

Минимальные аппаратные/программные требования

Для оптимального отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 1920x1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить стабильное интернет-соединение.

Критические Меры Предосторожности


- 1 Подключение:** Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен поддерживать стабильное интернет-соединение;
- 2 Риски передачи данных:** Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью могут привести к **задержке или сбою передачи данных** опекунам;
- 3 Питание:** Обеспечивает стабильное питание во время подключения устройства и обработки данных. Избегать использования платформы при низком уровне заряда батареи;
- 4 Серьезные инциденты:** Немедленно сообщить производителю и соответствующим органам о любых серьезных травмах или смертельных случаях, связанных с устройством.

Как зарегистрироваться в облачном сервисе?

 <https://cloud.lumiflex.ru>

Шаги регистрации:





- 1 Выбрать вкладку «Больница или врач» и ввести личную информацию;
- 2 Установить предпочтительные единицы измерения и пороговые значения BG (глюкозы в крови) для практики;
- 3 Выбрать регистрацию по номеру мобильного телефона или адресу электронной почты;

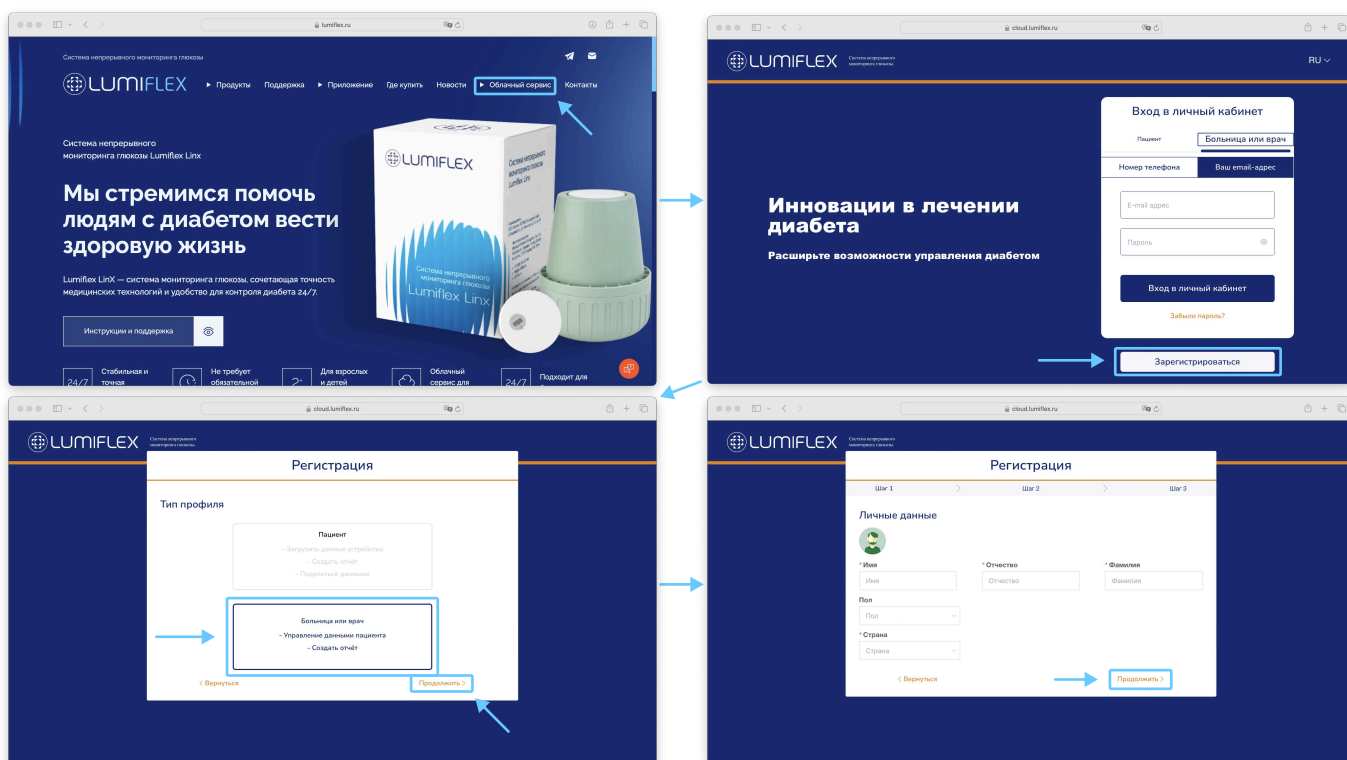

The registration process is shown in four sequential screenshots:

- Home Page:** The 'Облачный сервис' (Cloud Service) menu item is highlighted in the top navigation bar.
- Login Page:** The 'Больница или врач' (Hospital or Doctor) option is selected under the 'Пациент' (Patient) section. The 'Зарегистрироваться' (Register) button is highlighted at the bottom.
- Registration Step 1:** The 'Тип профиля' (Profile Type) section is shown. The 'Больница или врач' option is selected and highlighted with a blue box.
- Registration Step 2:** The 'Личные данные' (Personal Data) form is shown. The 'Продолжить' (Continue) button is highlighted.

- 4 Завершить регистрацию путем ввода кода верификации и установки пароля;
- 5 На данной странице выберите один из двух вариантов регистрации: по номеру телефона или email-адресу — тот, который вам наиболее удобен.

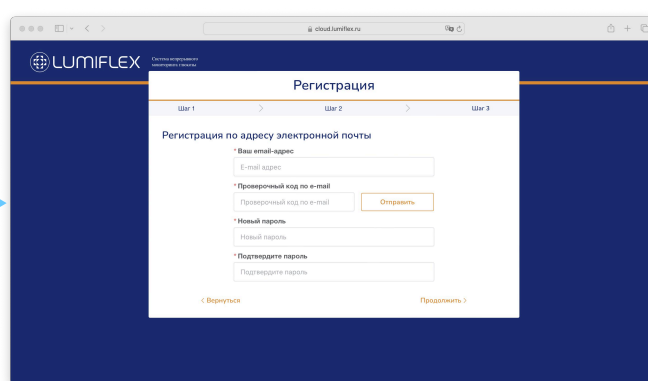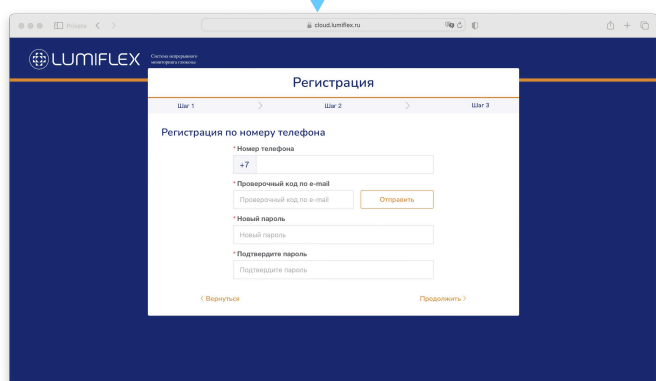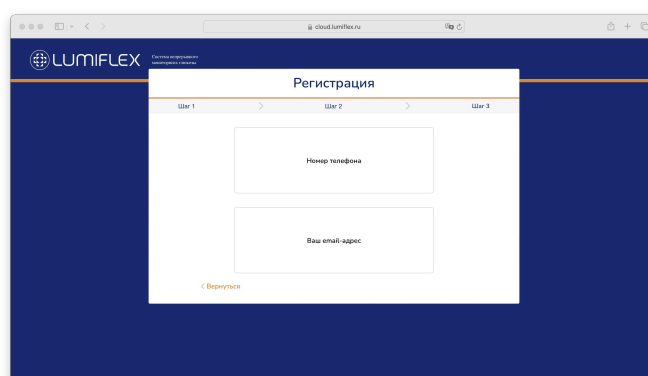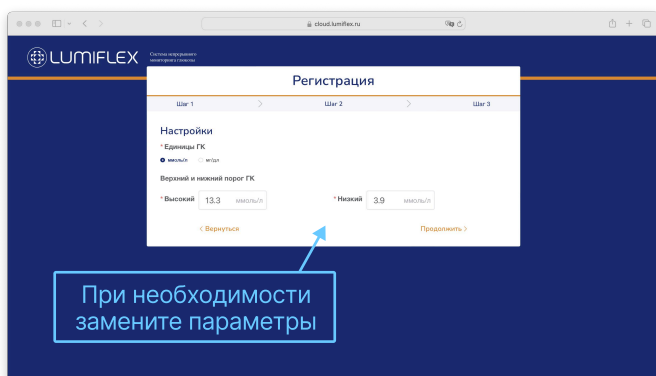

1. Регистрация по номеру телефона:


Введите номер телефона;
 Нажмите кнопку **«Отправить»**.
 Вам поступит СМС с кодом.
 Введите его в поле **«Проверочный код»**;
 Придумайте пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтверждение пароля»**.

2. Регистрация по Email-адресу:

Введите ваш Email;
 Нажмите на кнопку **«Отправить»**.
 Вам поступит письмо с кодом.
 Введите его в поле **«Проверочный код»**;
 Придумайте пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтверждение пароля»**.

Как войти в свой аккаунт после регистрации?

- 1 Выбрать вкладку «Больница или врач»;
- 2 Выбрать «Номер телефона» или «Адрес электронной почты»;
- 3 Безопасно ввести имя пользователя и пароль;
- 4 Нажать «Вход в личный кабинет» для доступа к панели управления.

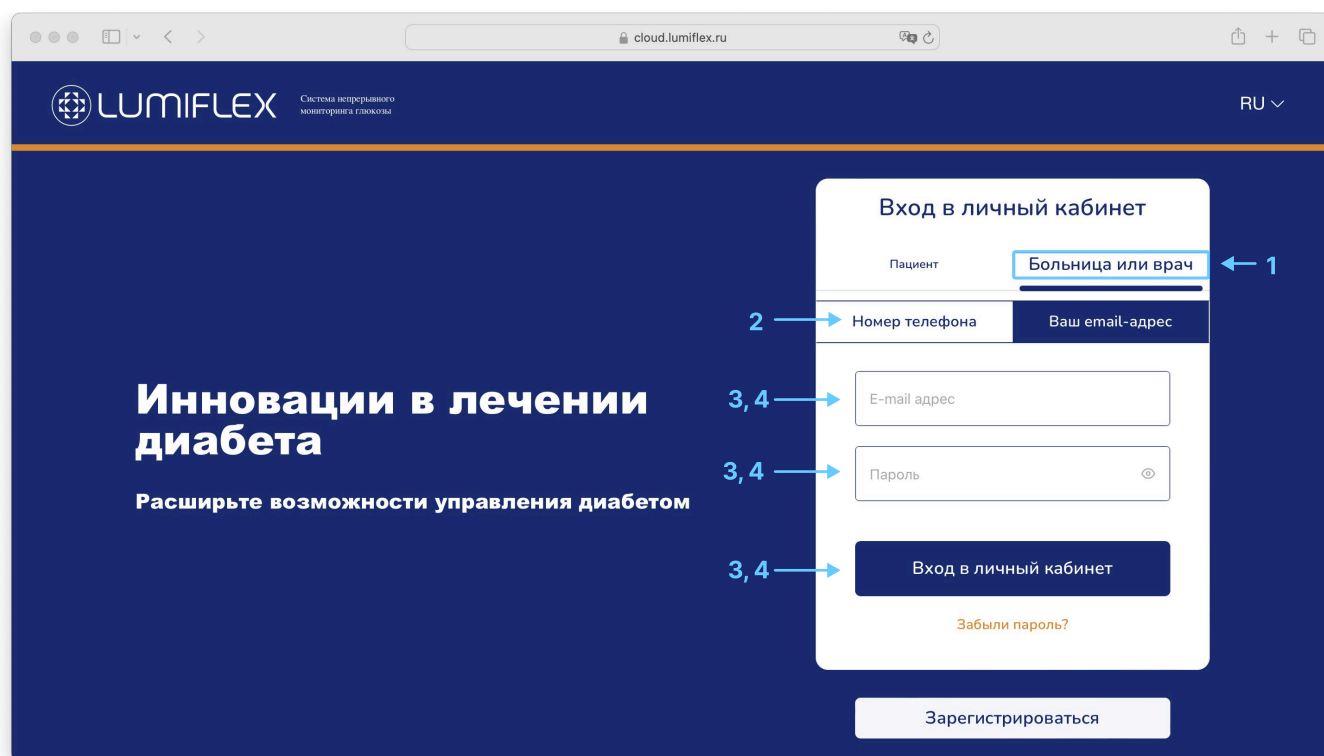

[Забыли пароль?](#)

Забыли пароль

Нажмите кнопку «Забыли пароль» и следуйте инструкциям для его сброса;

Выберите «Номер телефона» или «Адрес электронной почты».


RU ▾

Сменить язык

Выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов.

Как добавить нового пациента?

- 1 Нажать «Добавить пациента»;
- 2 Заполнить необходимую информацию;
- 3 Нажать «Добавить».

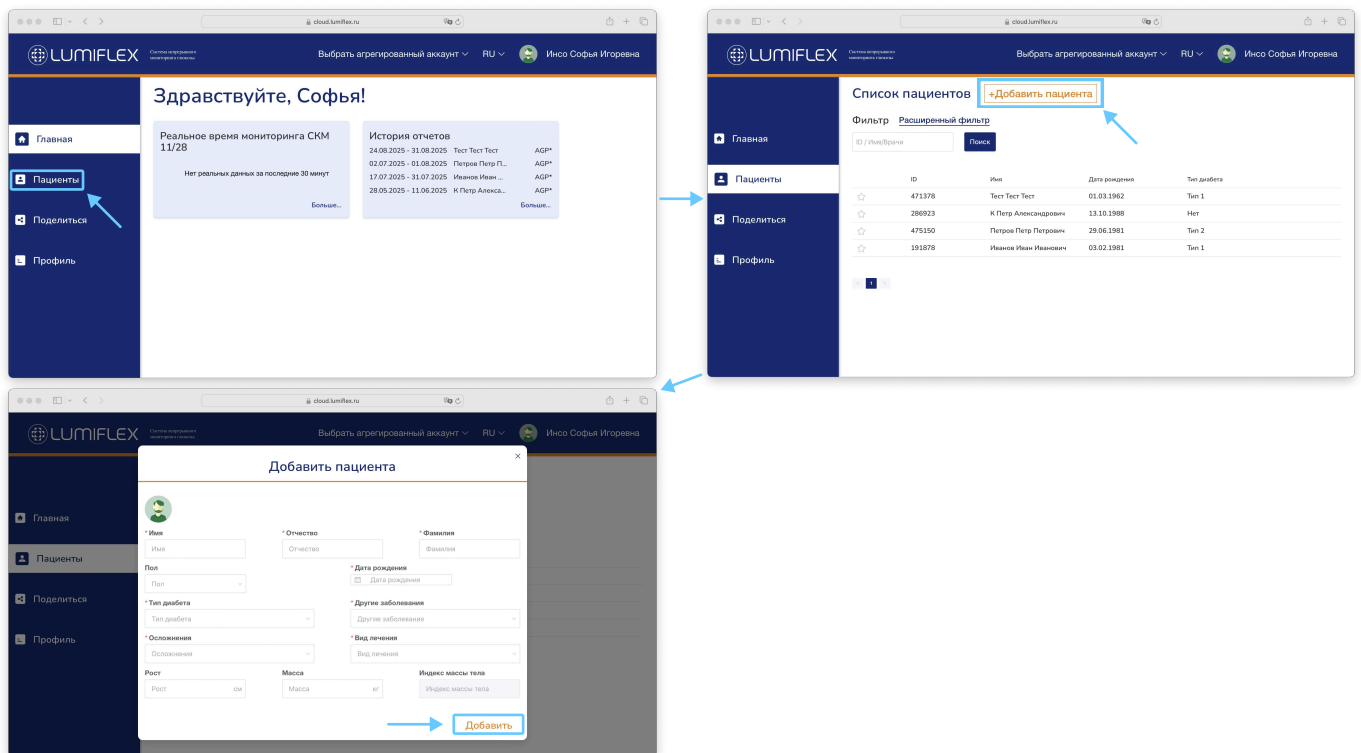

После нажатия кнопки «Добавить» и обновления страницы, появится новая строчка с ФИО пациента. Теперь нужно настроить обмен данными с пациентом.


Как удалить пациента:

Главная - Поделиться - Удалить

Как настроить обмен данными об уровне глюкозы с пациентом?


1

Выберите нужного пациента из вашего списка – нажмите на строку с ФИО;

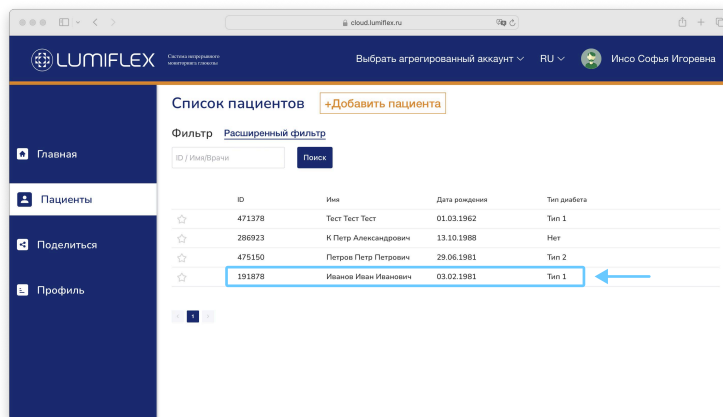


2

В окне профиля пациента нажмите на кнопку «Получить разрешение пользователя»;


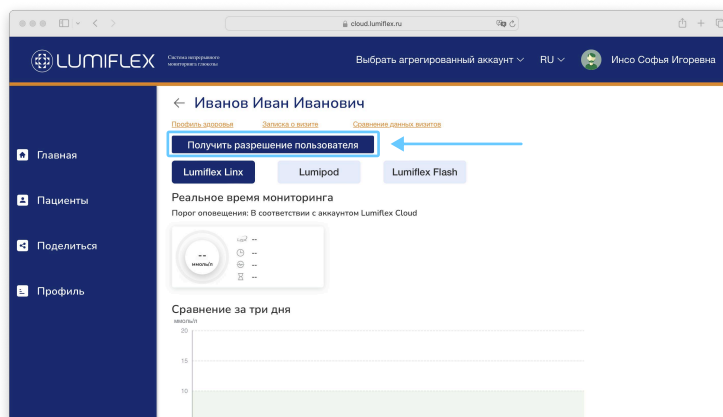


3

Нажмите на кнопку «Обмен приложениями по номеру телефона»;

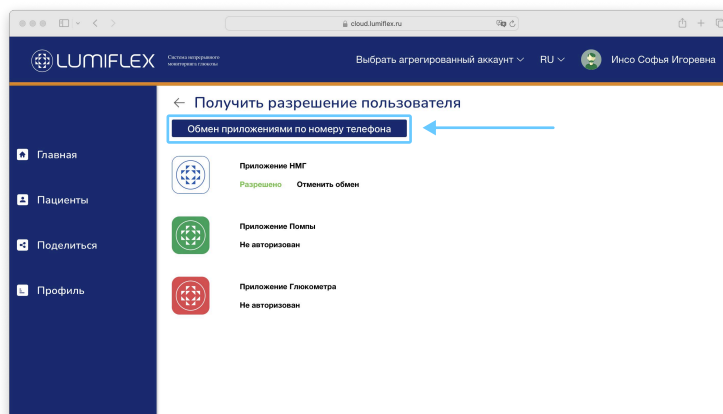


- 4 Введите номер телефона пациента, на который пациент зарегистрировал приложение в своем телефоне, и нажмите на кнопку «Поиск»;
- 5 Нажмите для синхронизации на нужное приложение и далее на кнопку «Поделиться»;

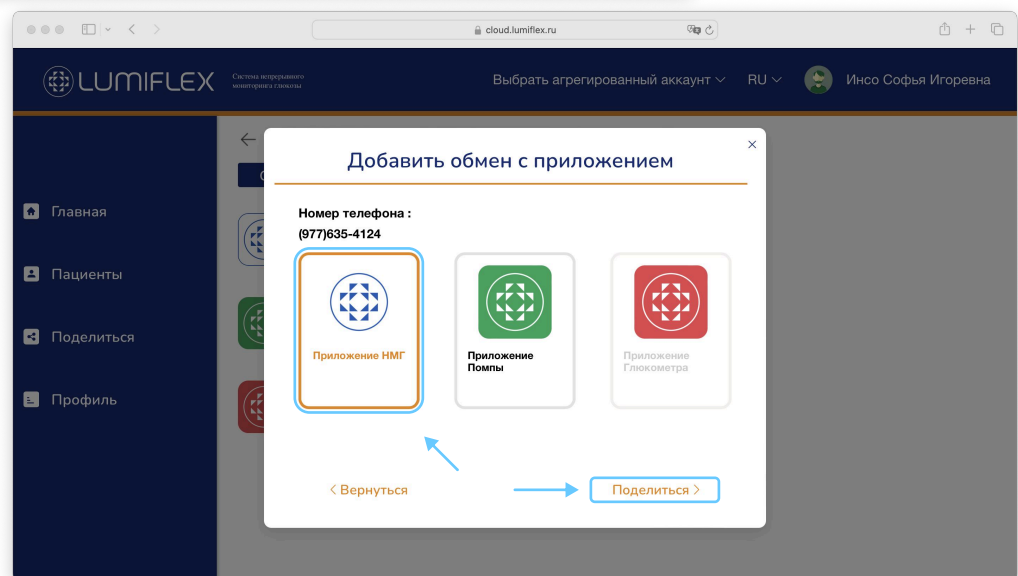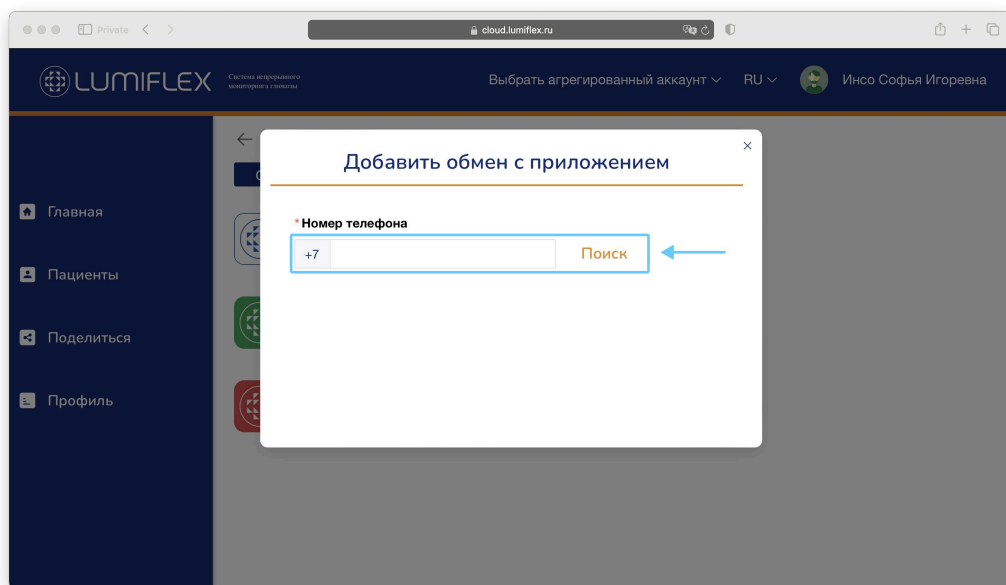

- 6 Пациенту на телефон поступит СМС где он подтверждает свое согласие на обмен данными.

Авторизация пациента в приложении


- 1 Нажать на «Личный центр»;
- 2 Выбрать «Разрешить доступ врачу»;
- 3 Нажать «Согласиться».

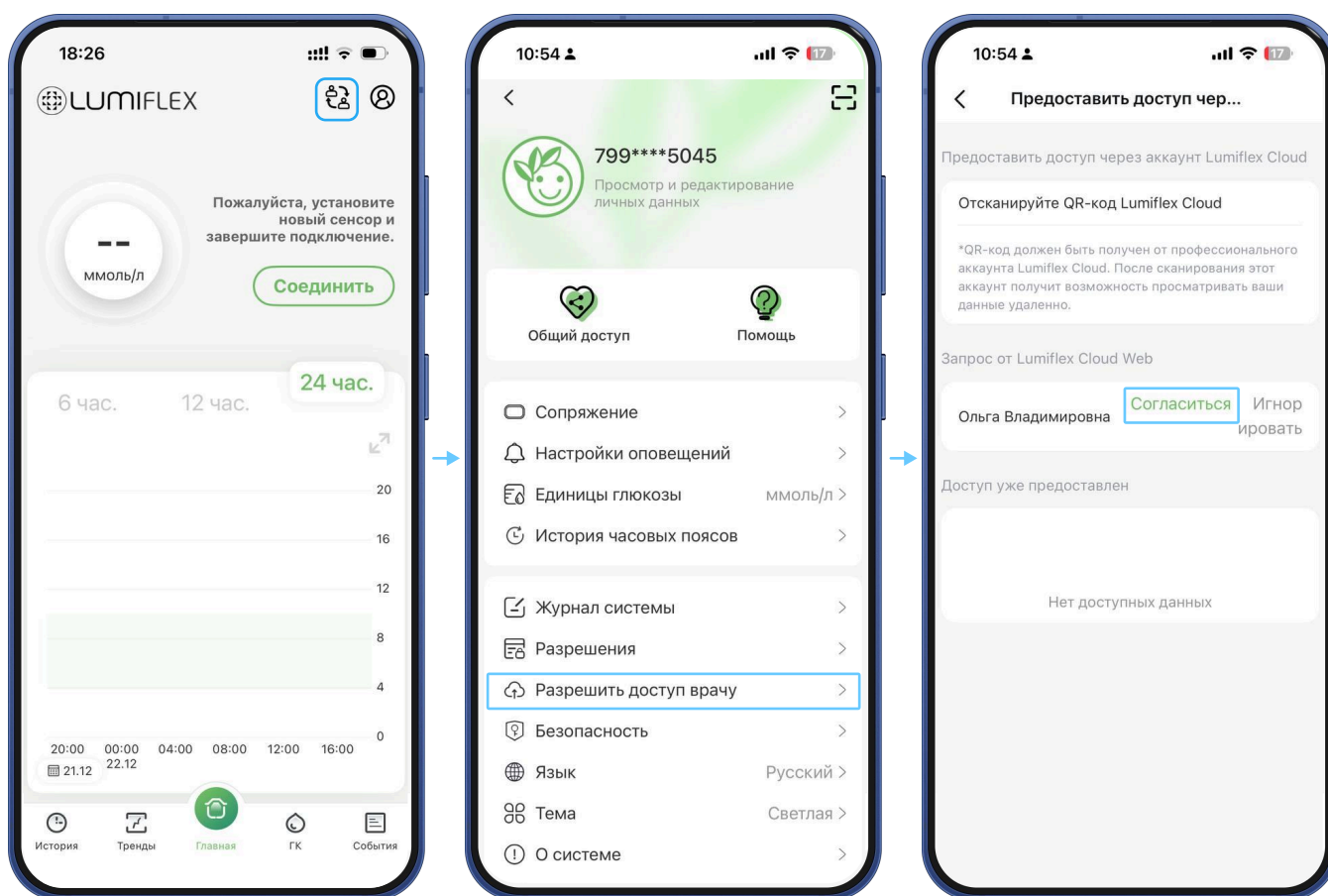

После того как пациент нажмет «Согласиться» в приложении, Врач сможет просматривать данные пациента на платформе Lumiflex Cloud.

Как сформировать отчет AGP?

- 1 Выбрать пациента и нажать на строчку с его ФИО;
- 2 Меню отчетов находится внизу главной страницы пациента;
- 3 Выбрать предустановленные диапазоны (7, 14, 30, 90 дней) или настраиваемый период времени;
- 4 Нажать «Создать отчет» для комплексного анализа данных.

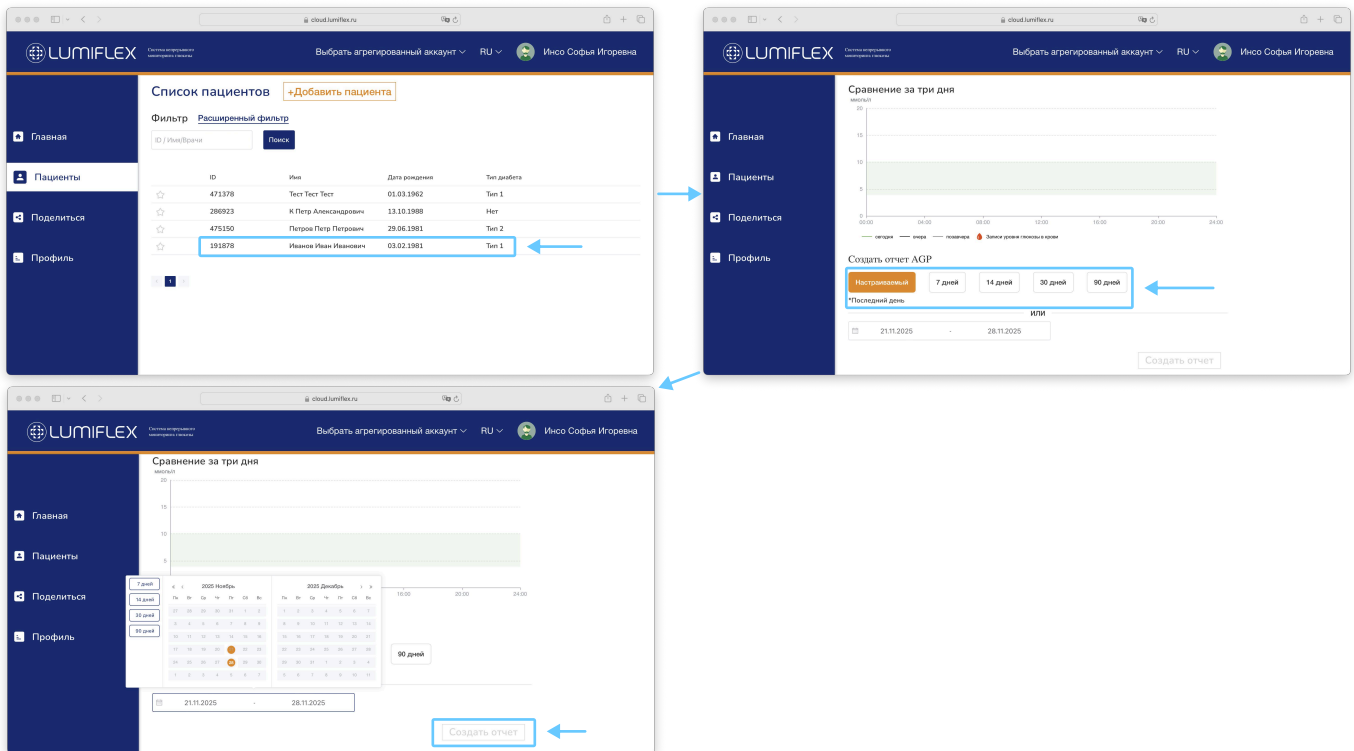

The screenshots illustrate the process of generating an AGP report in the LUMIFLEX system:


- Step 1:** The 'Список пациентов' (Patient List) page shows a table of patients. The patient 'Иванов Иван Иванович' (ID: 191878) is selected.
- Step 2:** The patient's profile page is shown, with the 'Сравнение за три дня' (Compare for three days) menu item highlighted.
- Step 3:** The 'Создать отчет AGP' (Create AGP Report) configuration screen is shown. The '7 дней' (7 days) option is selected, and the 'Создать отчет' (Create Report) button is highlighted.

Важно:

Отчет не открывается из иконки «загрузки отчета» в правом верхнем углу экрана. Она является информационной и показывает только время формирования отчета! Сам отчет вы сможете найти на «Главной» странице в разделе «Запись отчета».

Настройки вашего личного профиля

- 1 Нажмите на значок **«Профиль»** в левой колонке главной страницы, чтобы перейти в меню управления профилем;
- 2 Добавьте дополнительный вариант входа отличный от того, по которому вы регистрировались. Если при регистрации вы использовали Email, то добавьте так же вход по телефону. И наоборот. После этого вы сможете входить в свой аккаунт используя или Email или Телефон;

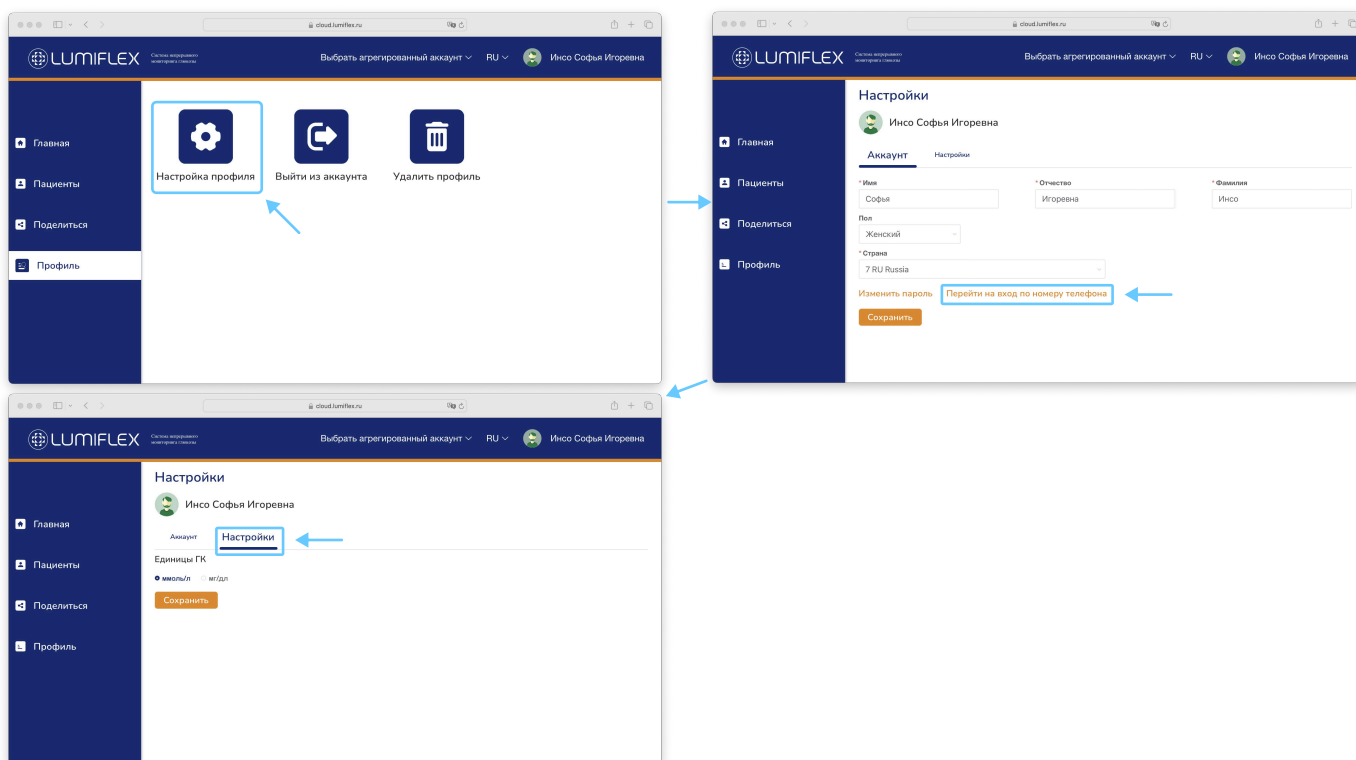

- 3 Вкладка **«Настройки»** позволяет изменять параметры, связанные с отображением Единиц ГК.



Профиль здоровья

Комплексное отслеживание здоровья пациента и ведение документации о визитах

Просмотр комплексной информации о здоровье пациента, введенной при создании аккаунта.

Доступная информация:

- ✓ Пол и дата рождения;
- ✓ Тип лечения;
- ✓ ИМТ (Индекс массы тела);
- ✓ Осложнения;
- ✓ Тип диабета;
- ✓ Другие заболевания.

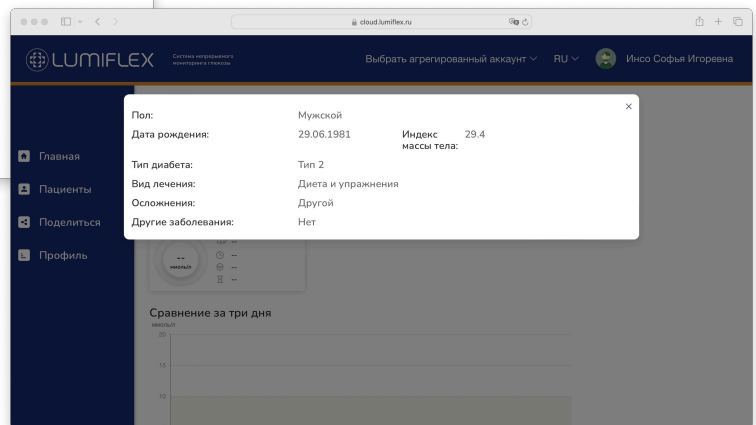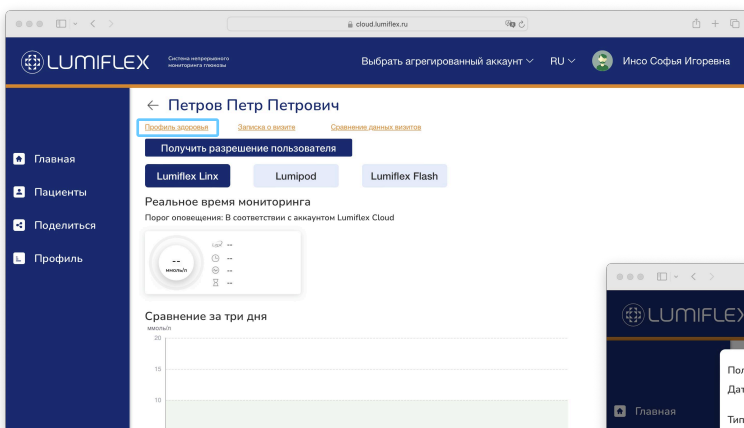


Вся информация о здоровье отображается так, как она была введена при создании аккаунта.

Записка о визите

Запись заметок о визитах и медицинских наблюдений для справки пациента

Ключевые особенности:

- ✓ Нажать «Записка о визите», чтобы добавить заметки;
- ✓ Запись медицинских состояний и распоряжений врача;
- ✓ «Заметки врача» отображаются на главной странице пациента.

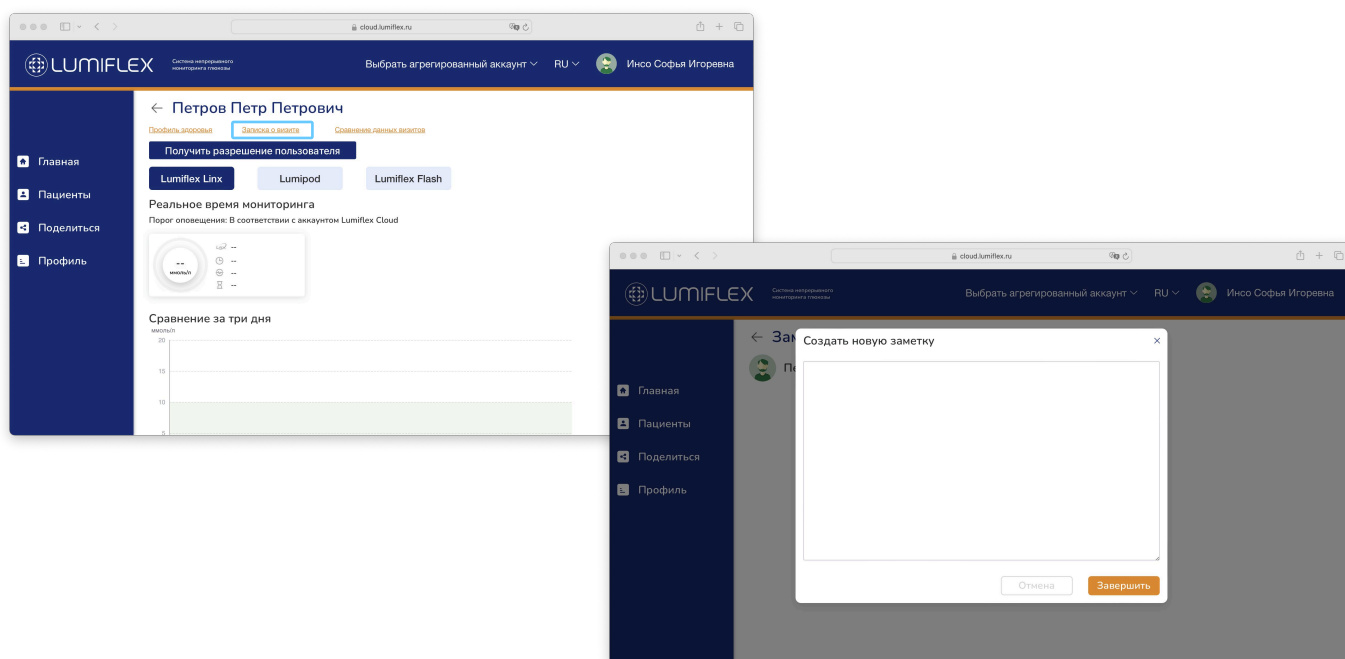

Преимущество: Улучшает общение между врачами и пациентами.

Сравнение данных визитов

Проведение комплексного сравнения и анализа данных пациента за время визитов

Процесс:

- 1 Нажать «Добавить новый визит»;
- 2 Ввести информацию о визите;
- 3 Выбрать дату начала и окончания;
- 4 Установить TIR (Время в целевом диапазоне);
- 5 Установить среднее значение глюкозы;
- 6 Установить план лечения;
- 7 Нажать «Сохранить»;
- 8 Ввести значение eHbA1C;
- 9 Записать план терапии.

Настройки TIR:

Трехквартильный диапазон: Высокий, Нормальный, Низкий

Пятиквартильный диапазон: Очень Высокий, Высокий, Нормальный, Низкий, Очень Низкий

