

Как скачать приложение на iPhone без русского аккаунта

Есть два варианта установки приложения:


- Вы можете перейти по **ссылке**:
<https://testflight.apple.com/join/fMSEb7Dq> и продолжить с **Шага 4**.
- Использовать **QR-код**.

Пошаговая инструкция

1. Отсканируйте **QR-код** с помощью камеры.



2. Нажмите на появившуюся **ССЫЛКУ**.

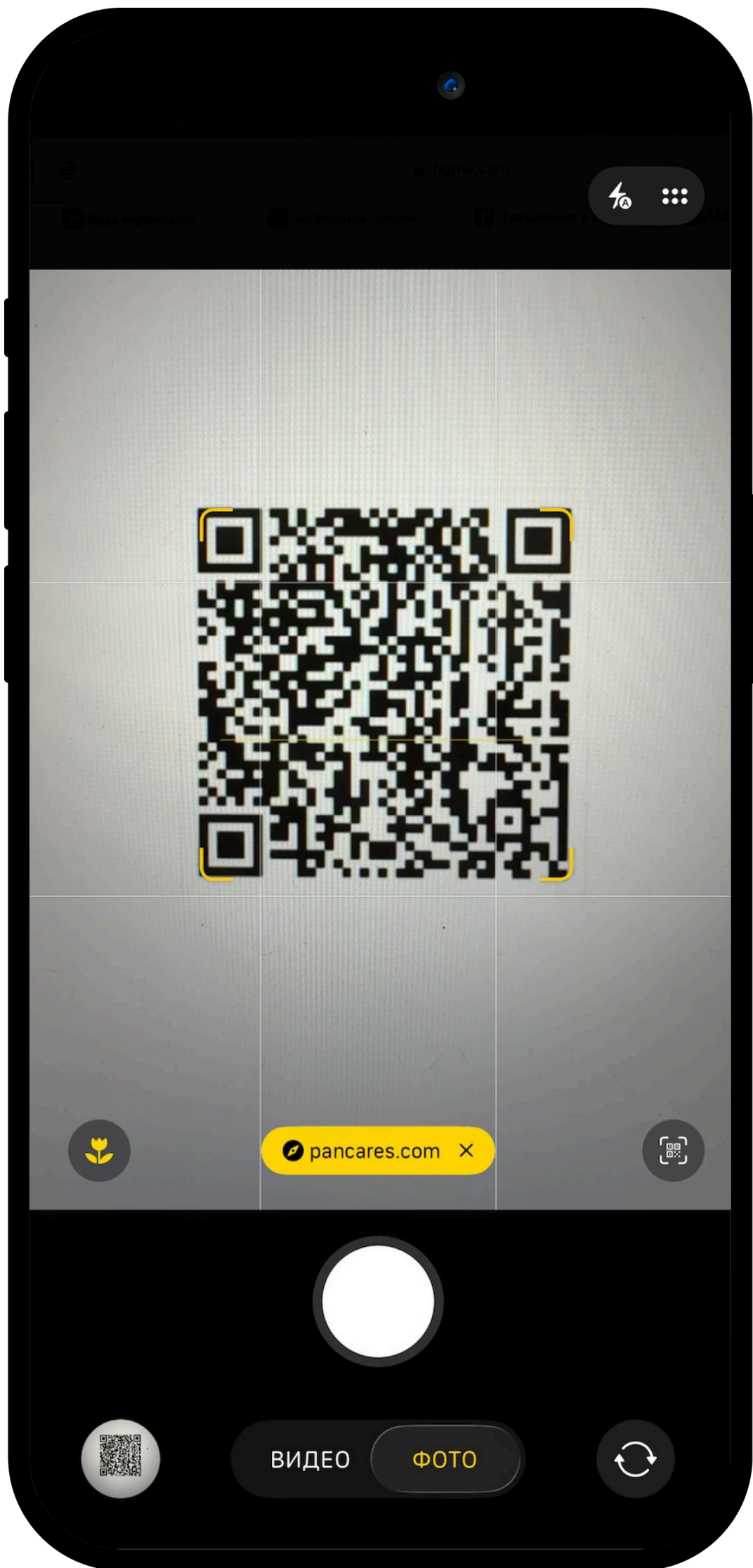

3. Нажмите и удерживайте QR-код, который появится на экране и откройте его в **TestFlight**.



17:13

Камера










LTE 94



САЙТ QR-код

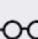


Открыть «apple.com»
<https://testflight.apple.com/join/fMSEb7Dq>

-  Открыть
-  Поделиться...
-  Добавить в Список для чтения
-  Сохранить в Фото
-  Скопировать
-  Скопировать субъект
-  Найти

<https://testflight.apple.com/join/fMSEb7Dq>

4. Скачайте приложение **TestFlight** в App Store.

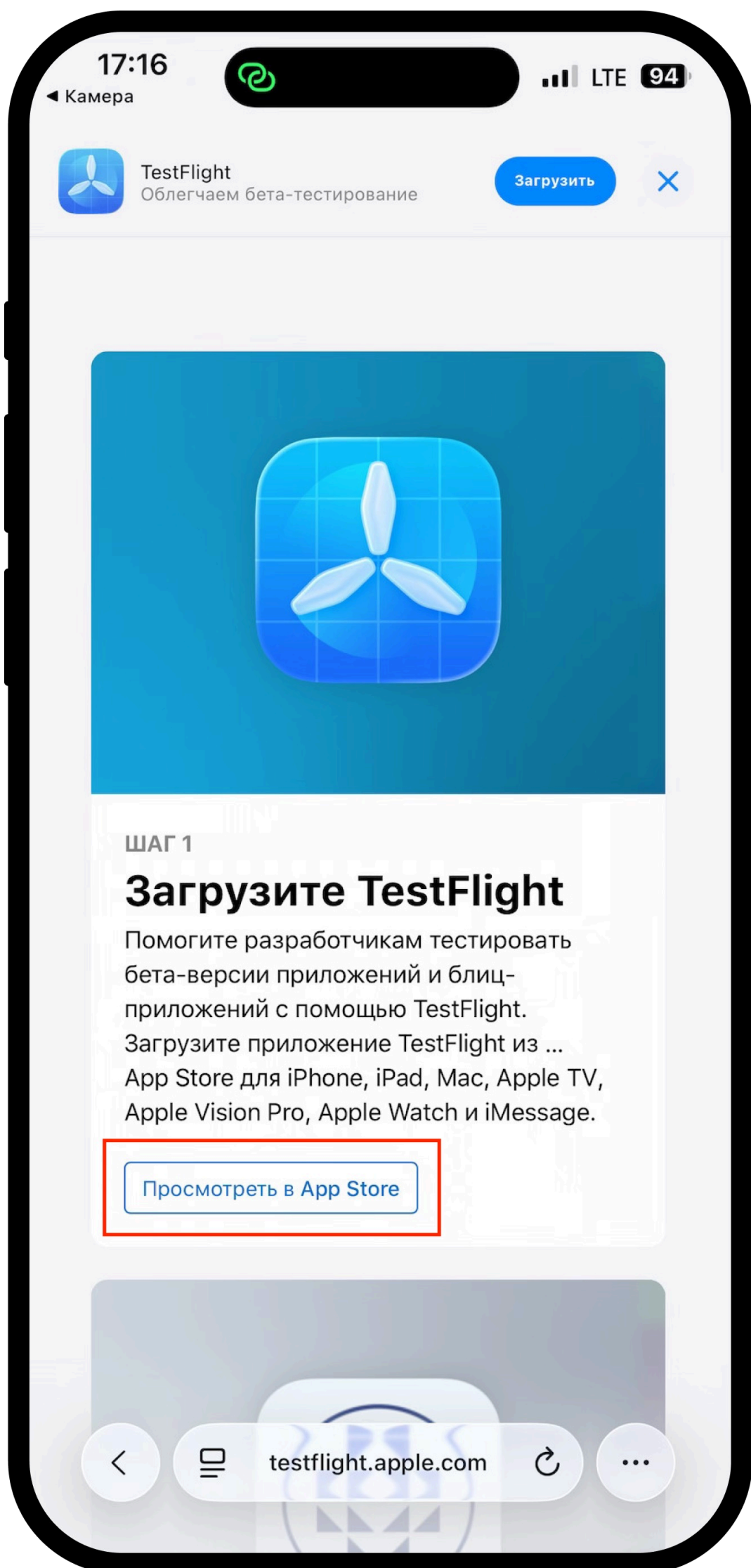

17:16

Safari

LTE 94



TestFlight

Apple

Загрузить

ОЦЕНОК: 91 ТЫС.

4,8



ВОЗРАСТЫ

13+

лет (г.)

РЕЙТИНГ

№1

Разработчикам

РАЗРАБОТЧИК



Apple

Access your beta apps
and view updates

Accept invitation
test beta app

9:41

Apps

Currently Testing

- Backyard Birds
Expires in 32 days Update
 - Exercise App
Expires in 16 days Open
 - Forest Explorer
Expires in 32 days Open
 - Garden
Expires in 20 days Update
 - The Coast
Expires in 24 days Open
- Previously Tested
- Word Search
Tester Removed

9:41

AwayFinder

Accept

DEVELOPER



GlobalHub

CATEGORY



Travel

Preview

AwayFinder

Сегодня


Игры

Приложения


Arcade 1




5. Открыв приложение **TestFlight**, проигнорируйте страницу, которая просит вас ввести код, и смахните ее, чтобы выйти с нее.

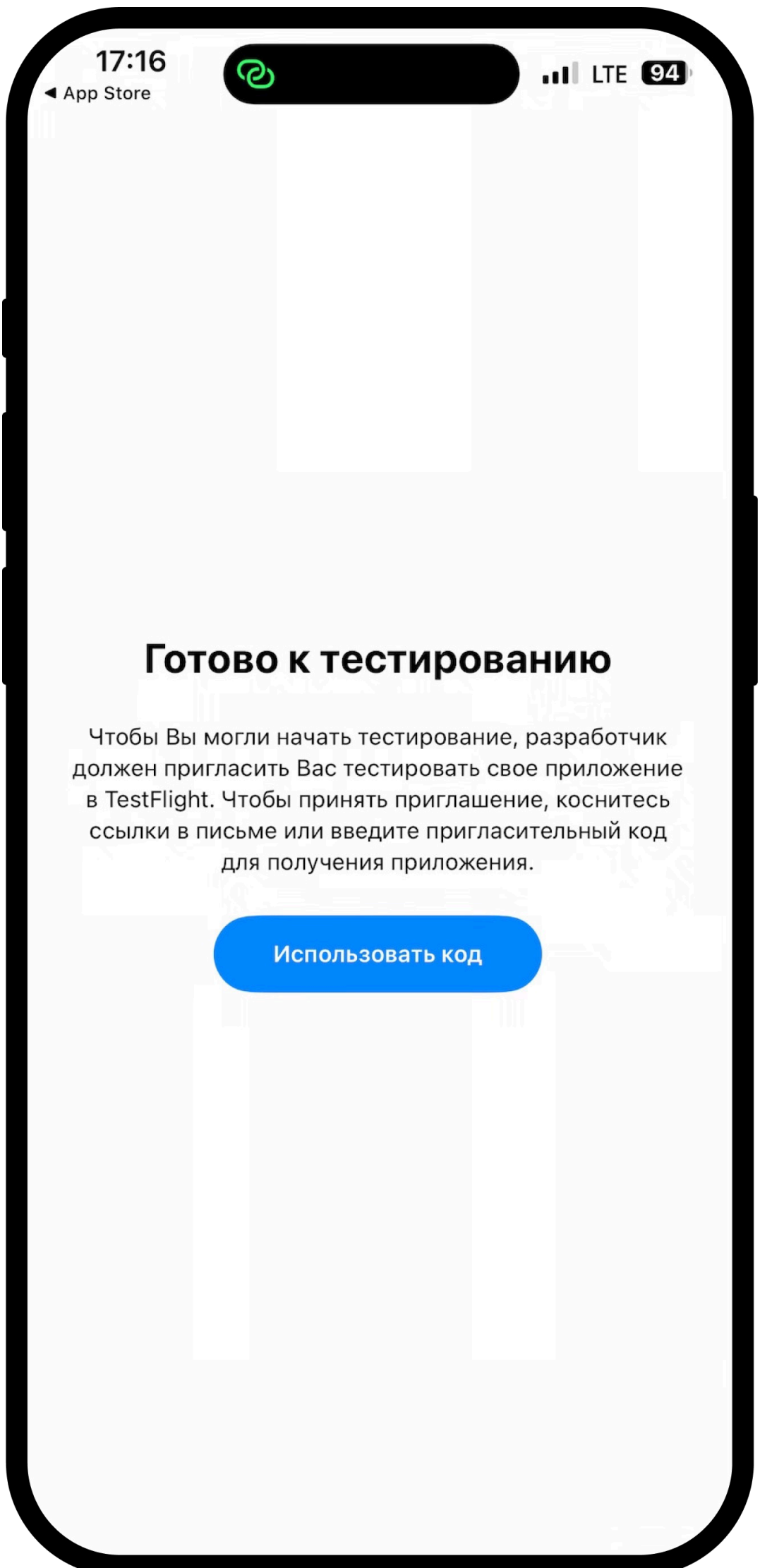


6. Снова откройте камеру, чтобы **отсканировать QR-код на шаге 1**, вы найдете приложение **Lumiflex**, пожалуйста, нажмите **"Установить"**.

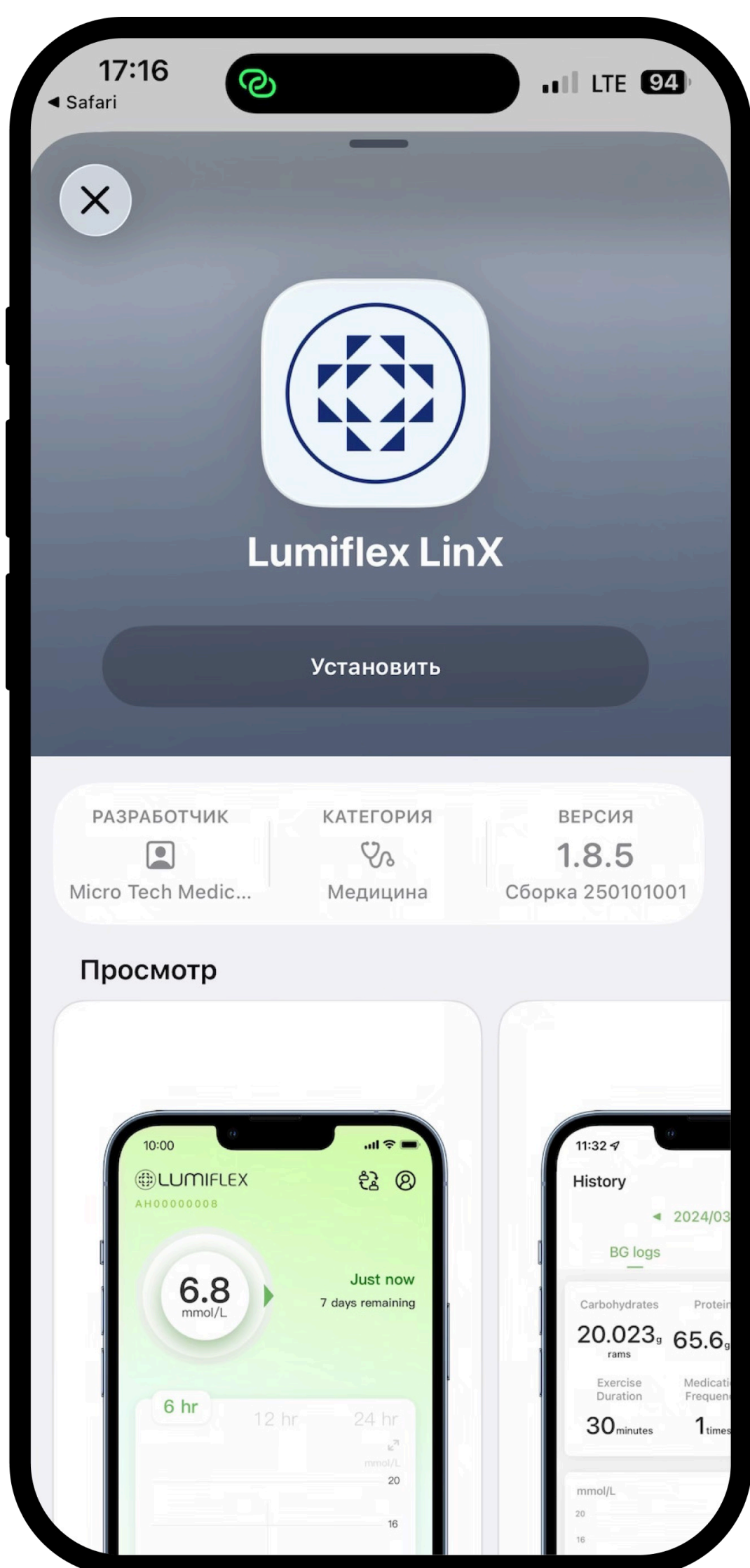

7. После установки, откроется окно, в котором надо дать разрешения для приложения, нажав **"Продолжить"**.

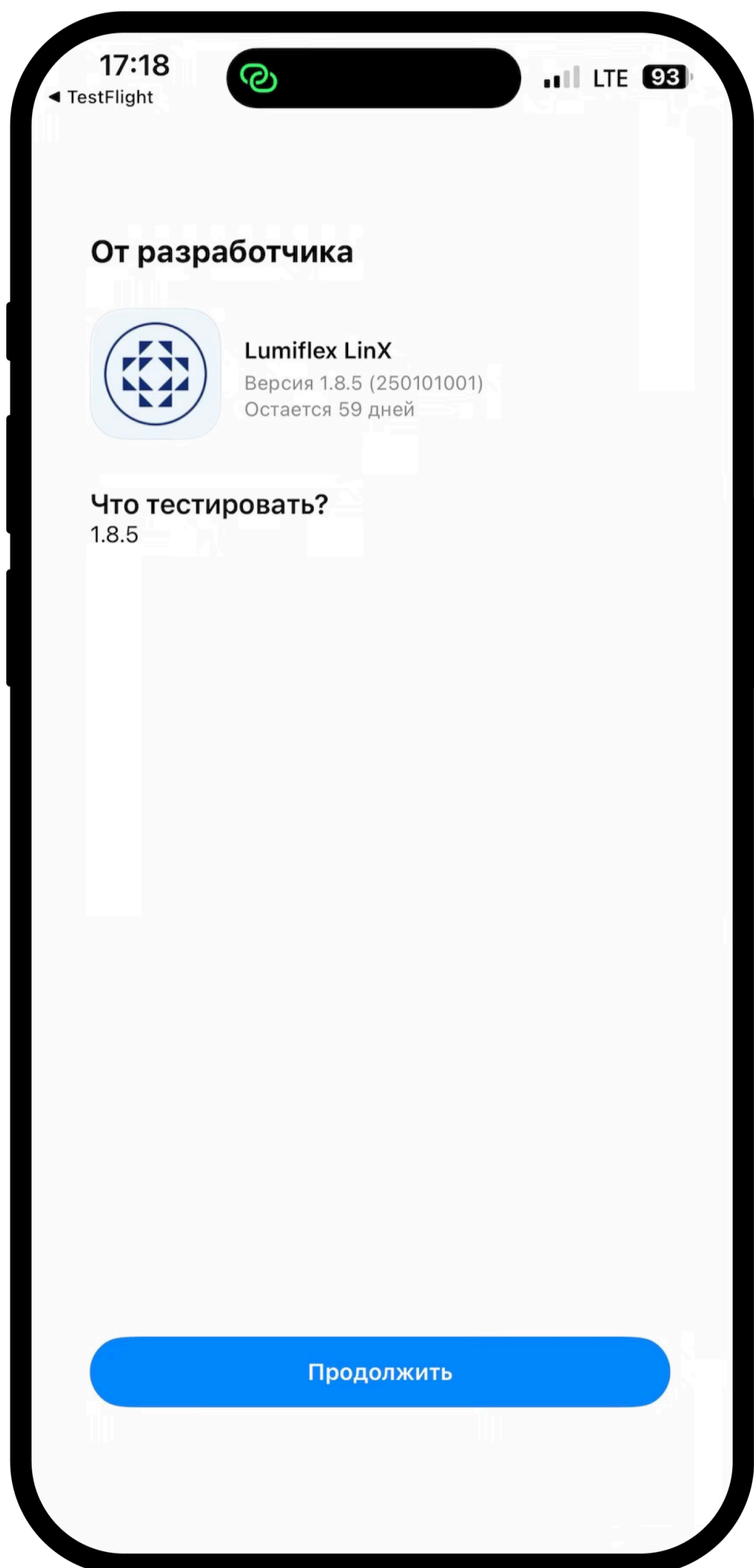

8. Приложение готово к работе.

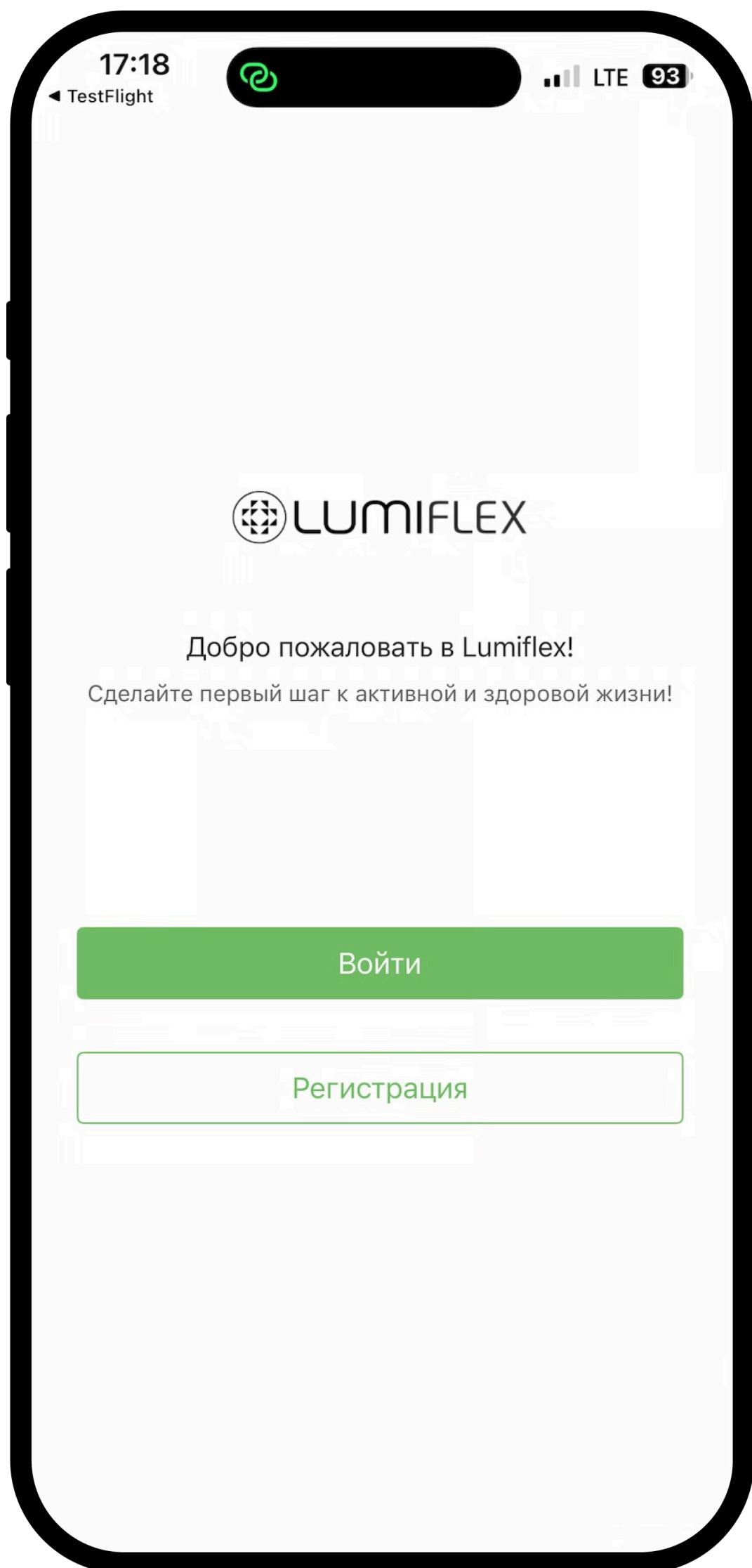



9. Пройдите регистрацию: введите свой номер телефона, запросите код, задайте пароль и подтвердите его, дайте согласие на Условия использования и Политику конфиденциальностью – нажмите кнопку «**Регистрация**».


15:09



App Store



Регистрация



 +7 Номер телефона

 Проверочный код Получить код

 Пароль 


 Подтвердите пароль 

Ограничение пароля: Введите от 8 до 16 букв.

Я прочитал и согласен с [Условия использования](#) и [Политика конфиденциальности](#)

Регистрация

10. Убедитесь, что **все уведомления включены**. Зайдите в свой профиль, кликнув на иконку в правом верхнем углу - Выберите "**Уведомления**" - **Настройте**.

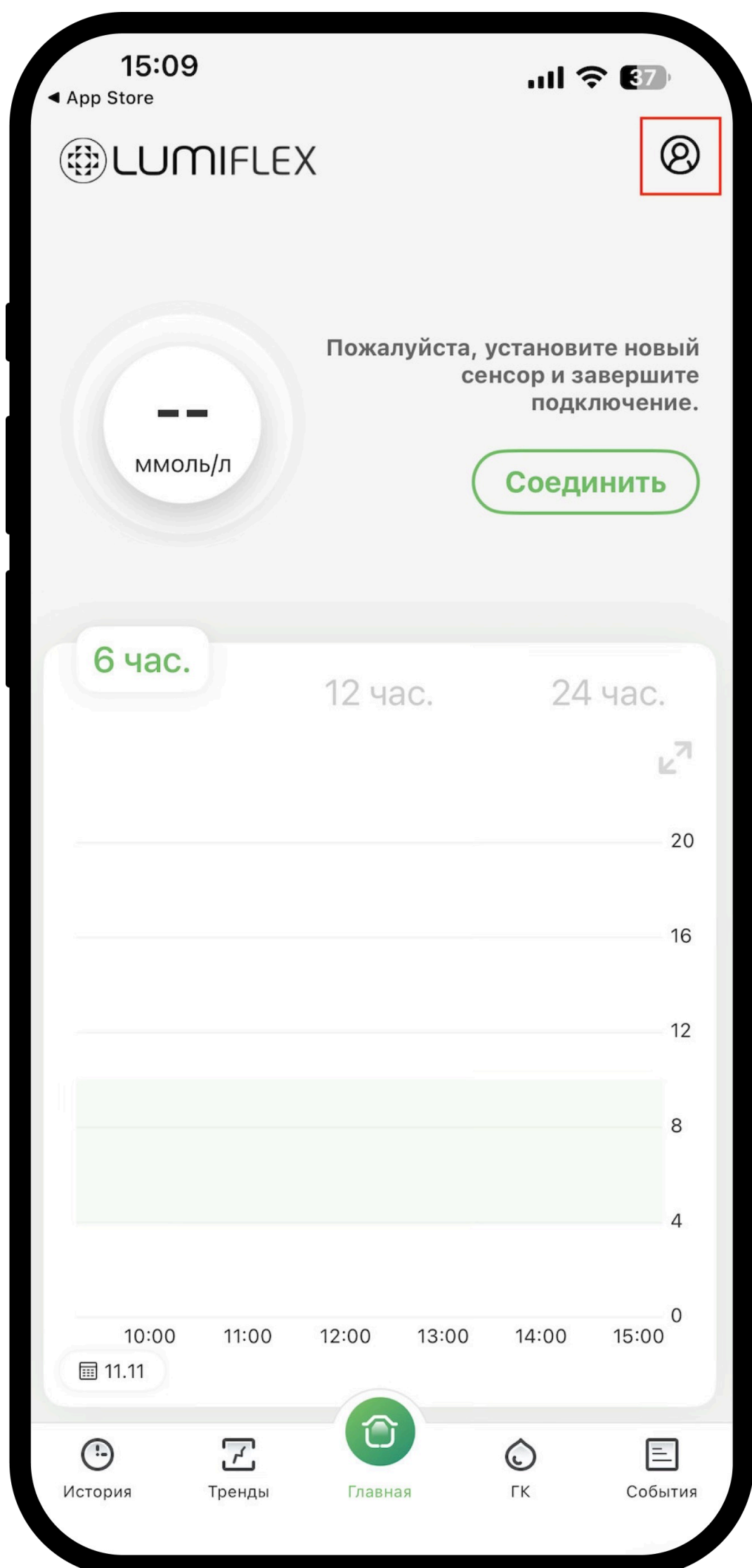

15:25

36



793****3073

Просмотр и редактирование
личных данных



Общий доступ



Помощь

Сопряжение >

Уведомления >

Единицы глюкозы ммоль/л >

История часовых поясов >

Записи >

Разрешения >

Безопасность >

Язык Русский >

Тема Светлая >

О системе >

О приложении >

15:10

📶 📶 37

◀ App Store



Уведомления

Регулярные уведомления

Режим уведомлений

Метод уведомления >

Звук и вибрация

Частота уведомления >

Напоминание 1 раз в 30 мин.

Содержание уведомлений

Уведомление о низком уровне глюкозы

Порог уведомления о низком уровне глюкозы >

3,9 ммоль/л

Уведомление о высоком уровне глюкозы

Порог уведомления о высоком уровне глюкозы >

10,0 ммоль/л

Уведомление о быстром повышении
уровня глюкозы

Уведомление о быстром падении уровня глюкозы

Экстренные оповещения

Сигнал тревоги о низком уровне глюкозы


Порог сигнала тревоги о низком уровне глюкозы >

3,0 ммоль/л

Метод уведомления >

Звук и вибрация

11. Вернитесь на страницу **“Профиль”**, кликнув на **иконку стрелки** в левом верхнем углу - Выберите **“Разрешения”** - **“Настройки авторизации телефона”**.

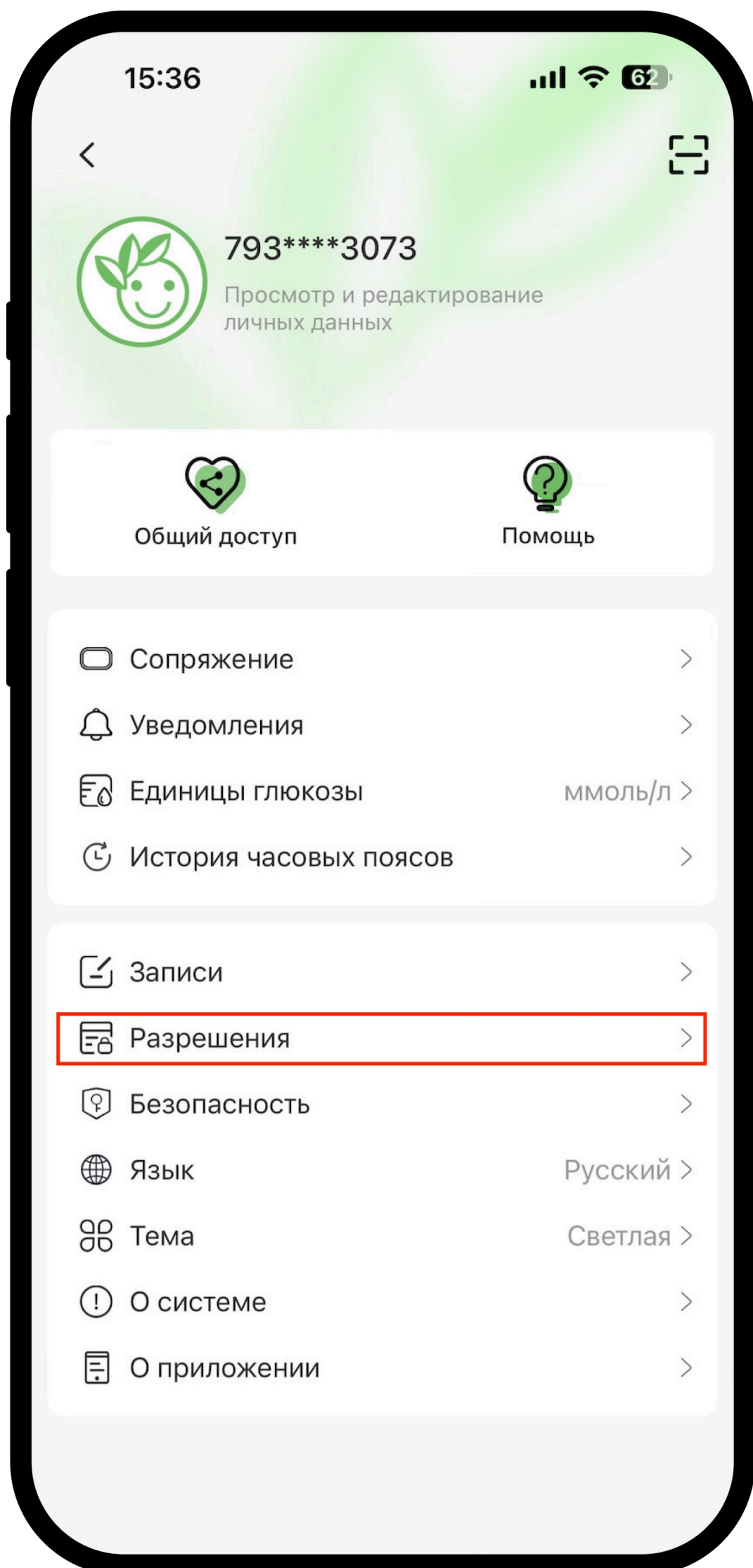

15:36

📶 📶 62



Разрешения


Настройки авторизации телефона >

Здоровье Apple Не подключено >

Авторизация для сторонних приложений >

Поделиться с аккаунтом Pancares >

12. Убедитесь, что все галочки **включены** (они должны быть зелеными). Если потребуется, то настройте пункты вручную.

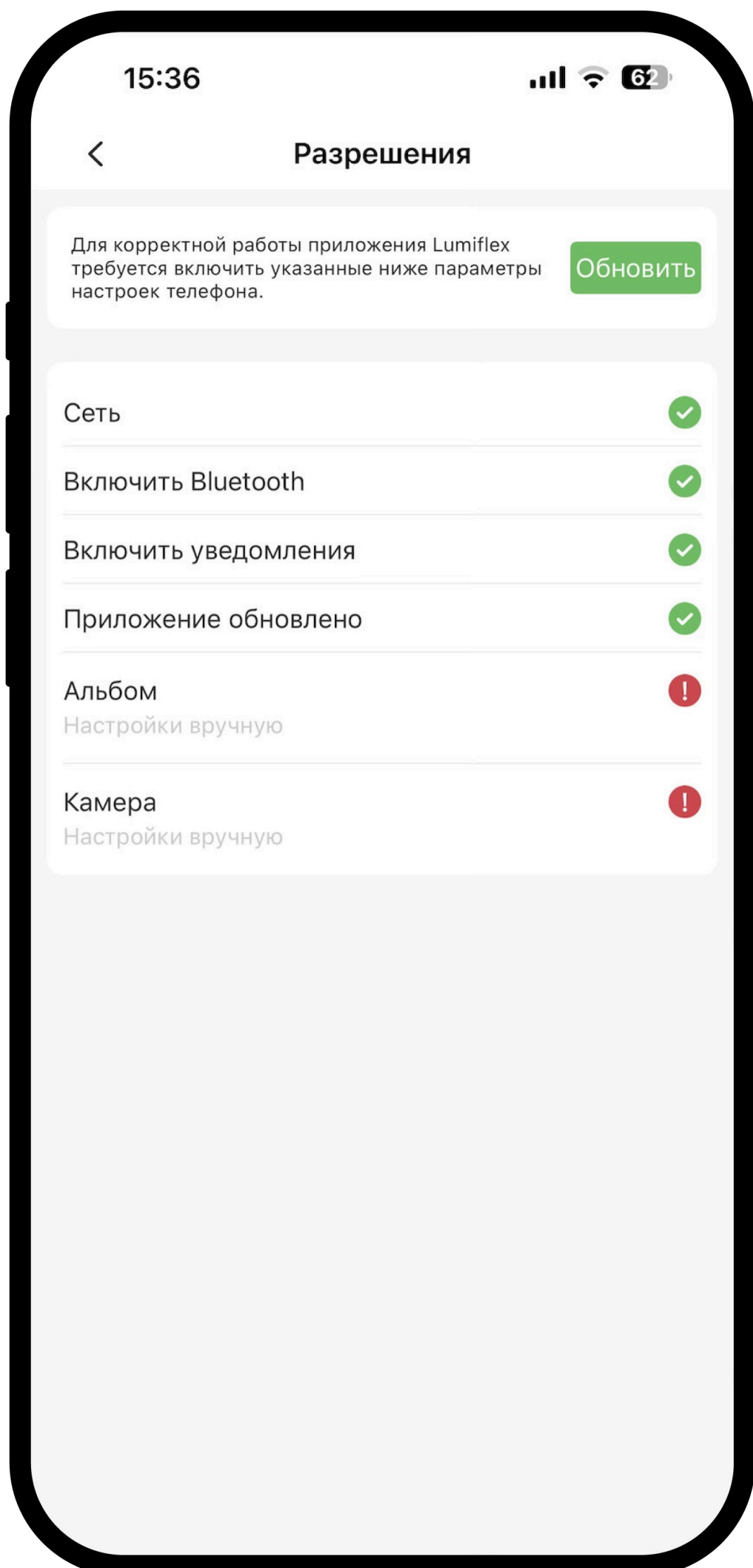

13. Приложение готово к работе.
Можете начать **подключения**
сенсора.

