

**Руководство пользователя  
Lumiflex Cloud  
для аккаунта пациента**

# Содержание

1	Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud .....	1
2	Системные требования и меры предосторожности .....	2
3	Как зарегистрироваться в облачном сервисе? .....	3
4	Как войти в свой аккаунт после регистрации? .....	5
5	Главная страница .....	6
6	Как сформировать отчет AGP? .....	9
7	Как настроить обмен данных об уровне глюкозы? .....	11
8	Настройки вашего личного профиля .....	15

# Предполагаемое использование облачного сервиса Lumiflex Cloud

**Lumiflex Cloud** предназначен для использования пациентами с диабетом, их опекунами и лечащими врачами для просмотра, анализа и оценки данных с устройств для мониторинга глюкозы для поддержки эффективного управления диабетом.

## Дополнительно:



Lumiflex Cloud является вспомогательным средством просмотра данных и не предназначен для принятия решений по лечению или замены профессиональной медицинской консультации.



Lumiflex Cloud не предназначен для немедленного принятия клинических решений и не заменяет самоконтроль уровня глюкозы, рекомендованный лечащим врачом.



Домашние пользователи должны проконсультироваться с медицинским работником перед любой медицинской интерпретацией и корректировкой терапии на основе информации, содержащейся в программном обеспечении.

# Системные требования и меры предосторожности

Обеспечьте оптимальную производительность и безопасность с помощью правильной настройки

## Системные Требования

### Поддерживаемые браузеры

Веб-приложение Lumiflex Cloud разработано для работы в Google Chrome версии 85 или выше. Для обеспечения полной функциональности необходимо включить JavaScript и разрешить всплывающие окна.

### Поддерживаемые операционные системы

Приложение протестировано для обеспечения бесперебойной работы в Chrome под управлением Windows 10, macOS 10.15+ и дистрибутивов Linux (например, Ubuntu 20.04+).

### Минимальные аппаратные/программные требования

Для оптимального отображения информации минимальное разрешение экрана должно быть 1920x1080. Для наилучшей производительности необходимо обеспечить стабильное интернет-соединение.

## Критические Меры Предосторожности

- 1 Подключение:** Включает Bluetooth и сеть на мобильных устройствах для обмена данными в реальном времени. Компьютер должен поддерживать стабильное интернет-соединение;
- 2 Риски передачи данных:** Проблемы с устройством, Bluetooth или сетью могут привести к **задержке или сбою передачи данных** опекунам;
- 3 Питание:** Обеспечивает стабильное питание во время подключения устройства и обработки данных. Избегать использования платформы при низком уровне заряда батареи;
- 4 Серьезные инциденты:** Немедленно сообщить производителю и соответствующим органам о любых серьезных травмах или смертельных случаях, связанных с устройством.






# Как зарегистрироваться в облачном сервисе?






<https://cloud.lumiflex.ru>

## Шаги регистрации:

- 1 Перейдите на вкладку «Пациент» и нажмите «Зарегистрироваться»;
- 2 Выберите тип профиля «Пациент» и нажмите «Продолжить»;
- 3 Введите данные, связанные со здоровьем;
- 4 Установите предпочтительные единицы измерения и пороговые значения ВГ (глюкозы в крови);

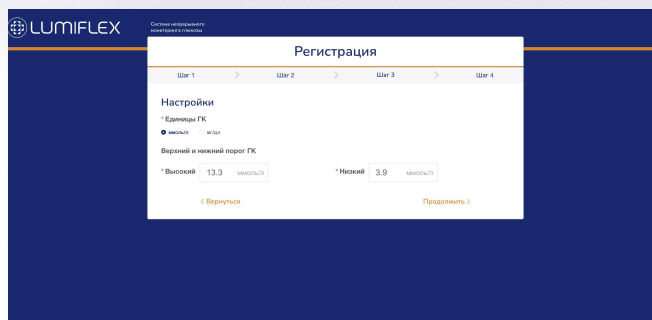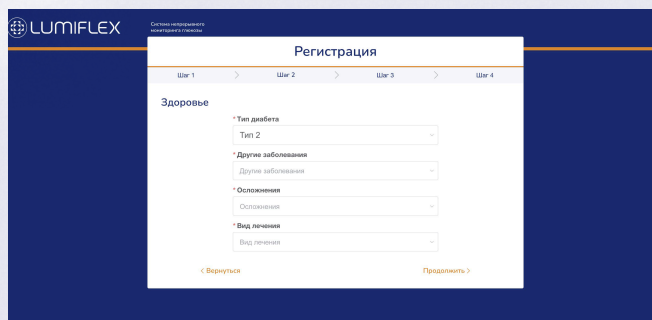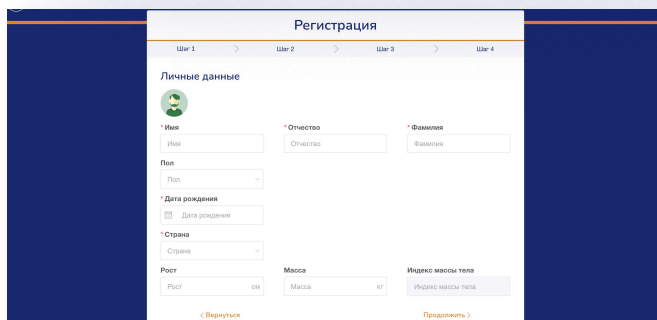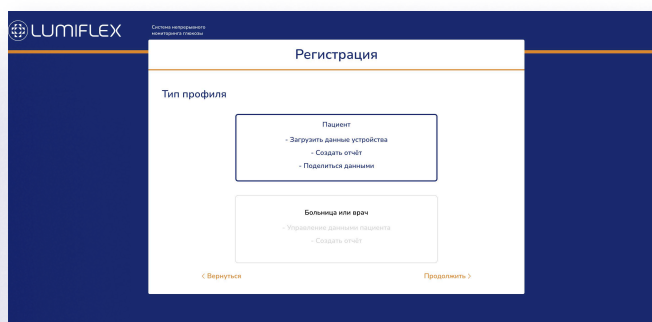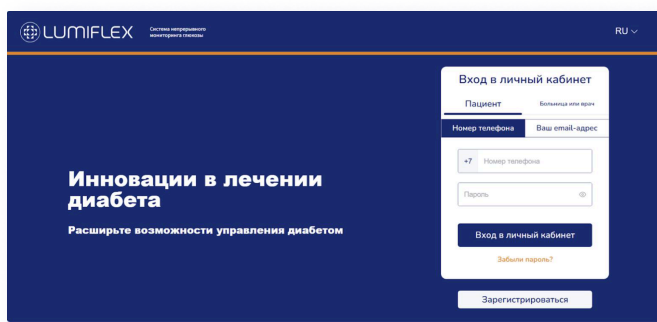

## 5 Выберите способ регистрации: с использованием номера мобильного телефона или адреса электронной почты.

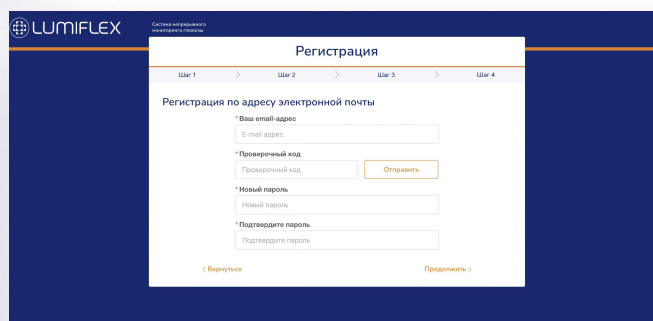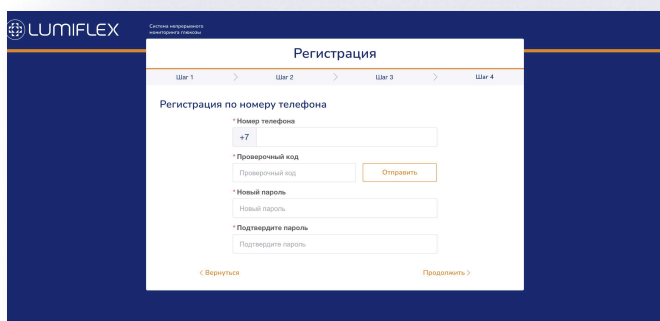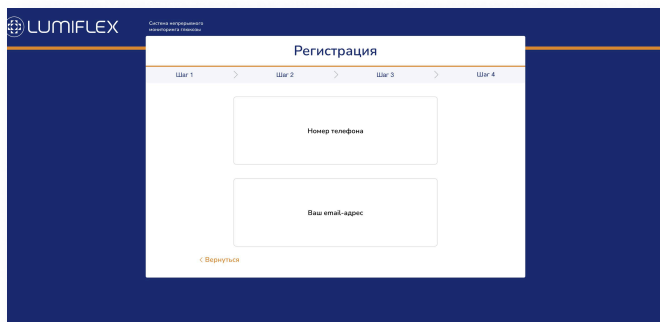

### 1. Регистрация по номеру телефона:

Введите номер телефона;

Нажмите кнопку **«Отправить»**.

Вам поступит СМС с кодом.

Введите его в поле **«Проверочный код»**;

Придумайте пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтверждение пароля»**.

### 2. Регистрация по Email-адресу:

Введите ваш Email;

Нажмите на кнопку **«Отправить»**.

Вам поступит письмо с кодом.


Введите его в поле **«Проверочный код»**;

Придумайте пароль в строке **«Новый пароль»**, продублируйте его в строке **«Подтверждение пароля»**.

После ввода данных завершите регистрацию путем ввода кода верификации и установки пароля. Теперь вы можете войти в систему.

# Как войти в свой аккаунт после регистрации?

- 1 Выберите вкладку «Пациент»;
- 2 Выберите «Номер телефона» или «Адрес электронной почты»;
- 3 Безопасно введите имя пользователя и пароль;
- 5 Нажмите кнопку «Вход в личный кабинет» для продолжения.

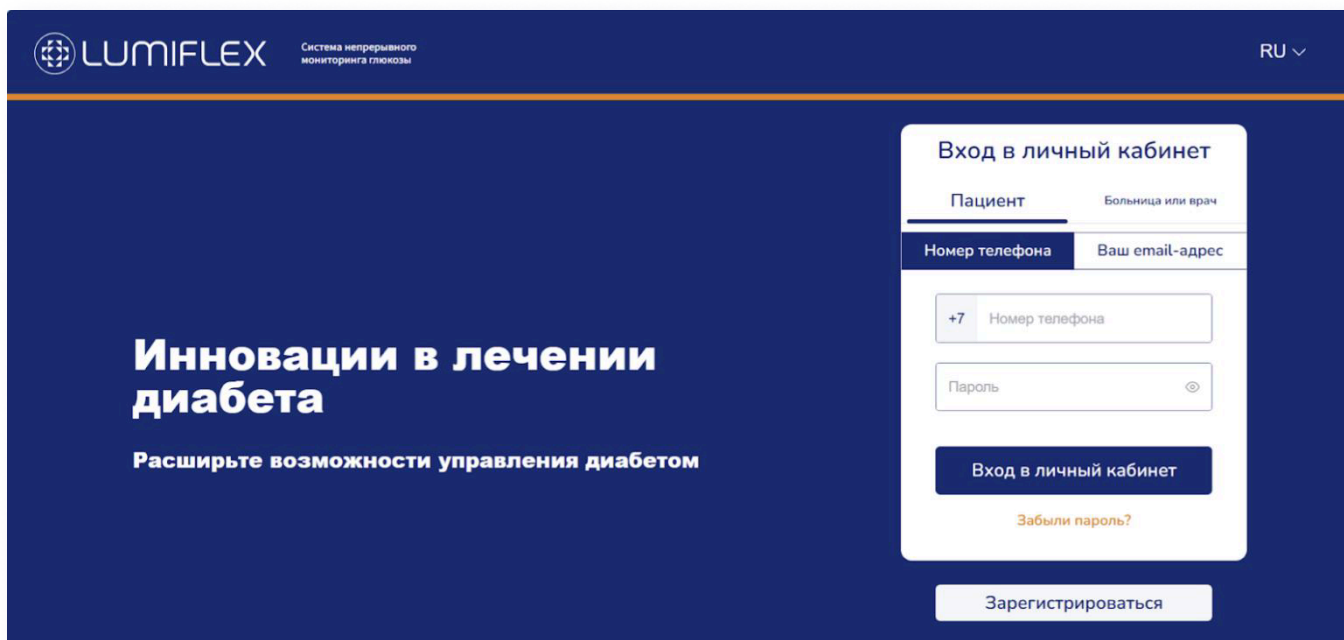

[Забыли пароль?](#)

## Забыли пароль

Нажмите кнопку «Забыли пароль» и следуйте инструкциям для его сброса.

Выберите «Номер телефона» или «Адрес электронной почты».

RU ▾

## Сменить язык

Выберите предпочитаемый язык из доступных вариантов.


# Главная страница

## История отчетов

- 1 Нажмите на карточку «Загрузка отчетов» для быстрого обзора всех ваших прошлых записей о сгенерированных отчетах.

### Примечание:


После установления связи между пациентами и врачами, все отчеты, независимо от того, были ли они сгенерированы пациентами или врачами, могут быть просмотрены на этой странице.

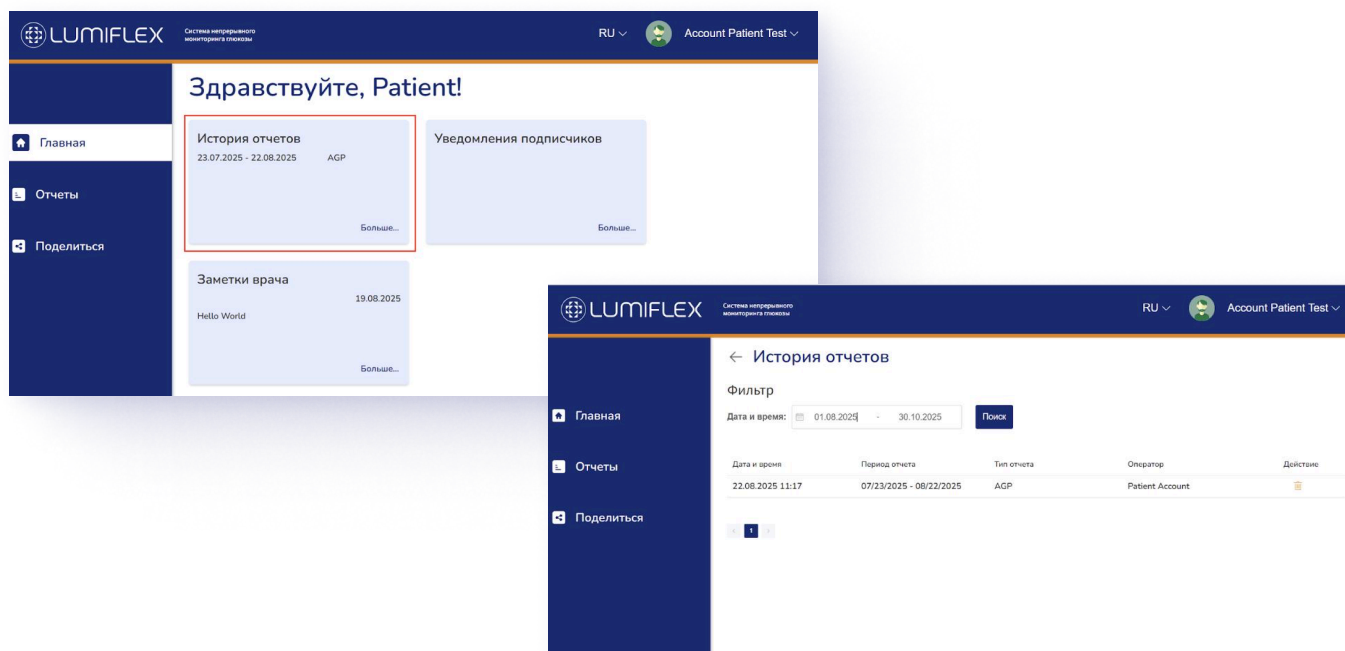

- 2 Просто щелкните в любой области строки выбранного отчета, чтобы открыть и получить доступ к его содержимому.


## Быстрый выбор

- ✓ Поддерживает быстрый выбор языка и единиц измерения.

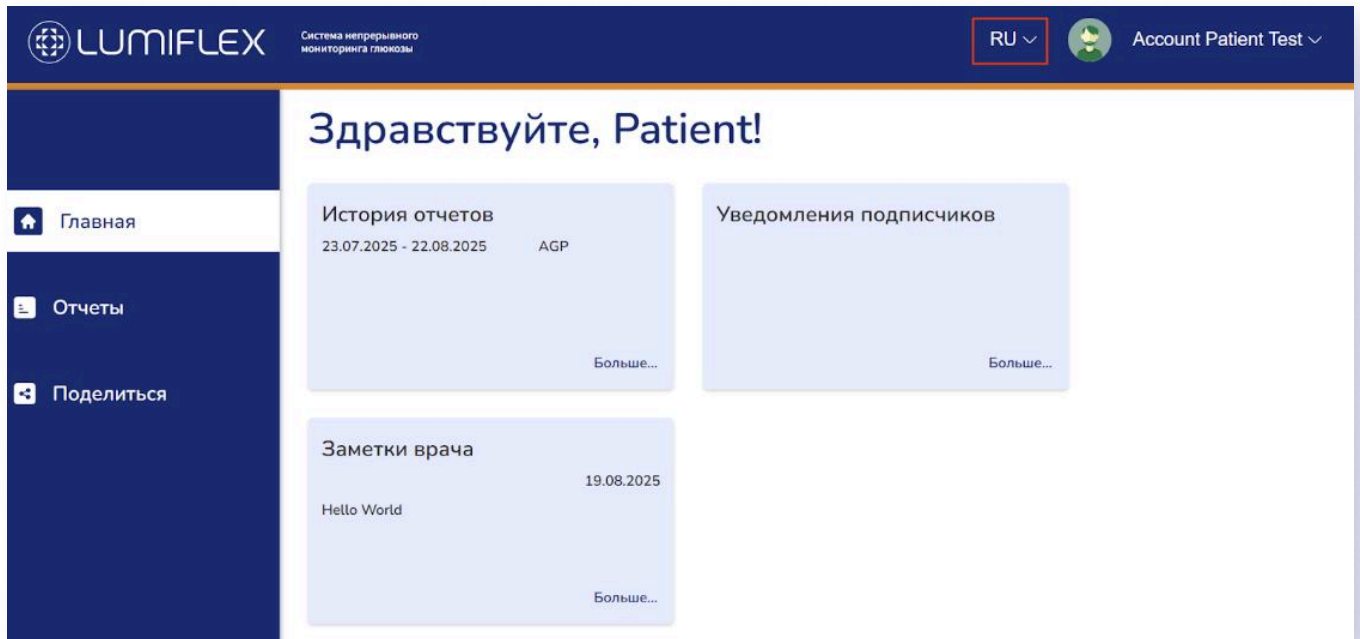


## Заметки врача

Нажмите на карточку «Заметки врача» для быстрого обзора всех ваших прошлых Заметок врача.

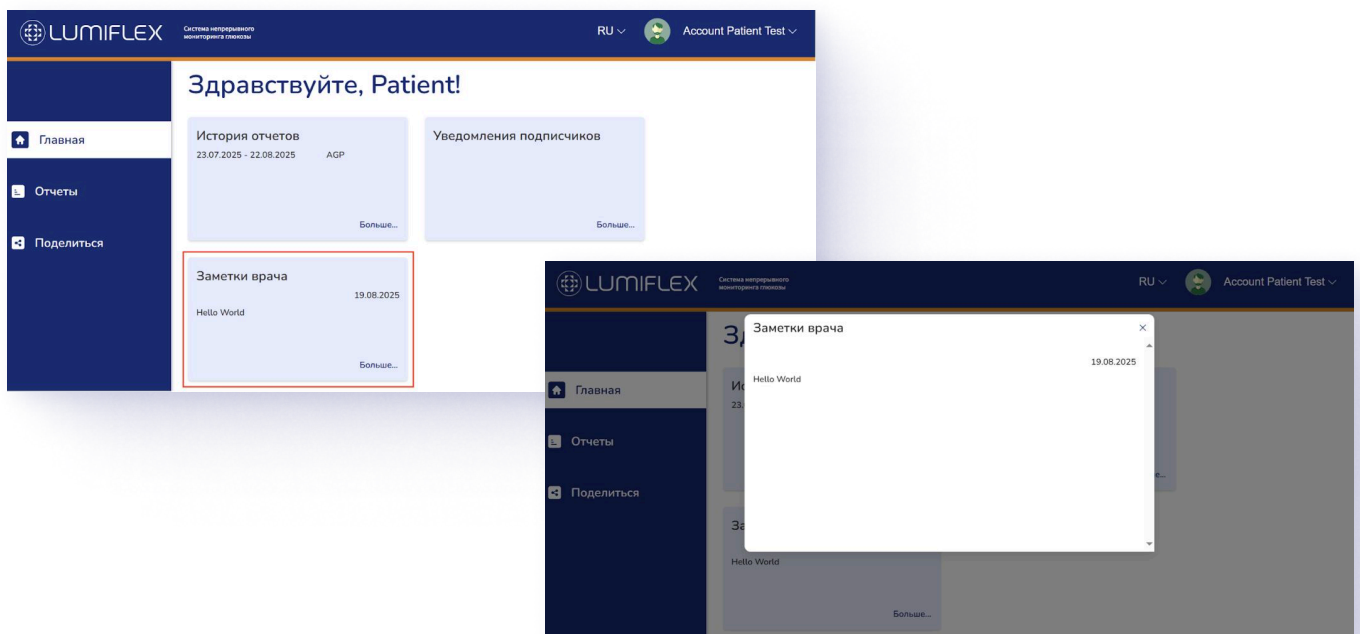


## Уведомления подписчиков

- 1 Нажмите на карточку «Уведомления подписчиков» для быстрого обзора всех ваших прошлых записей об оповещениях.

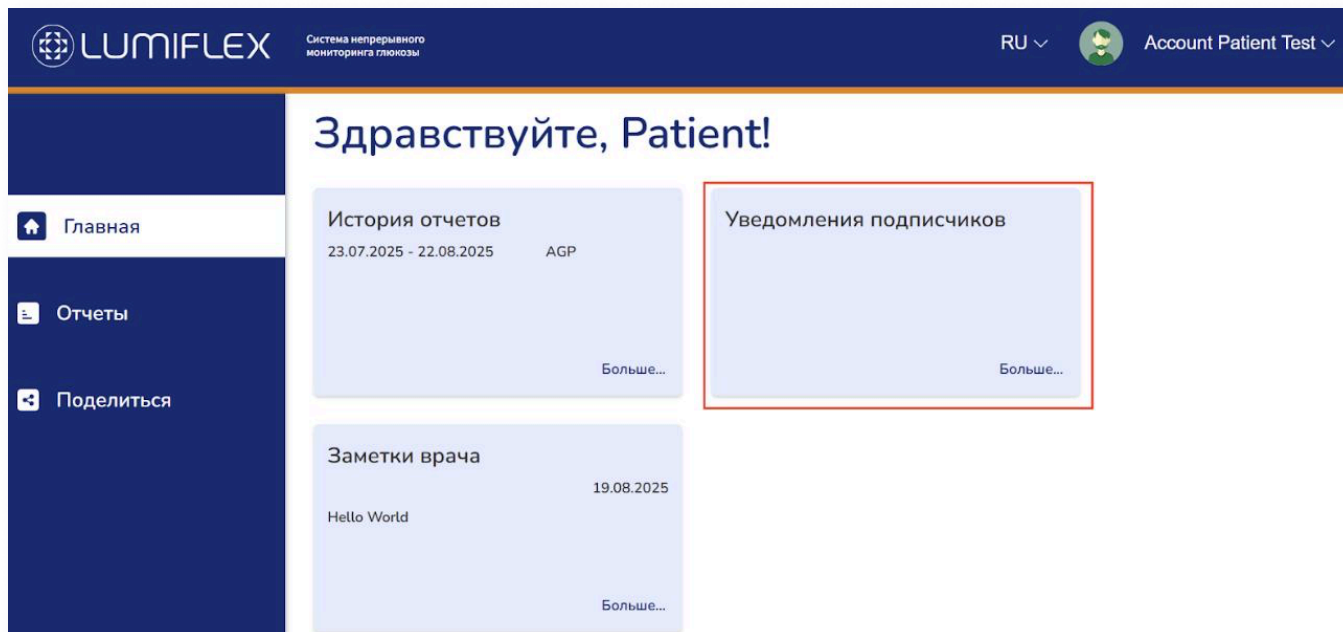


- 2 Используйте «Тип оповещения» и «Время оповещения» в качестве условий фильтрации для генерации списка оповещений.

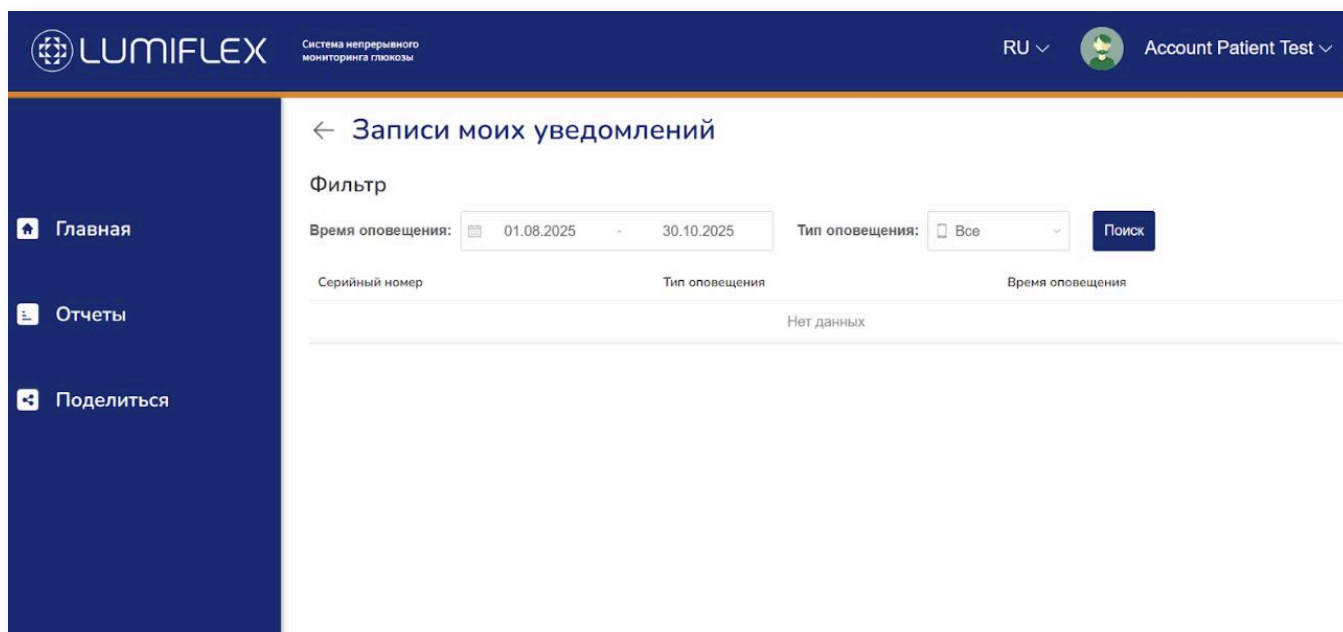

# Как сформировать отчет AGP?


## Выбор временного интервала

- 1 Выбрать пациента и нажать на строчку с его ФИО;
- 2 Меню отчетов находится внизу главной страницы пациента;
- 3 Выбрать предустановленные диапазоны (7, 14, 30, 90 дней) или настраиваемый период времени;
- 4 Нажать «Создать отчет» для комплексного анализа данных.

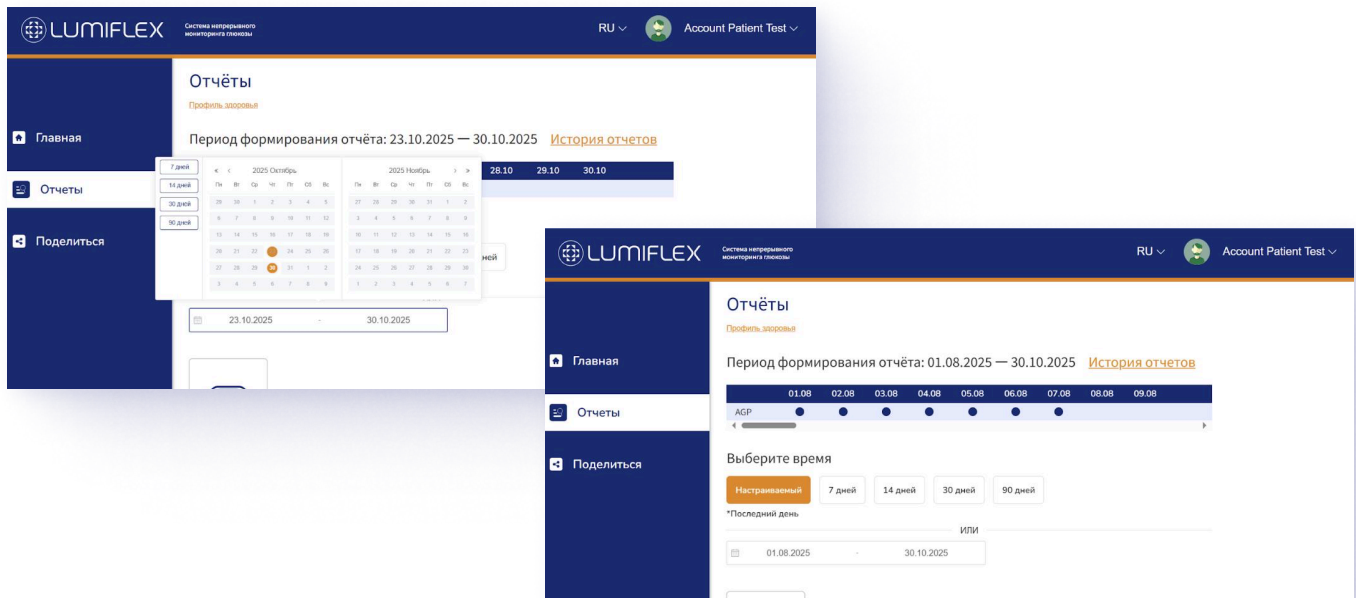


## Выбор типа отчета

Отчет AGP поддерживает интеграцию загруженных данных CGM.

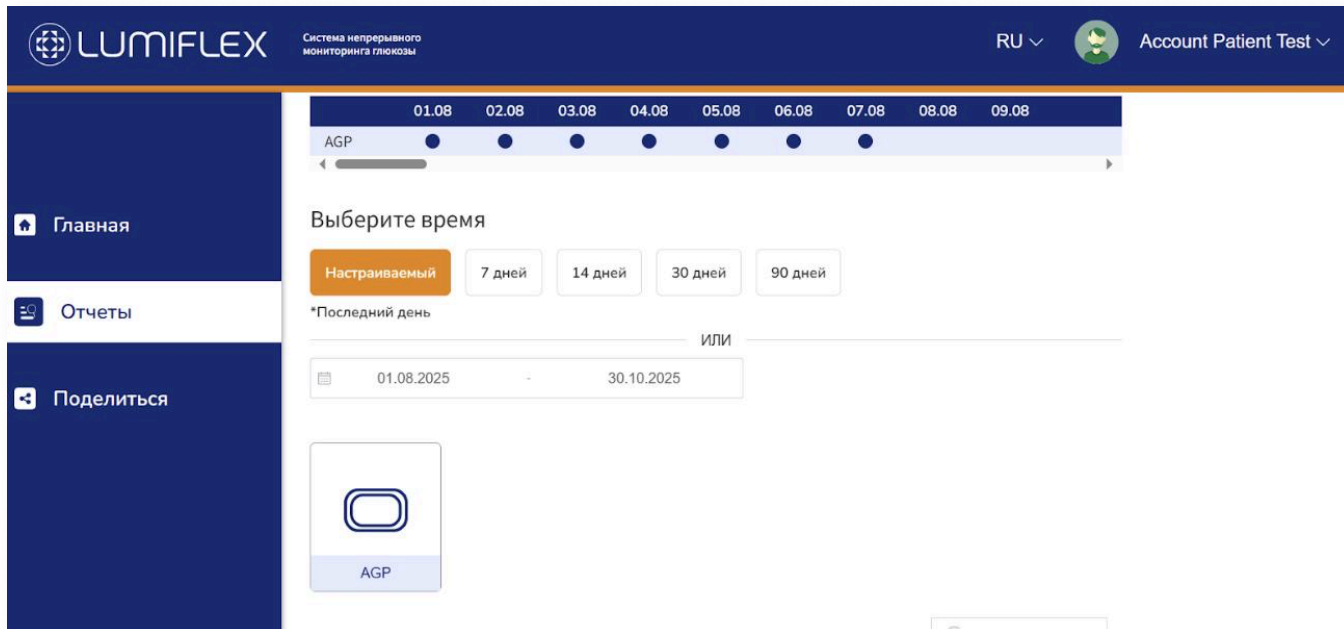

## История отчетов


«История отчетов» позволяет просматривать ранее сгенерированные отчеты, что позволяет быстро открыть их без повторной генерации. Звездочка (\*) рядом с именем отчета указывает на то, что отчет был сгенерирован врачом или кем-то другим от вашего имени, а не вами.

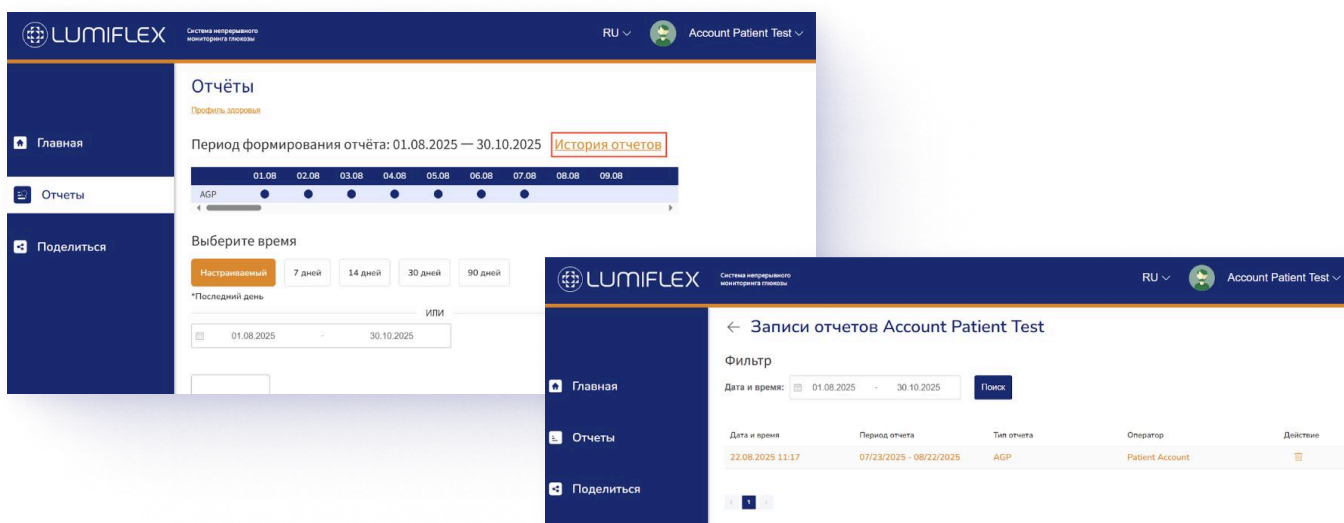

# Как настроить обмен данными об уровне глюкозы?

## С врачами


- ✓ Функция «Заметки врача» позволяет просматривать сообщения или заметки, оставленные вашим врачом.
- ✓ Вы можете найти адрес электронной почты вашего врача и отправить приглашение. После согласия врача он может помочь вам загружать данные или генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как учетная запись врача.

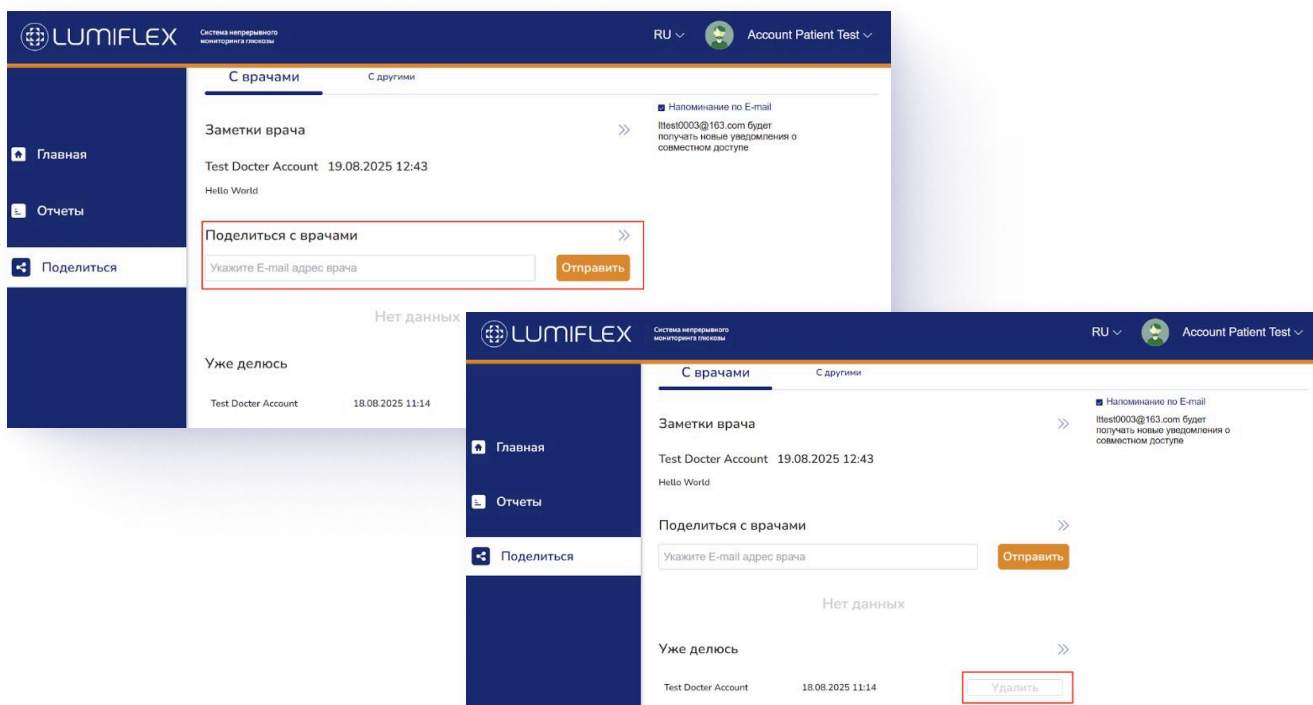

- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с врачом, нажав «Удалить».

Ваш врач может сам инициировать обмен данными через свой аккаунт в облачном сервисе. В этом случае, Вам на телефон поступит СМС где Вы подтверждаете свое согласие на обмен данными. Также разрешить обмен данными с врачом Вы можете через приложение Lumiflex Linx.


- 1 Нажать на «Личный центр»;
- 2 Выбрать «Разрешить доступ врачу»;
- 3 Нажать «Согласиться».

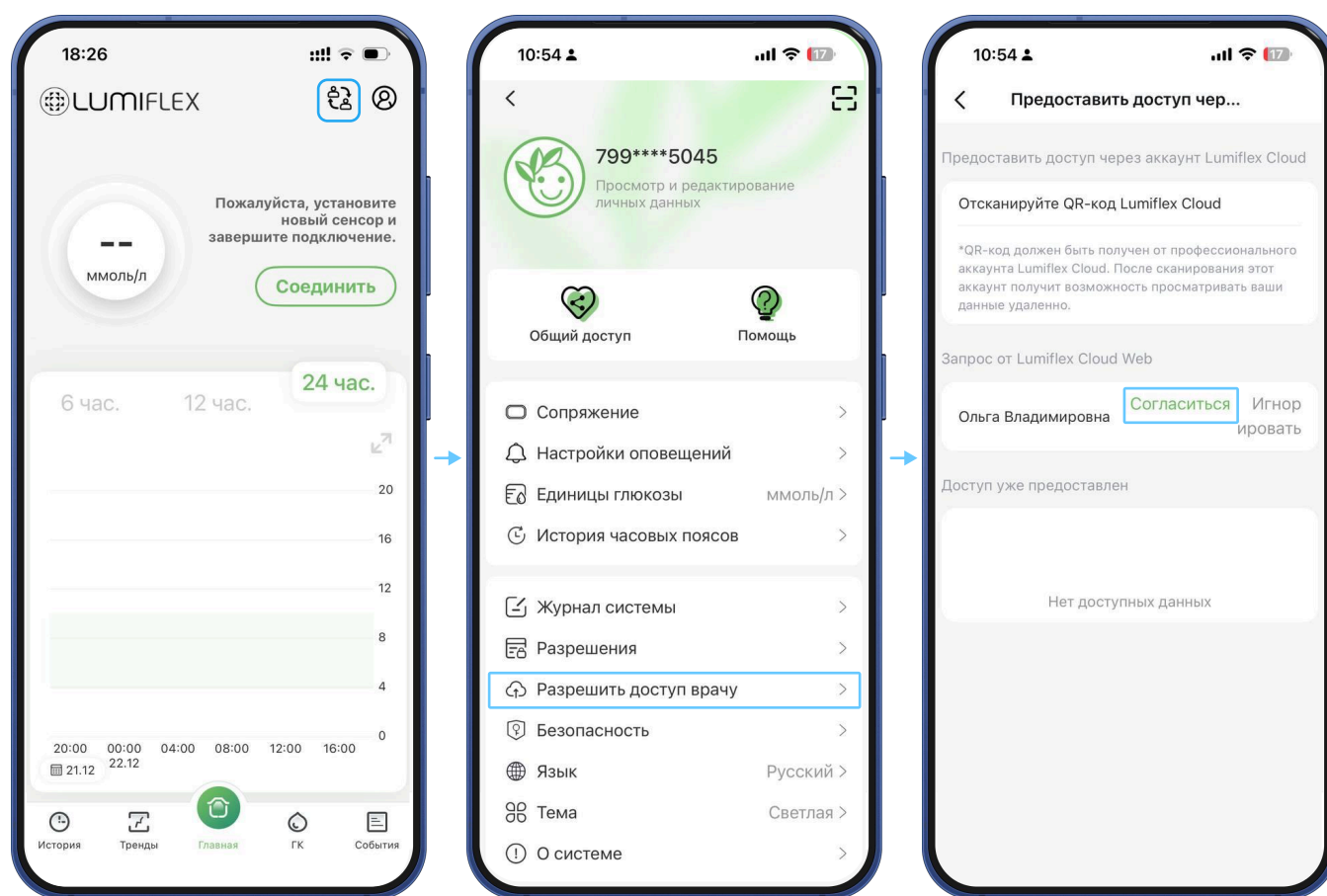

После того как Вы нажмете «Согласиться» в приложении, Врач сможет просматривать ваши данные на платформе Lumiflex Cloud



## С другими пользователями

- ✓ Вы можете найти электронную почту других пользователей и отправить приглашение. После согласия других пользователей они смогут генерировать отчеты, используя уже загруженные вами данные.
- ✓ Введенный адрес электронной почты должен быть зарегистрирован как личная учетная запись.

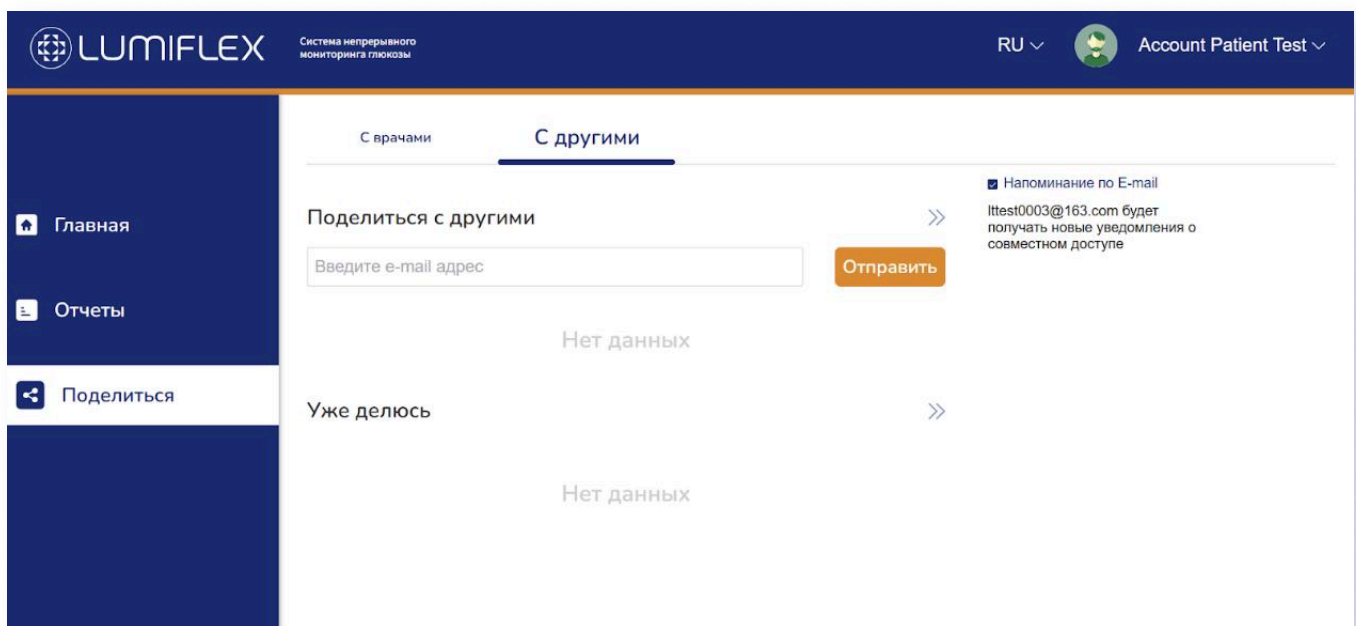

- ✓ Вы можете расторгнуть существующие отношения обмена данными с другими пользователями, нажав «Удалить».

Разверните страницу «Уже предоставленные данные», в разделе «Инициировано другими» и просмотрите список разрешений, предоставленных другими. Щелкните по любому полю, чтобы войти в центр отчетов другого человека, где вы можете просматривать статистические данные и другие записи, которые он загрузил.

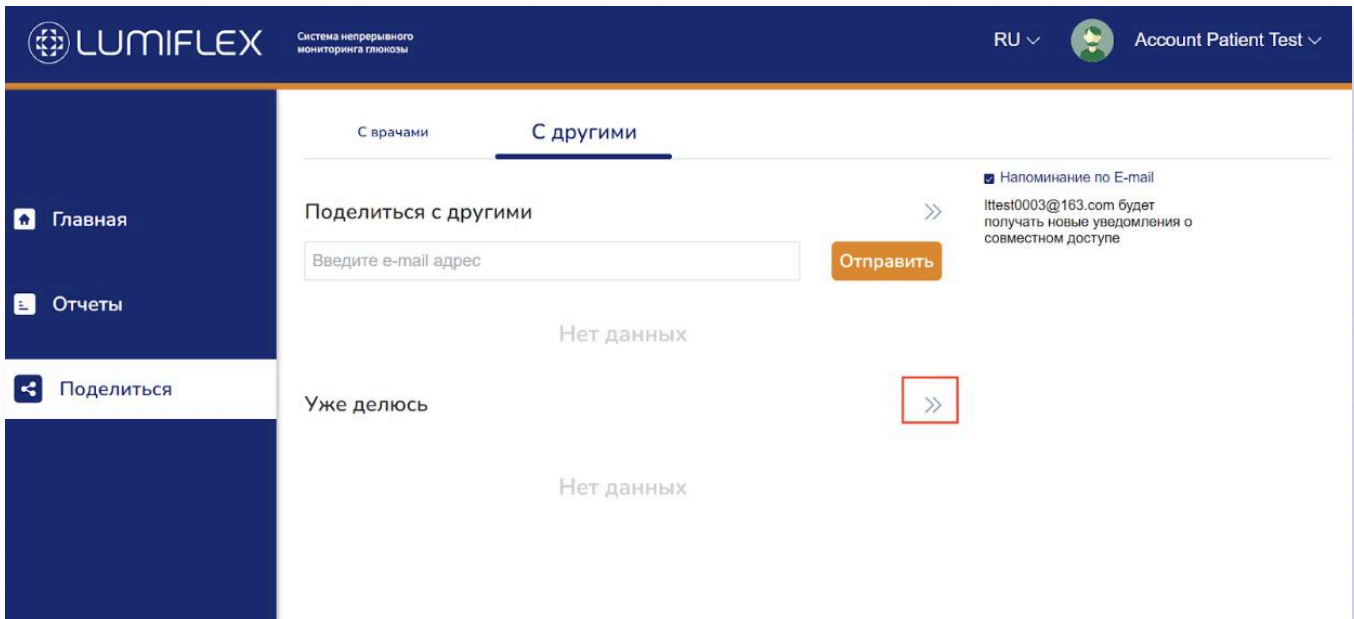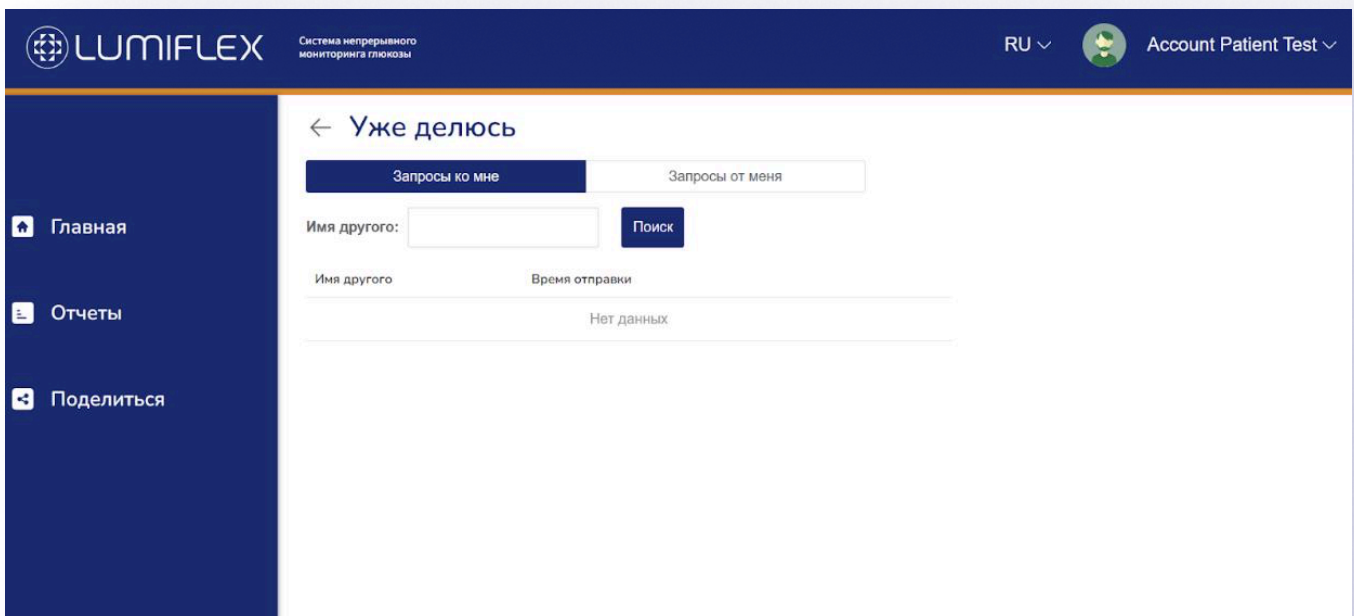
# Настройки вашего личного профиля

## Настройки учетной записи

- 1 Нажмите здесь, чтобы быстро перейти на страницу личных настроек.




- 2 Нажмите на кружок, чтобы изменить свою фотографию профиля.

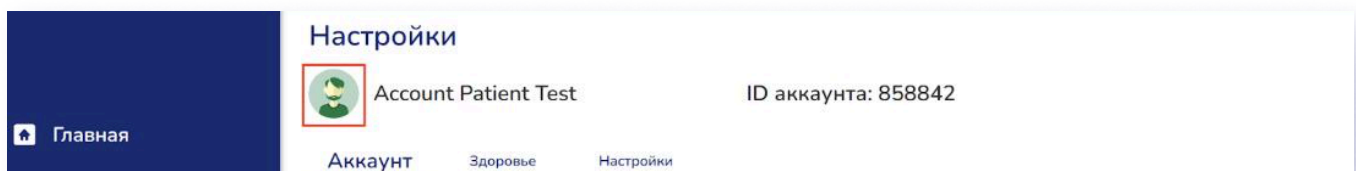


## Настройки личной информации

Эта страница вкладки позволяет изменять информацию, связанную с учетной записью.

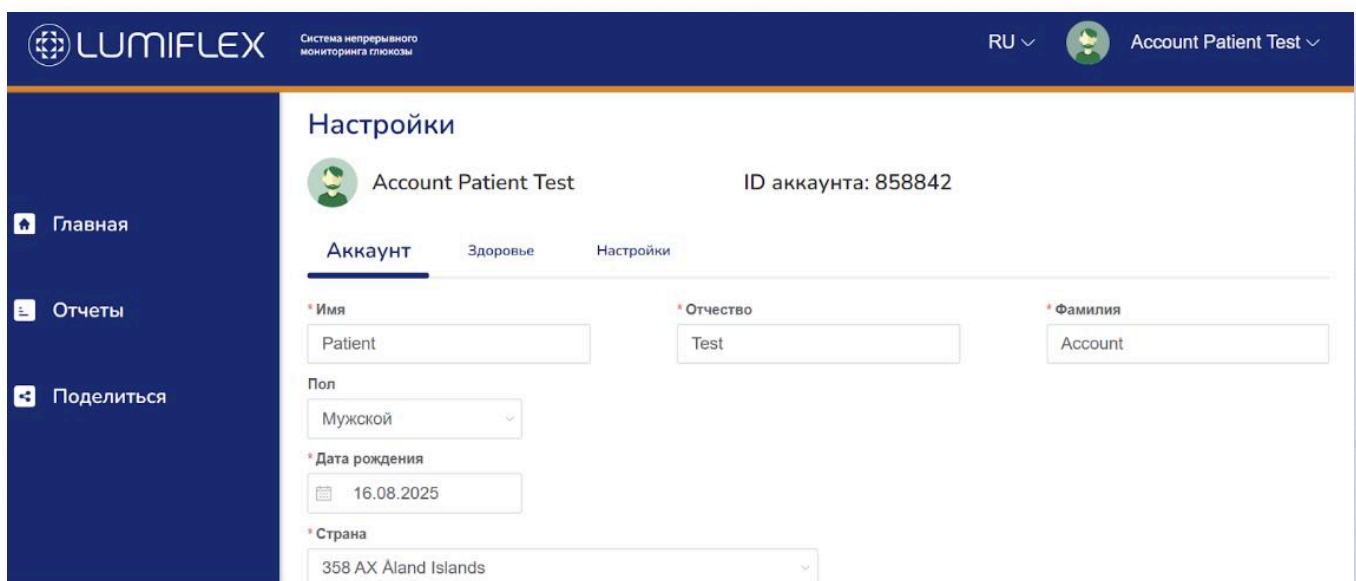

## Настройки профиля здоровья

Эта страница вкладки позволяет изменять информацию, связанную со здоровьем.

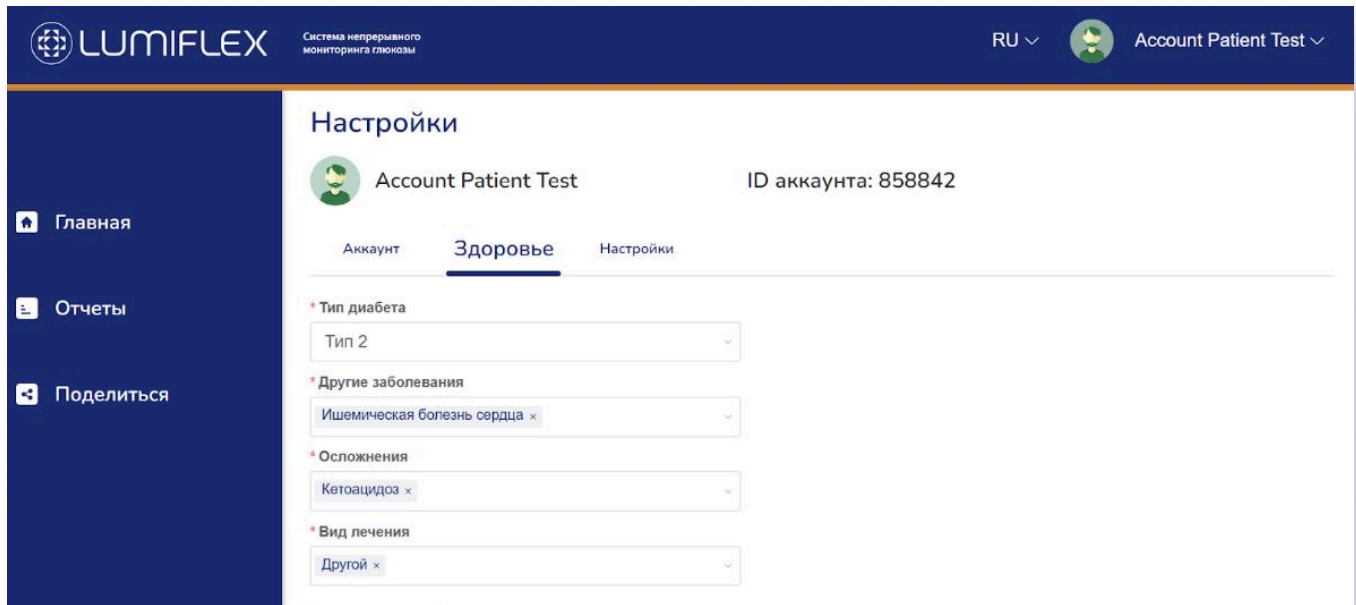

**Настройки**

Account Patient Test ID аккаунта: 858842

Аккаунт **Здоровье** Настройки

\* Тип диабета  
Тип 2


\* Другие заболевания  
Ишемическая болезнь сердца x

\* Осложнения  
Кетоацидоз x

\* Вид лечения  
Другой x

## Настройки единиц измерения

Эта страница вкладки позволяет изменять настройки единиц измерения веб-интерфейса.

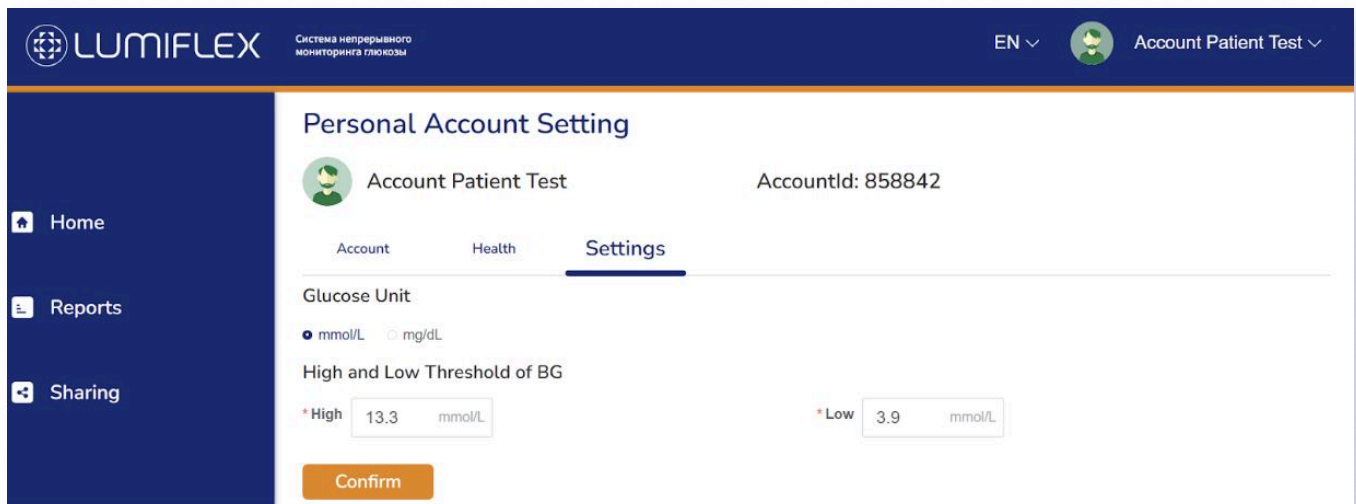

**Personal Account Setting**

Account Patient Test AccountId: 858842

Account Health **Settings**

Glucose Unit  
 mmol/L  mg/dL

High and Low Threshold of BG

\* High 13.3 mmol/L \* Low 3.9 mmol/L

Confirm

## Отмена учетной записи

Отмена учетной записи означает, что все исторические данные и связанная информация будут безвозвратно удалены.



## Выход из системы

Нажмите здесь, чтобы выйти из своей учетной записи.

