


Настройка Безопасного режима

Пошаговая инструкция

Безопасный режим

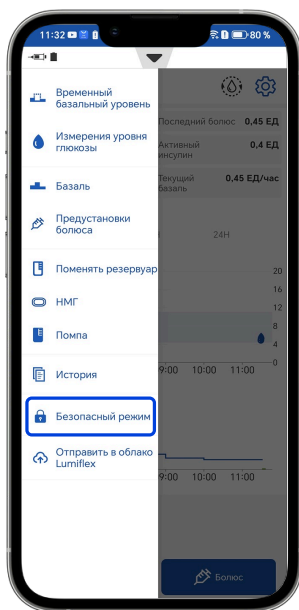



В безопасном режиме вы можете выполнять только следующие действия:

- приостанавливать или возобновлять инфузию инсулина,
- вводить болюс через предустановленный болюс,
- фиксировать измерения уровня глюкозы в крови,
- просматривать историю.




Вы можете настроить и включить безопасный режим на странице «Безопасный режим» в главном «Меню». Для настройки соответствующих параметров безопасного режима, следуйте подсказкам в приложении.

Настройка безопасного режима




Настройте подачу инсулина и нажмите «Далее».

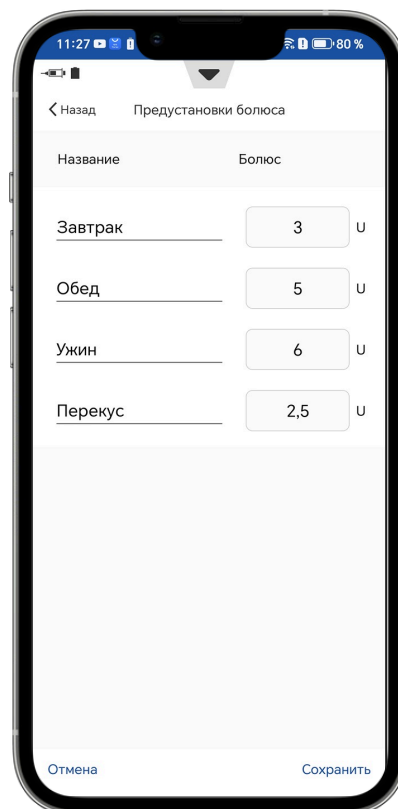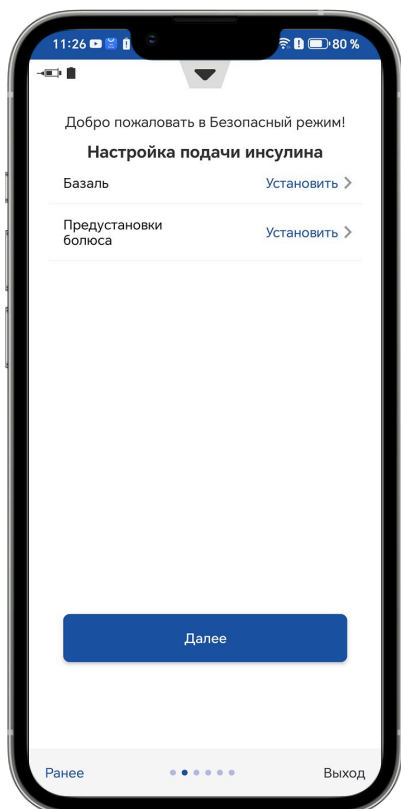

Включите все уведомления, необходимые для корректной работы безопасного режима. Нажмите «Далее» и дождитесь установки соединения.

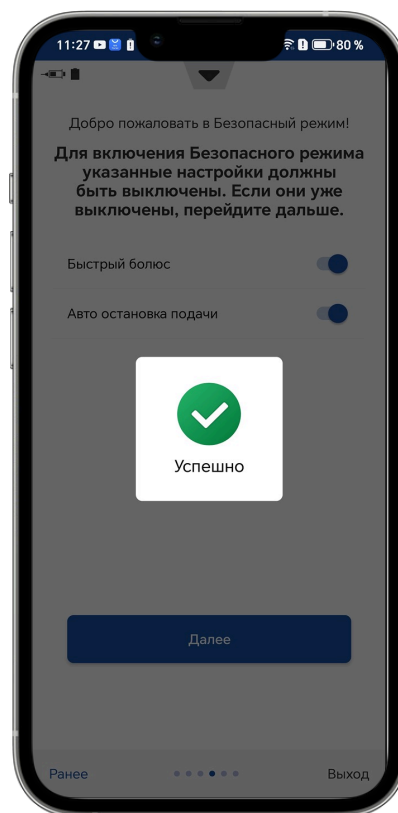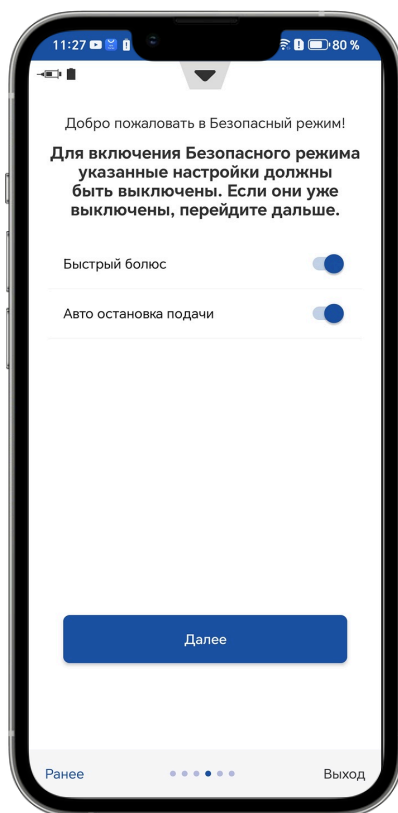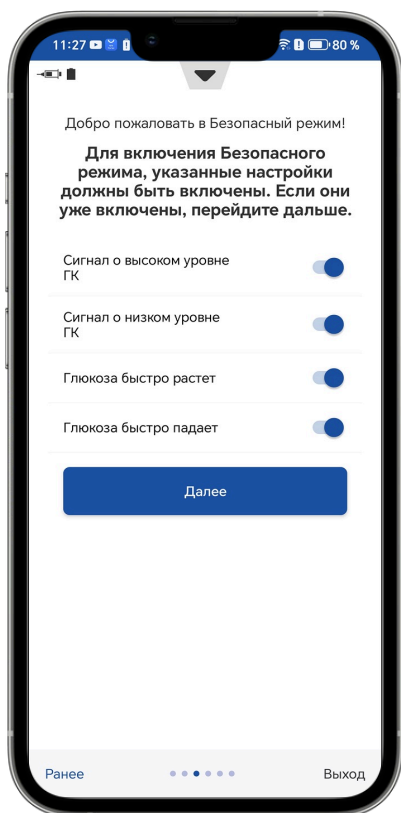


Установите и запомните пароль для безопасного режима. После активации безопасного режима возможности приложения будут ограничены и вид главного «Меню» изменится.

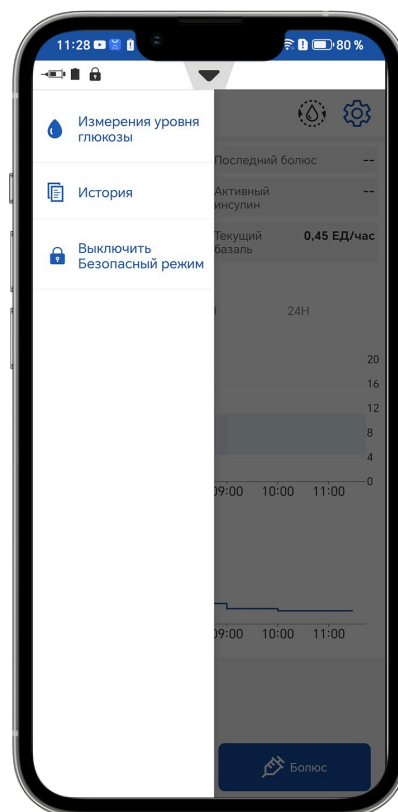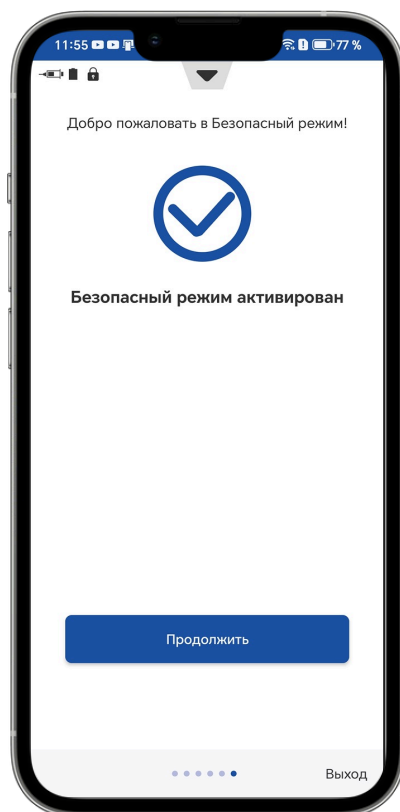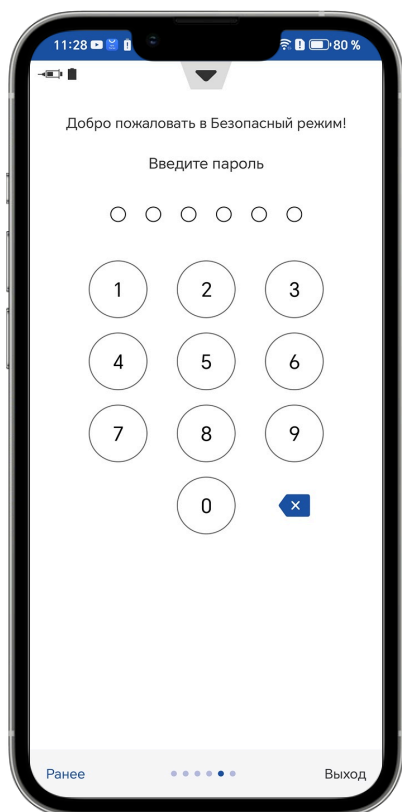


Возможности «Безопасного режима»


Вы можете вручную вводить данные измерений уровня глюкозы на странице «Измерения уровня глюкозы» в главном «Меню».

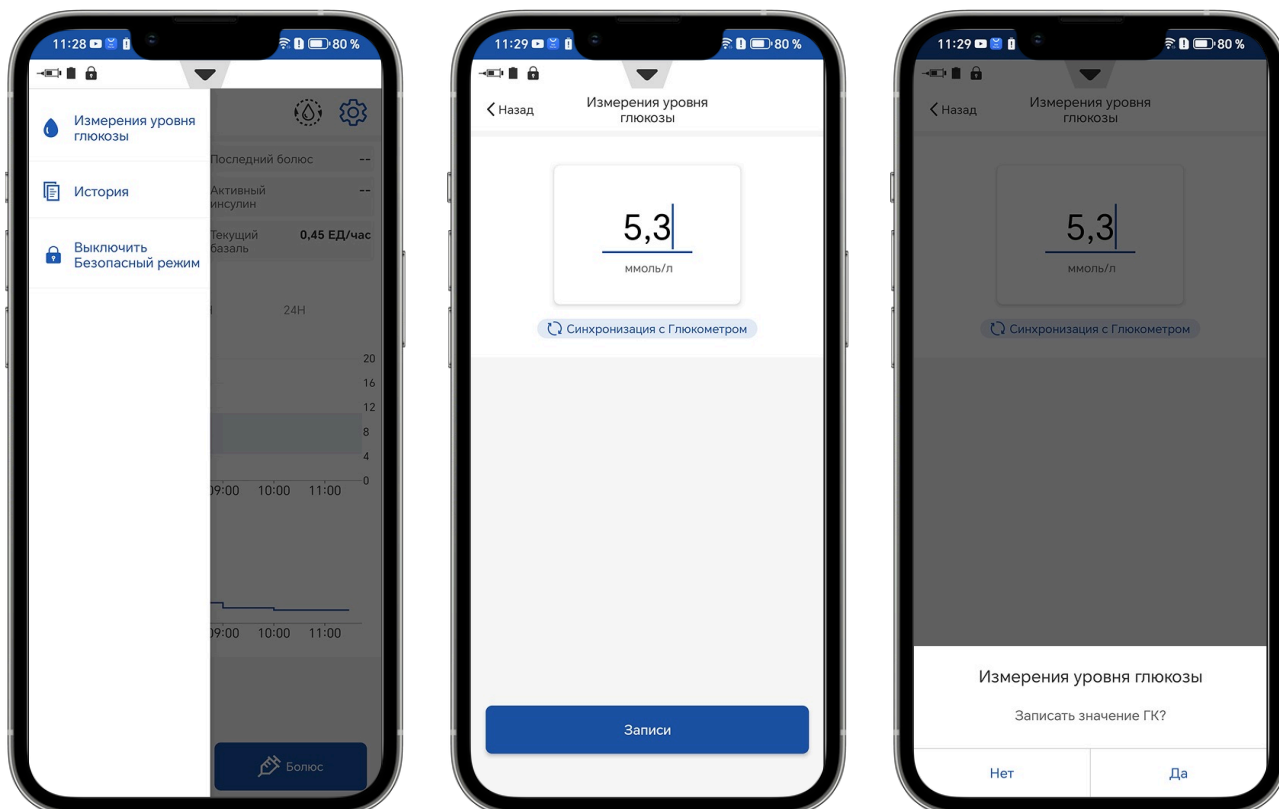


Вы можете вводить болюс через кнопку «Болюс» на главной странице приложения.

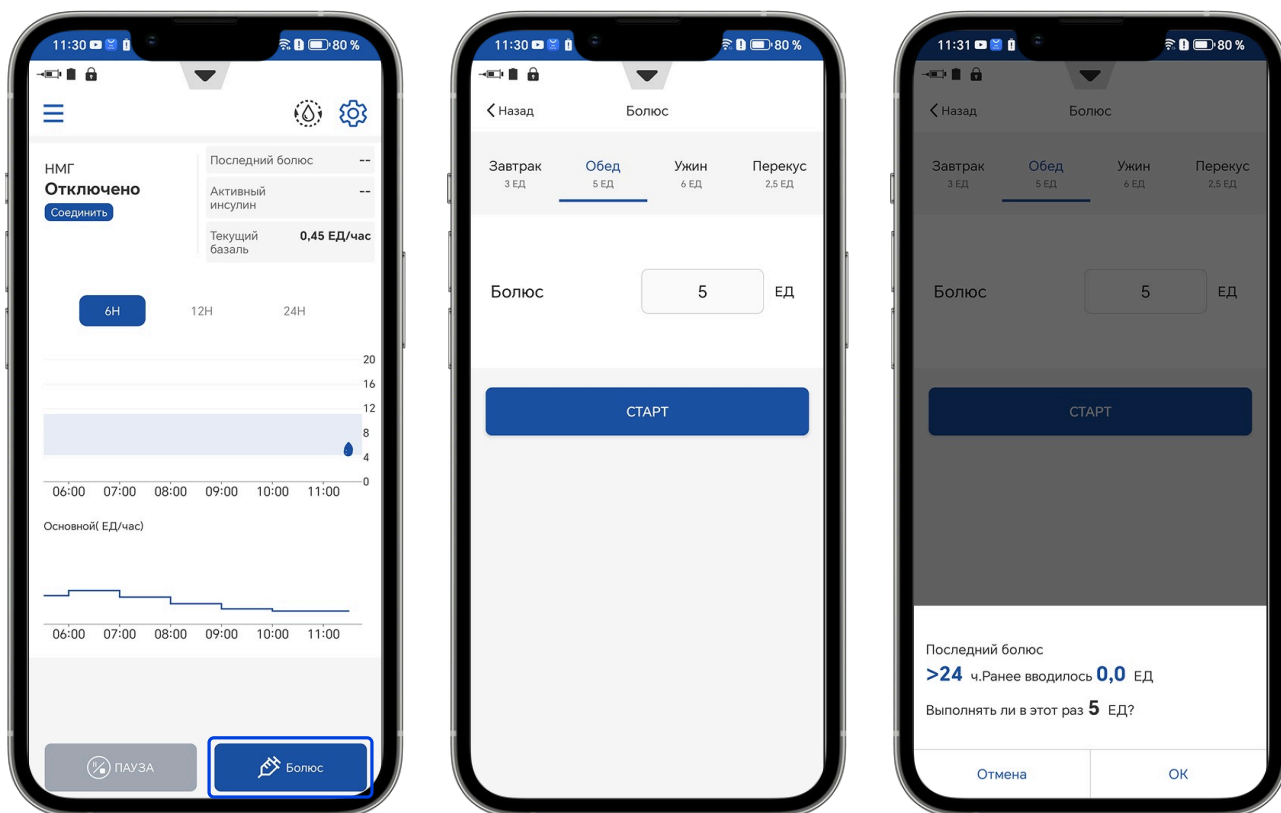

Вы можете просматривать суточные записи, события и графики, связанные с введением инсулина на странице «История» в главном «Меню».

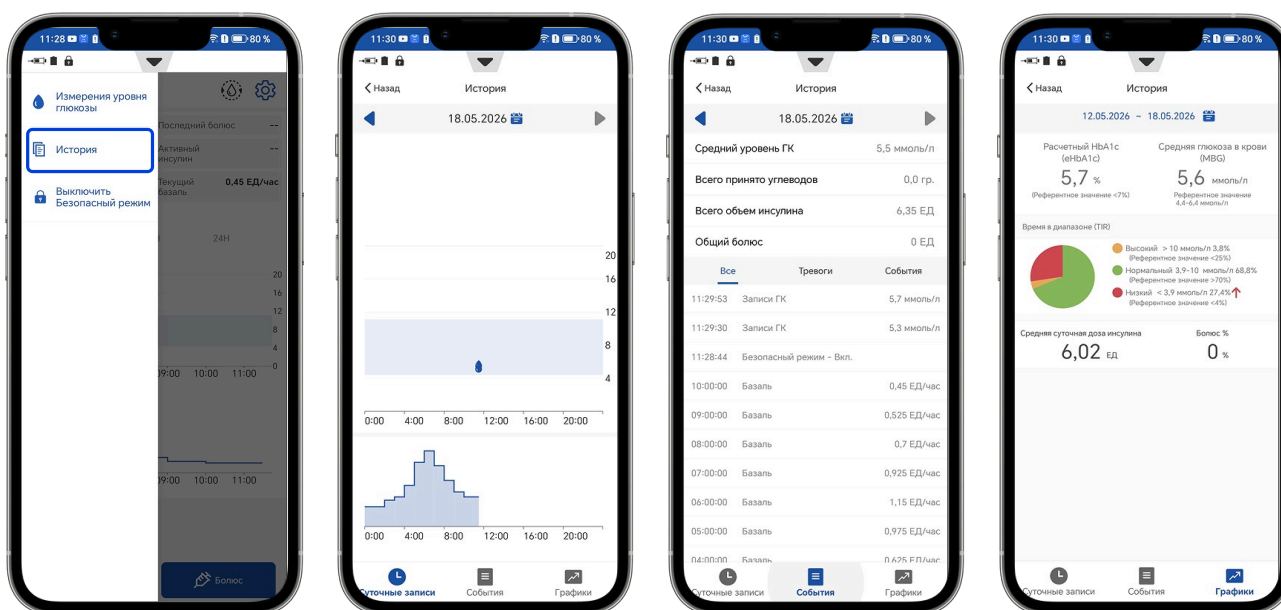


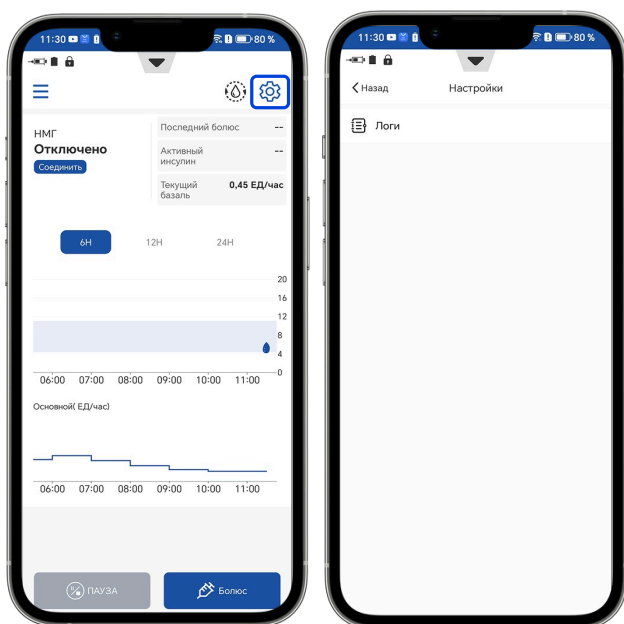


Вы можете просматривать логи в меню «Настройки».

Отключение «Безопасного режима»

Для отключения безопасного режима в главном «Меню» нажмите «Выключить Безопасный режим». Введите пароль и подтвердите действие.

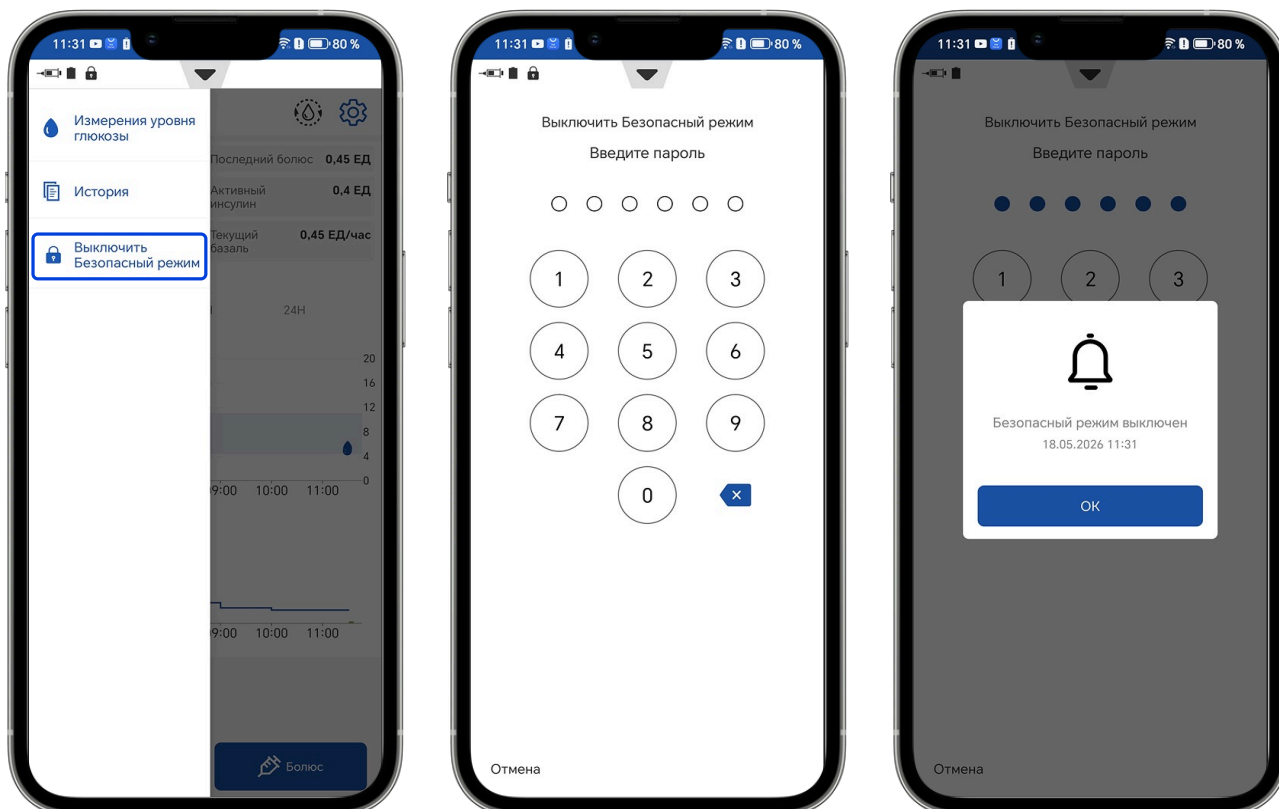

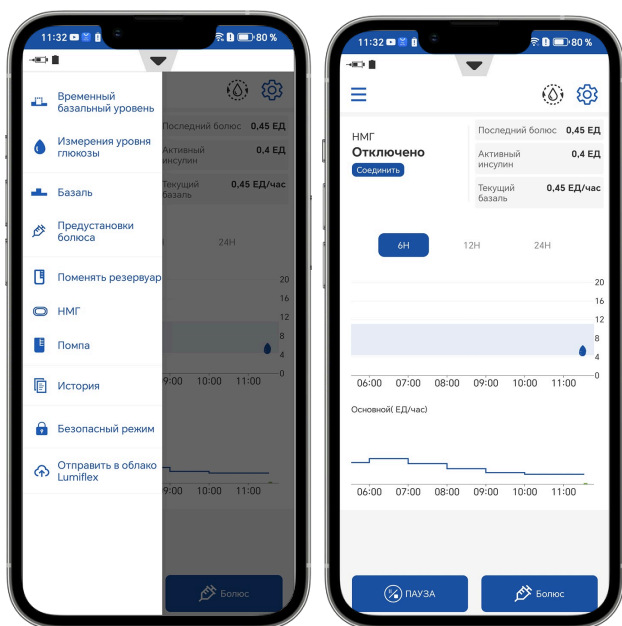

После отключения безопасного режима вам вновь станет доступен весь функционал приложения Lumiflex Lumipod.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами

 [Поддержка в Telegram](#)

 [Поддержка в MAX](#)

 lumipod@lumiflex.ru