

Установка и настройка приложения

Пошаговая инструкция



Android



iOS (iPhone)

Инструкция по установке приложения Lumipod



Установка на Android

1. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.
2. Загрузите и установите приложение на ваш смартфон.

[Ссылка на Google Play](#)

Установка на iOS

1. Отсканируйте QR-код или перейдите по ссылке.
2. Загрузите и установите приложение на ваш смартфон.

[Ссылка на App Store](#)



Инструкция по установке приложения Lumipod

Для пользователей без доступа
к российскому Google Play и App Store



Установка на Android

1. Отсканируйте **QR-код**.
2. Загрузите соответствующий **APK-файл** со страницы.
3. Дождитесь завершения загрузки и установите приложение.

[Ссылка на скачивание файла](#)


Установка на iOS

1. Загрузите приложение **TestFlight** из App Store.
2. Отсканируйте **QR-код** или загрузите **последнюю версию Lumipod** по ссылке через TestFlight.
3. Дождитесь завершения загрузки и установите приложение внутри TestFlight.

[Ссылка на скачивание](#)



Запустите приложение

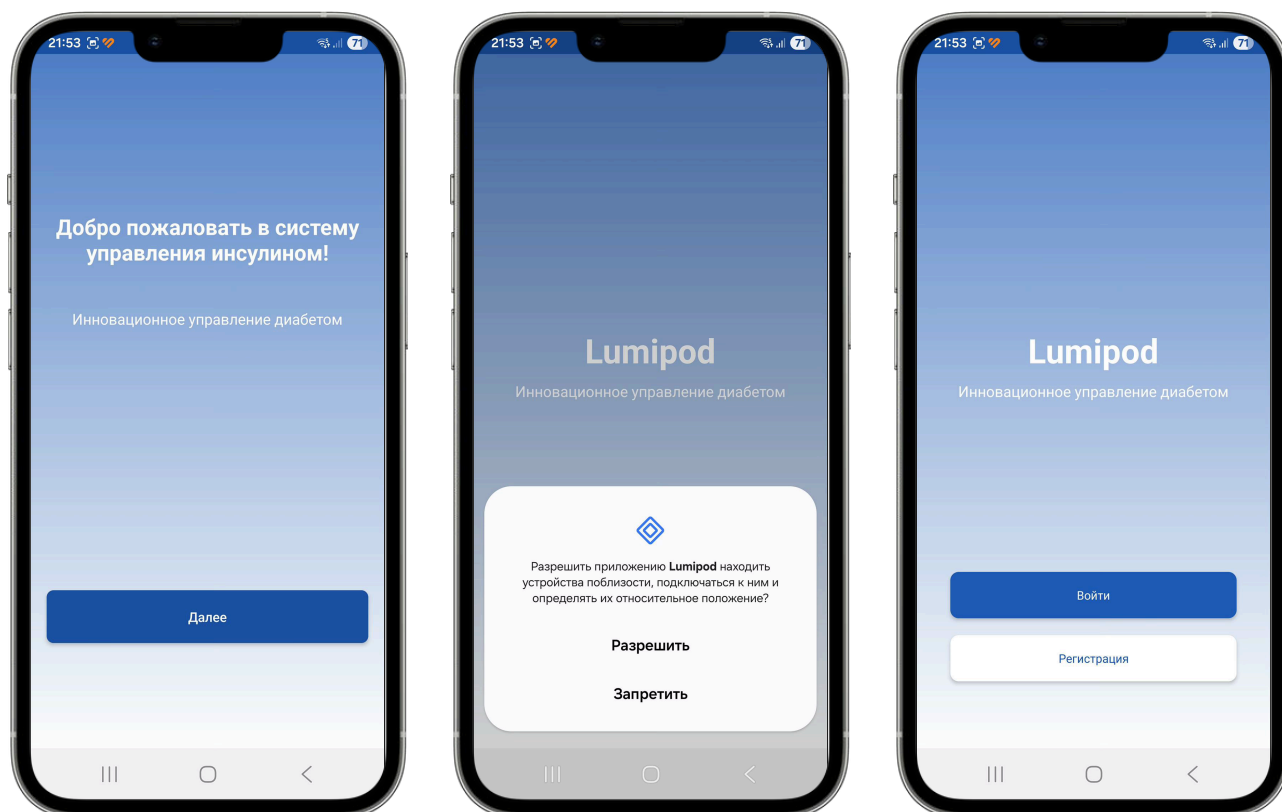

Шаг 1

Запустите приложение Lumipod на телефоне.


Шаг 2

Выдайте приложению Lumipod необходимые разрешения.

Шаг 3

Нажмите на кнопку «Регистрация».

Создайте профиль

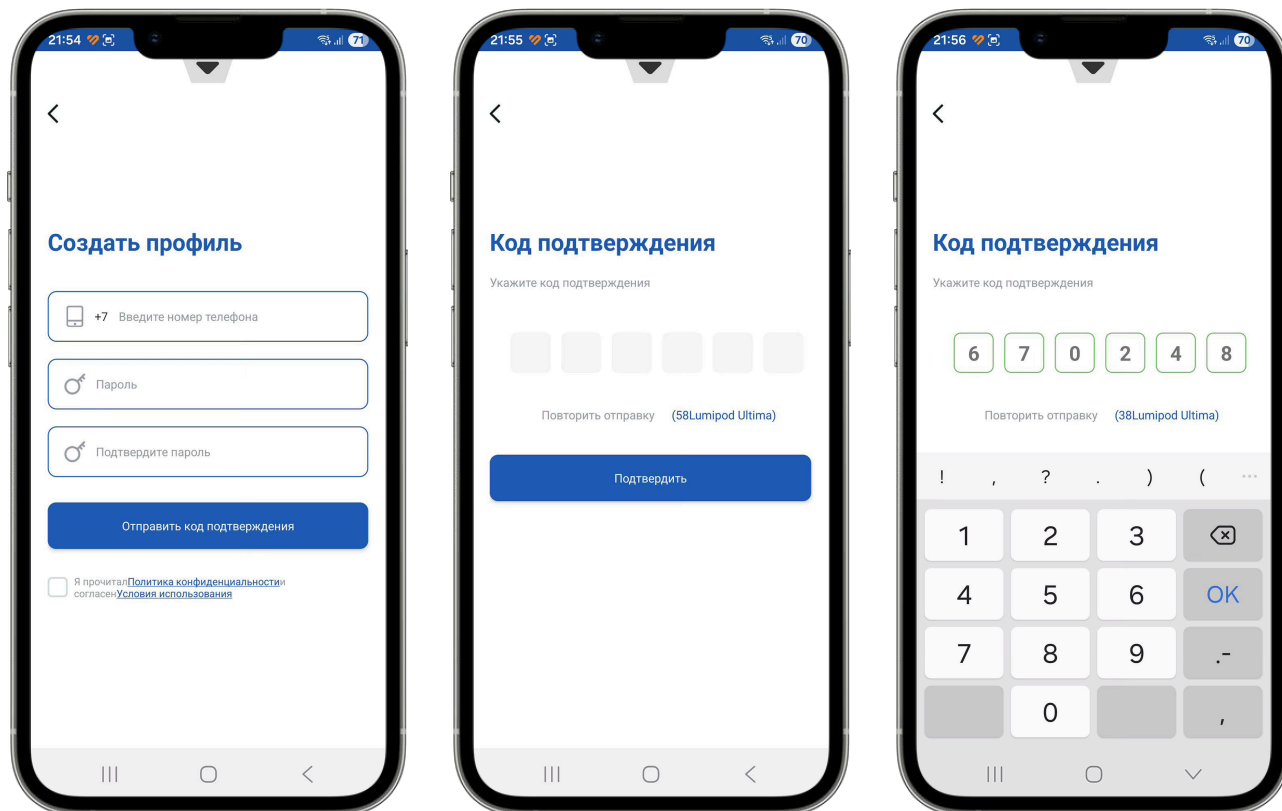

Шаг 1

Введите свой номер телефона.

Шаг 2

Придумайте пароль из 8–12 латинских букв и/или цифр.

Шаг 3


Нажмите «Отправить код подтверждения».

Шаг 4

Введите код из СМС.

Обратите внимание! Для регистрации в приложении используйте только российский номер мобильного телефона.

Войдите в приложение

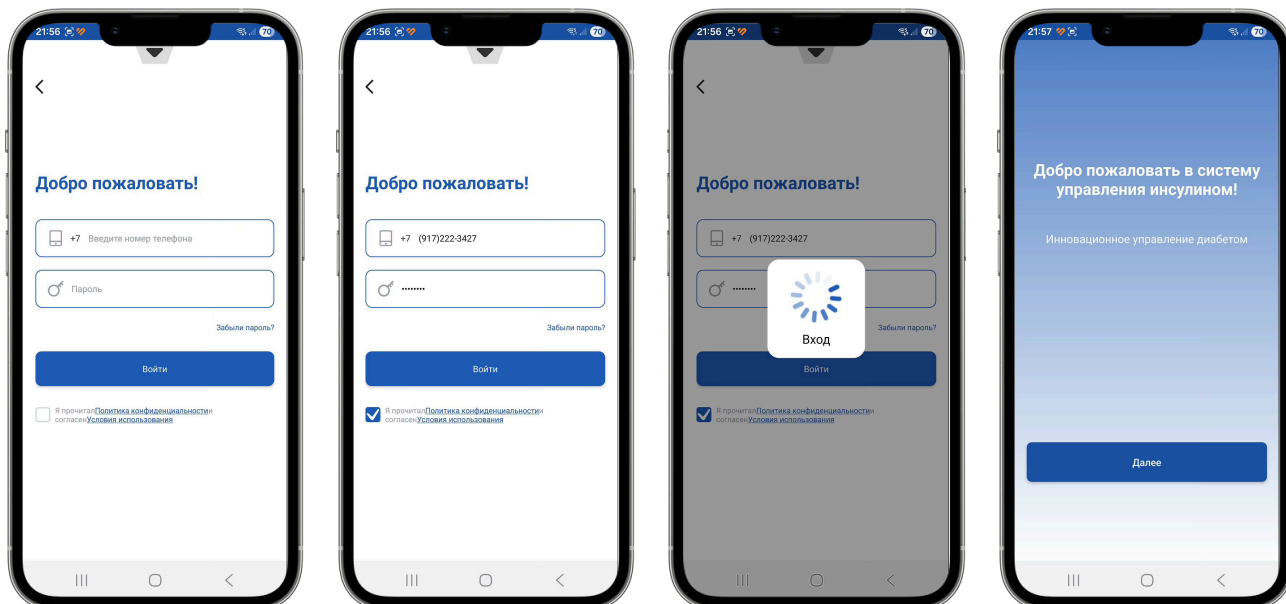

Шаг 1

Введите свой номер телефона и пароль.

Шаг 2

Нажмите «Войти».


Шаг 3

Дождитесь завершения входа в приложение и нажмите «Далее».

Обратите внимание! Если вы введете неверный пароль 3 раза, ваша учетная запись будет заблокирована. Вы сможете повторить попытку входа в приложение через 20 минут.

Настройте базальный уровень

Вы сможете изменить первоначальные настройки базального уровня, болюса и оповещений позже в настройках приложения и телефона.

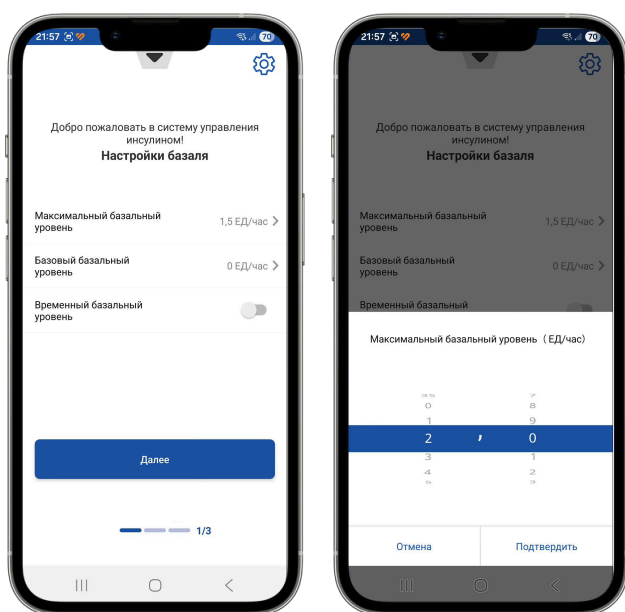

Шаг 1

Настройте максимальный базальный уровень.

Шаг 2


Настройте базовый базальный уровень.

Шаг 3


Включите временный базальный уровень.

Шаг 4

Нажмите «Далее».

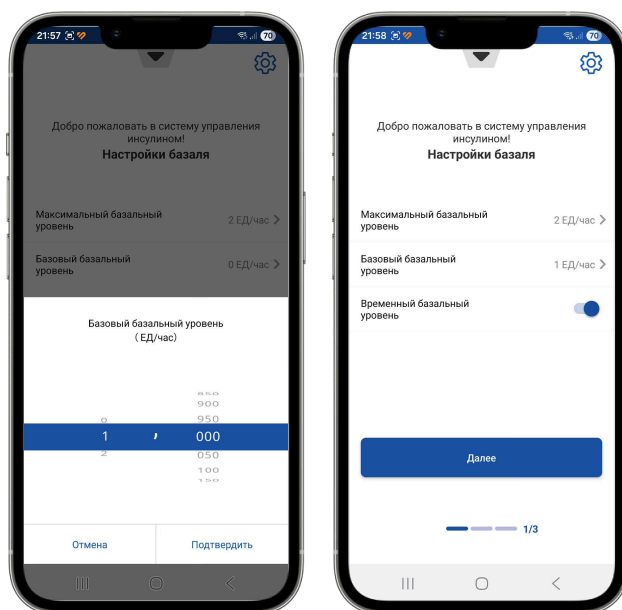


Настройте болюс

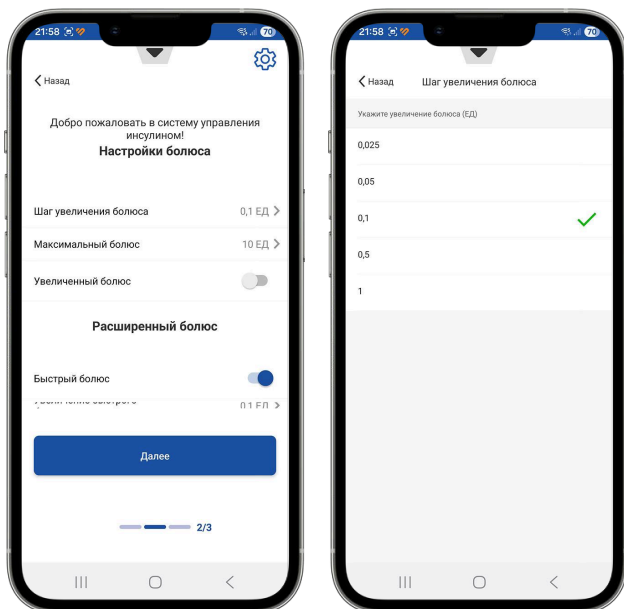

Шаг 1

Введите шаг увеличения болюса.

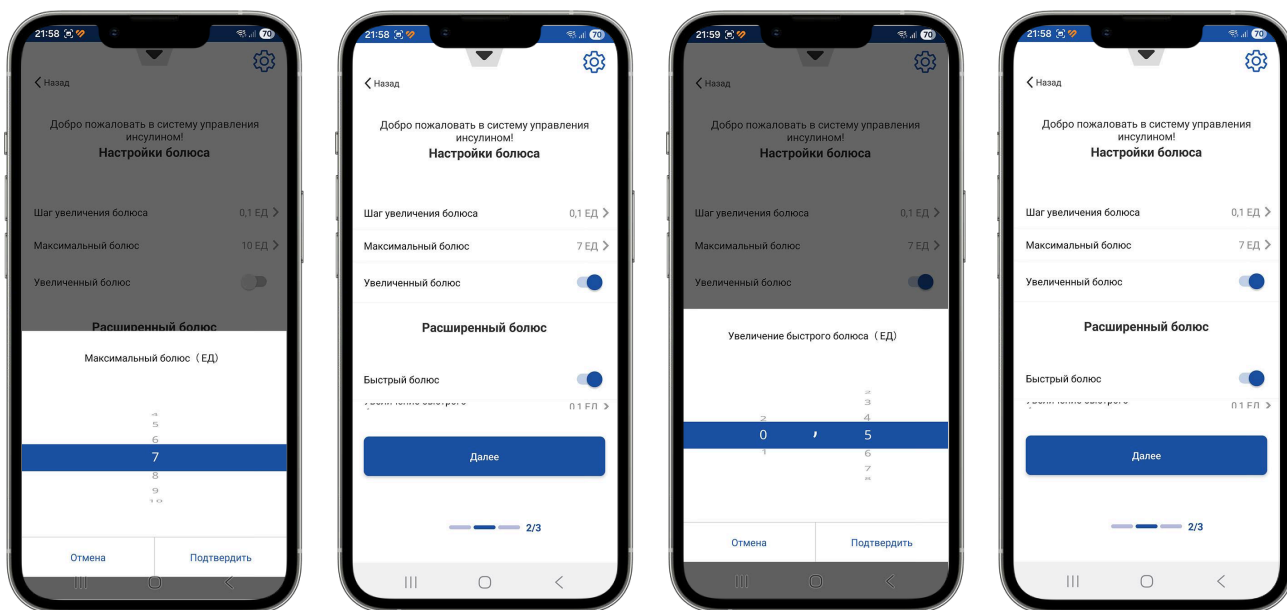

Шаг 2

Настройте максимальный болюс.

Шаг 3

Включите увеличенный болюс.


Шаг 4

Настройте быстрый болюс.

Шаг 5

Нажмите «Далее».

Настройте оповещения

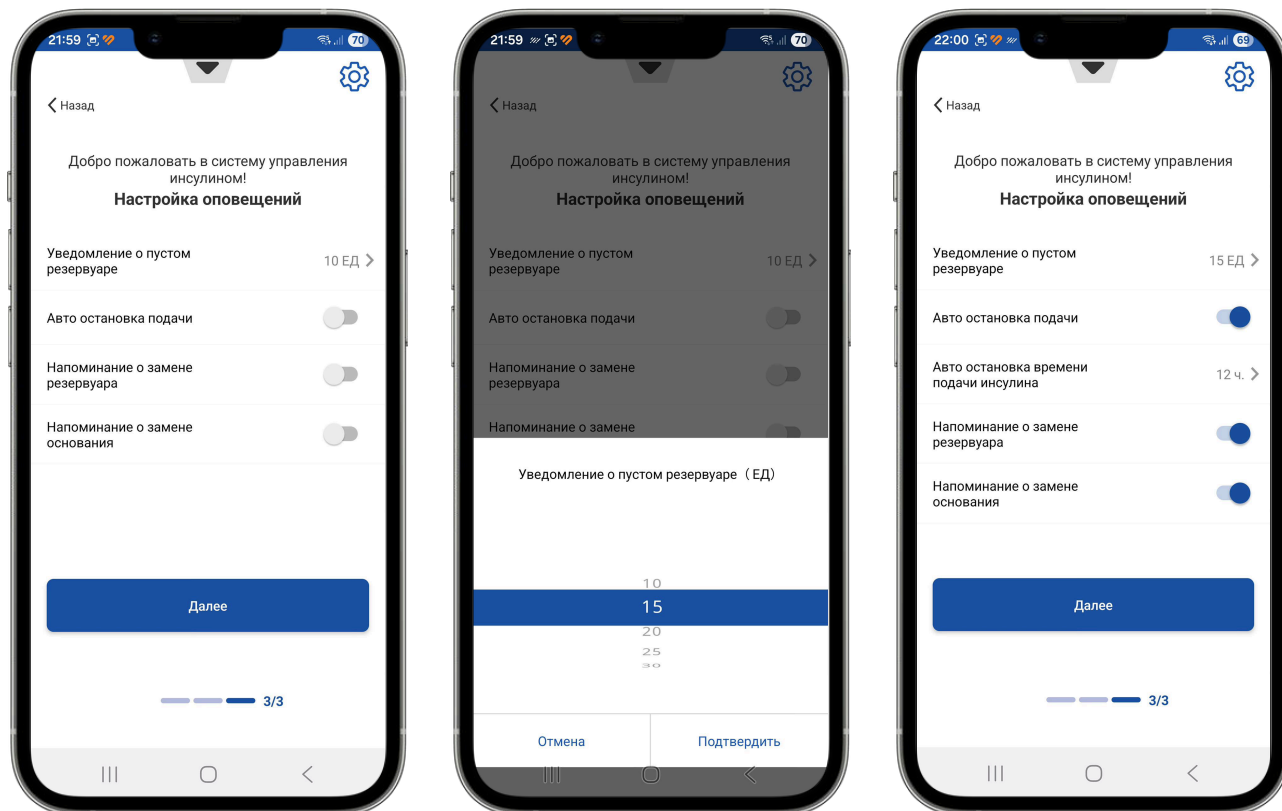

Шаг 1

Установите значение для уведомления о пустом резервуаре.

Шаг 2

Включите и установите время для автоостановки подачи.

Шаг 3

Включите напоминание о замене резервуара.

Шаг 4


Включите напоминание о замене основания.

Шаг 5

Нажмите «Далее».

Настройте телефон

Перейдите в настройки телефона и убедитесь, что приложению Lumiprod выданы **все необходимые для корректной работы разрешения**.

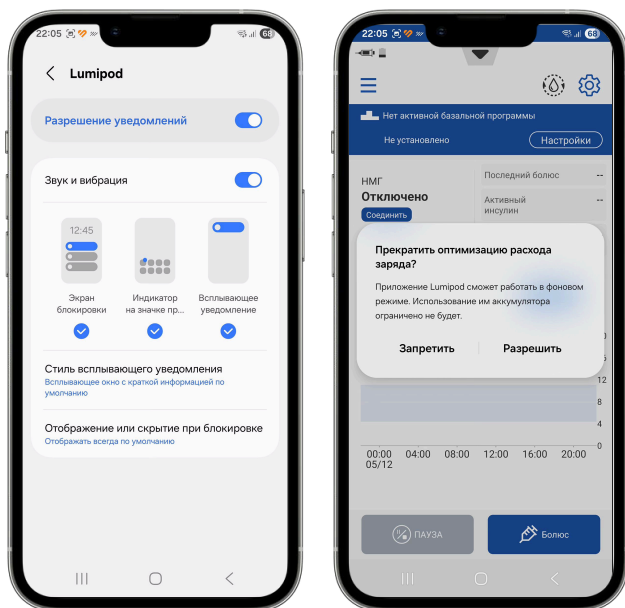

- ✓ Разрешите приложению Lumiprod присылать уведомления, отключите режим «Не беспокоить».
- ✓ Разрешите приложению Lumiprod работу в фоновом режиме и отключите режим энергосбережения.
- ✓ Включите Bluetooth и разрешите приложению Lumiprod находить устройства поблизости, подключаться к ним и определять их относительное положение (геолокацию).

Настройки разрешений для уведомлений

Цель: обеспечить своевременное отображение важной информации и уведомлений в приложении.

1. Откройте **«Настройки» мобильного телефона** и перейдите в раздел **«Уведомления»**.
2. Найдите приложение Lumiprod в списке приложений.
3. Включите разрешение на уведомления и следующие опции:
 - отображение уведомлений на экране блокировки;
 - звуковые и вибрационные оповещения;
 - отображение баннеров или всплывающих уведомлений;
 - прочие типы уведомлений в зависимости от вашего телефона.

Настройки режима «Не беспокоить»

Цель: избежать помех при приеме сигналов тревоги или уведомлений инсулиновой помпы из-за ненужных системных уведомлений или входящих звонков.

1. Войдите в **«Настройки» мобильного телефона** и найдите режим **«Не беспокоить»** или аналогичную опцию.
2. Добавьте приложение Lumipod в список исключений, для которых разрешены уведомления.
3. Убедитесь, что звуковые сигналы, вибрация и будильники приложения срабатывают нормально, когда включен режим «Не беспокоить» в мобильном телефоне.

Настройки работы в фоновом режиме

Цель: обеспечить круглосуточный сбор данных и своевременное получение уведомлений за счет разрешения приложению работать в фоновом режиме.

1. Откройте системные **«Настройки»** → **«Приложения»** → найдите Lumipod.
2. Убедитесь, что для приложения включен тумблер **«Работа в фоновом режиме»**.

Настройки режима энергосбережения

Цель: предотвратить прерывание фоновой передачи данных из-за низкого заряда батареи или режима жесткой экономии энергии, при котором телефон может принудительно закрывать приложение.


1. В меню настроек телефона найдите раздел **«Батарея»** (также может называться **«Аккумулятор»**, **«Контроль активности»** или **«Питание»**).
2. Выберите режим работы без ограничений (например, **«Неограниченно»** или **«Нет ограничений»**).

Настройки Bluetooth

Цель: обеспечить передачу данных между инсулиновой помпой и мобильным телефоном по Bluetooth.

1. Откройте **«Настройки» мобильного телефона** и найдите пункт **Bluetooth**.
2. Убедитесь, что Bluetooth включен.
3. Найдите **подключаемую инсулиновую помпу** в списке устройств Bluetooth и убедитесь, что она успешно подключена.
4. Для пользователей Android и iOS: убедитесь, что информация о местоположении включена для поддержки функции Bluetooth.

Завершение настройки

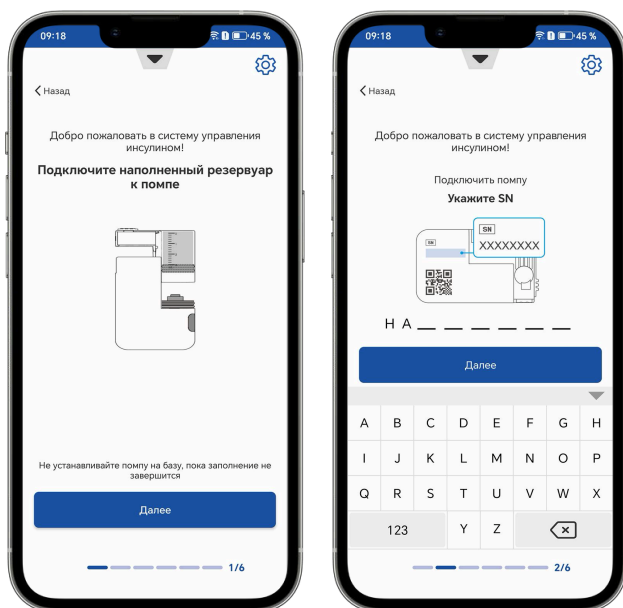

Регистрация и настройка приложения завершены. Теперь можно переходить к подключению помпы Lumiflex Lumipod.

Для оперативной
поддержки свяжитесь
с нами



[Поддержка в Telegram](#)



[Поддержка в MAX](#)



lumipod@lumiflex.ru